# Anleitung zum Aufsetzen formstabiler Kontaktlinsen

1.



### Hygiene

**Grundsätzlich gilt vor jeder Handhabung:**Hände gründlich mit Seife waschen, gut abspülen und mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.

2.



### Vorbereitung

Immer mit der gleichen Seite beginnen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Linse aus dem Aufbewahrungsbehälter nehmen und mit **MeniCare Pure** abspülen.

Keine spitzen Gegenstände verwenden und Vorsicht mit langen Fingernägeln.

3.







TIPP: Um sicherzugehen, dass die Linse auf dem Auge ist, einfach das Gegenauge zuhalten und die Sicht überprüfen.

#### Kontaktlinsen aufsetzen

- Die Kontaktlinse auf die Spitze des Zeigefingers der Lieblingshand legen und mit MeniCare Pure füllen.
- Den Kopf über den Spiegel beugen.
  Mit dem Mittelfinger der Lieblingshand den Lidrand des Unterlides nach unten ziehen.
- Mit dem Zeige- oder Mittelfinger der anderen Hand das obere Augenlid nach oben ziehen.
   Die Kontaktlinse auf das Farbige im Auge setzen.
   Dann langsam zuerst das Oberlid loslassen und danach das Unterlid.



# Anleitung zum Absetzen formstabiler Kontaktlinsen

1.



## Hygiene

**Grundsätzlich gilt vor jeder Handhabung:**Hände gründlich mit Seife waschen, gut abspülen und mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.

2.



## Kontaktlinsen absetzen

### Methode 1 - Sauger:

- Den Sauger zwischen Daumen und Zeigefinger am grünen Teil greifen.
- Das Unterlid wie beim Aufsetzen am Lidrand nach unten ziehen. Danach das obere Augenlid hochziehen.
- Den Sauger mittig auf die Kontaktlinse setzen und vom Auge wegziehen. Die Kontaktlinse durch Druck auf den weißen Teil des Saugers vorsichtig vom Sauger lösen.



#### Methode 2 - Blinzeln:

- Eine geöffnete Hand unter das Auge halten, um die Kontaktlinsen aufzufangen.
- Den Kopf etwas nach vorne neigen und den Zeigefinger mit leichtem Druck an den äußeren Augenwinkel legen.
- Das Auge weit öffnen, die Lider nach außen ziehen und gleichzeitig blinzeln. Die Lidkanten drücken die Kontaktlinse nach vorne, sie fällt in die offene Hand.



### Methode 3 - Lider aufeinander schieben:

- Den Kopf leicht nach unten neigen.
  Zeigefinger der Lieblingshand auf die Unterlidkante legen, den Zeigefinger der anderen Hand auf die Oberlidkante.
- Das Auge weit öffnen, mit den Fingern leichten Druck auf die Lider ausüben und die Lider aufeinander zu bewegen. Die Kontaktlinse hebt sich dadurch vom Auge ab.

IS/1252HH/001