

BRING ON THE INNOVATION



*Houd uw consumenten
langer op contactlenzen
met Miru 1month
multifocal toric lenzen*



www.menicon.nl

Duidelijk en comfortabel zicht voor dichtbij, veraf en alles daartussen

Er is een reden waarom mensen met astigmatisme stoppen met het dragen van contactlenzen wanneer presbyopie begint.

Veel mensen zijn nog steeds niet op de hoogte van de beschikbare opties en worstelen met leesbrillen of monovisie. Miru 1month multifocal toric contactlenzen bieden een toegankelijke, comfortabele en praktische oplossing, waardoor cliënten volop van het leven kunnen genieten.

- Een innovatief stabilisatiedesign voor jonge presbyopen met torische behoeften
- Voorzien van MeniSilk™-technologie voor een ademende, gezonde en comfortabele lens
- NanoGloss™-oppervlak vermindert de aanhechting van bacteriële biofilm en vetafzettingen





Er is een fantastische kans om mensen van 40 jaar en ouder kennis te laten maken met de Miru 1month multifocale torische contactlenzen.

Uit onderzoek blijkt dat Generatie X graag de vrijheid wil behouden om hun leven te leiden zoals zij dat willen, of dat nu gaat om het aangrijpen van nieuwe kansen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, actief blijven, werken of socialiseren.

Echter, met de komst van presbyopie, in combinatie met hun hoge visuele en astigmatische behoeften, verdienen zij een contactlensoplossing die past bij hun actieve levensstijl.

64%

van mensen van 40 jaar en ouder hebben een fulltime baan¹

40%

van vrouwen uit Generatie X streven ernaar hun jeugdige schoonheid te behouden²

76%

vindt dat je kansen moet grijpen wanneer ze zich voordoen³

¹Generation X Globalwebindex.

²Mintel Global Consumer Trends 2023 / Generation insights: Global Marketing Trends Sphere Group 2023.

³Generation X Globalwebindex.

⁴Menicon data on file 2020.

⁵Beesley J, and Elliott DB. Changes in ocular astigmatism with age: A longitudinal study. Ophthalmic Physiol Opt. 44(1):71-77, 2024.

De kans

Desondanks gebruikt de helft van de presbyope contactlensdragers nog steeds geen multifocale contactlenzen, waarbij een groot deel niet eens weet dat multifocale contactlenzen bestaan. Gezien een derde van de contactlensdragers torische contactlenzen draagt, is het belangrijk om dragers van 40 jaar en ouder multifocale torische contactlenzen aan te bieden, zodat zij hun actieve levensstijl kunnen voortzetten. Zeker omdat uit statistieken blijkt dat bij mensen boven de 40 jaar de cilindersterkte vaker verandert.⁵

De oplossing

Miru 1month multifocale torische contactlenzen bieden een toegankelijke, comfortabele en praktische oplossing, waarmee patiënten de vrijheid krijgen om volop van hun leven te blijven genieten.



Feel-good technologie

Ademend, dun en glad design = gezonde ogen



GEZONDHEID

Zorgeloos draagcomfort van 's ochtends tot 's avonds

De voordelen van goed gehydrateerde ogen zijn onomstreden. Ogen die kunnen ademen, zijn gezonder en maken zorgeloos dragen van 's ochtends tot 's avonds mogelijk. Daarom hebben we MeniSilk™-technologie ontwikkeld die een van de hoogste zuurstofdoorlaatbaarheidsniveaus biedt binnen disposable lenzen.



VISIE

Uitstekend zicht van dichtbij, veraf en alles daartussen

Multifocale torische lenzen bieden een soepele overgang tussen nabij-, tussen- en vertezicht. Cliënten ervaren geen plotselinge sprongen in focus wanneer ze schakelen tussen verschillende activiteiten, van dichtbij kijken, zoals werken op de computer, lezen en schrijven, naar activiteiten op afstand, zoals autorijden of simpelweg genieten van het uitzicht.



COMFORT

Een uitzonderlijke contactlenservaring

NanoGloss™-technologie zorgt voor een ultraglad oppervlak, waardoor de hechting van een bacteriële biofilm en lipidenanslag wordt verminderd. Dit zorgt voor schonere lenzen en biedt een uitzonderlijke contactlenservaring. Bovendien bevordert de combinatie van correctie voor veraf en dichtbij een meer ontspannen en natuurlijke hoofdhouding in vergelijking met een bril, wat bijdraagt aan een comfortabelere levensstijl.



Materiaal en oppervlaktetechnologieën

MeniSilk™


Uniek siliconenmateriaal en een innovatief wateraantrekkelijk ontwerp zorgen voor comfortabelere en beter ademende lenzen

- Uitzonderlijk hoge zuurstofdoorlaatbaarheid (DK/t)
- Uitstekende hydratatie
- Geoptimaliseerde transparantie

NanoGloss™

Unieke oppervlakte-technologie met nanometerprecisie


- Ultraglad oppervlak
- Weerstand tegen bacteriën
- Uitstekende vochtopname

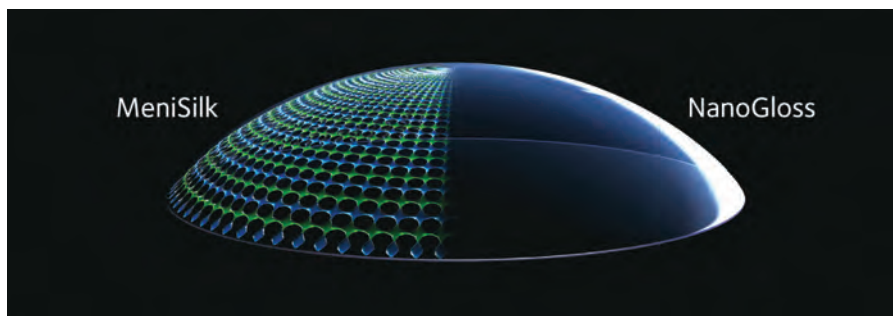

Innovatief Progressief Visiostable Design™ voor astigmatistische presbyopie

Een multifunctionele lens ontworpen voor scherp zicht, dichtbij en veraf


Dankzij het Progressieve Visiostable Design™ bieden de Miru 1month multifocale torische lenzen uitstekend zicht op afstand, ondersteunen ze een ontspannen focusaanpassing en bevorderen ze comfortabel zicht dichtbij door aanpassing en pupilbeperking.

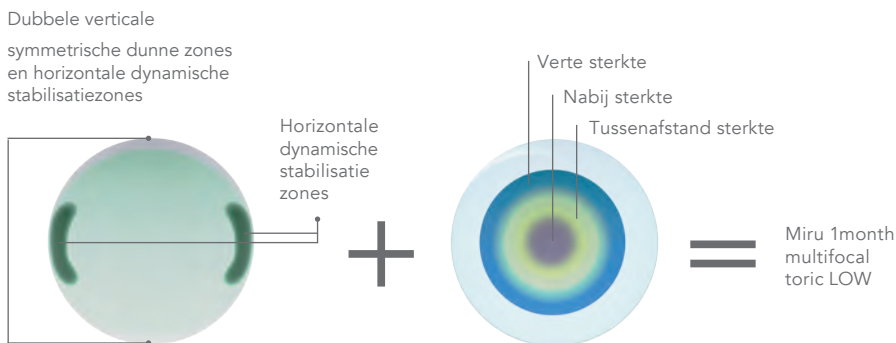

Uitsluitend ter illustratie

Het intelligente horizontale en verticale ontwerp sluit aan bij de natuurlijke asymmetrische bedekking van het hoornvlies door de oogleden. Dit maakt gebruik van de natuurlijke kracht van de oogleden om de lens optimaal te centreren en rotatie te voorkomen.

Het Progressieve Visiostable Design™ combineert de voordelen van torische en multifocale ontwerpen:

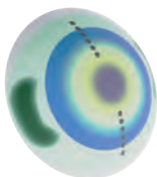

Uitsluitend ter illustratie

De intelligente dubbele verticale symmetrische dunne zones sluiten naadloos aan op de natuurlijke contouren van de oogleden, wat zorgt voor meer comfort en optimale centrering.

De horizontale dynamische stabilisatiezones passen bij de natuurlijke bedekking van het hoornvlies door de oogleden, waarbij de natuurlijke kracht van de oogleden wordt benut om de lens goed te centreren en rotatie te voorkomen.

De Miru 1month multifocale torische lens heeft een progressieve multifocale geometrie met een center near ontwerp. Deze lens met torische achterkant beschikt over een concentrisch optisch ontwerp.


Opmerking: In tegenstelling tot de 1month torische lens heeft de multifocale torische lens een symmetrische slab-off. Dit betekent dat bij de 1month multifocale torische lens de dunne delen aan de boven- en onderkant dezelfde grootte hebben. Bij de torische versie is de slab-off asymmetrisch, waardoor de zones aan de boven- en onderkant verschillende afmetingen hebben.




Oppervlakteperfectie voor gezonde ogen

Nanogloss™-technologie met nanometerprecisie creëert een ultraglad oppervlak, waardoor de hechting van bacteriële biofilms en lipidenanslag wordt verminderd. Dit ondersteunt een schone, gezonde lensdragerervaring.

Staphylococcus aureus

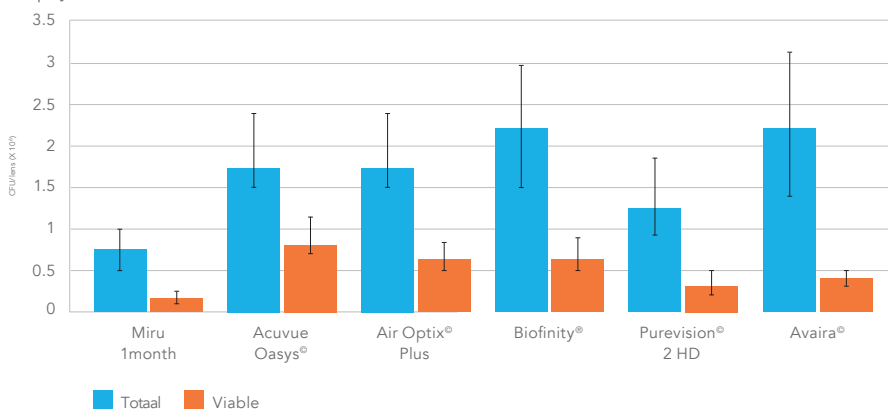

Pseudomonas aeruginosa

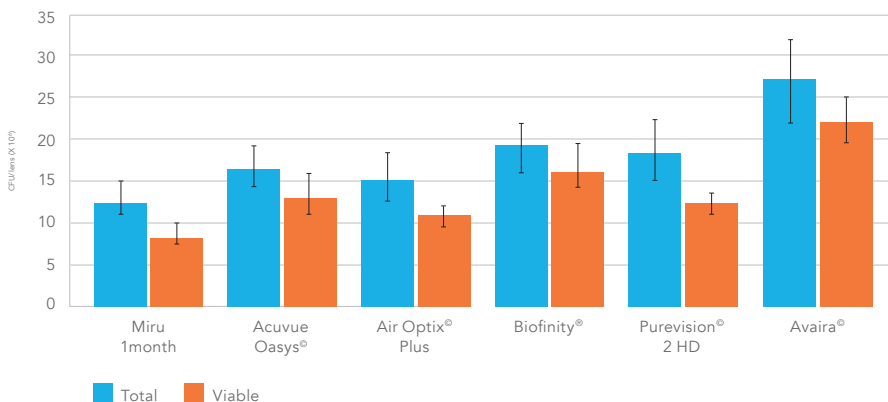

Miru 1month toont het laagste niveau van bacteriële hechting op gedragen lenzen in vergelijking met andere siliconen hydrogel-lenzen.¹

Voordelen van het verminderen van afzettingen


Een superglad oppervlak voor schonere contactlenzen en gezonde ogen die comfortabel aanvoelen en helder zicht bieden.

¹Vijay A. K., et al.: Bacteriële adhesie aan ongebruikte en gedragen siliconen hydrogel lenzen, *Optom Vis Sci.* 89(8): 1095-1106, 2012.



Zuurstofoptimalisatie

De dikte van een lens kan de zuurstofdoorlaatbaarheid aanzienlijk beïnvloeden. Dankzij de MeniSilk-technologie, die een Dk/t-waarde van 161 biedt, optimaliseert het Miru 1month multifocal torische ontwerp de zuurstoftoevoer over het gehele lensoppervlak en binnen het volledige sterktebereik. Dit maakt het een van de hoogste niveaus van zuurstofdoorlaatbaarheid onder alle commercieel verkrijgbare wegwerplenzen.

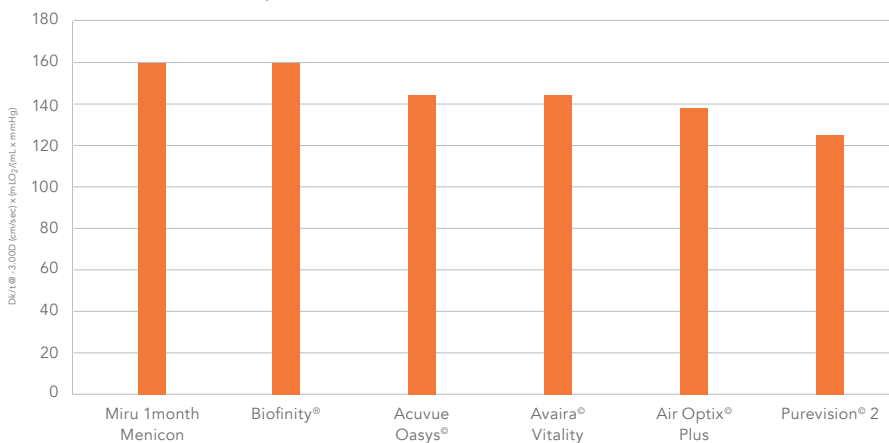



Gebaseerd op gegevens van fabrikanten

Comfort

*Balans tussen ontwerp en materiaal
voor optimaal draagcomfort*

Miru 1month multifocale torische lenzen hebben een uniek randprofiel dat toegepast wordt over het volledige sterktebereik, wat ultiem comfort biedt.

Ondanks de sterkte blijft de lensperiferie en de randdikte gelijk, waardoor verschillen in comfort tussen de ogen door variaties in randdikte tussen lenzen worden geëlimineerd. Hierdoor kunnen de oogleden moeiteloos tot wel 28.000 keer per dag over de lenzen glijden.

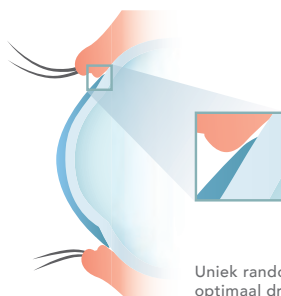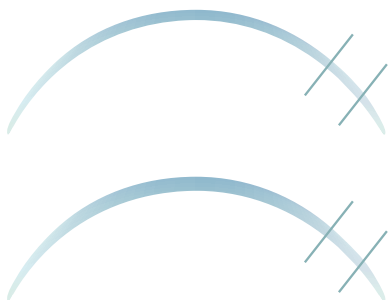



Aanpasadvies Miru 1month multifocale torische lenzen



Verwachtingen bespreken

Begin een gesprek met de klant om hun behoeften, levensstijl, doelen en verwachtingen te begrijpen.

Stappenplan voor een succesvolle aanpassing:

Stap 1 – Kies de lens

Begin met een nieuwe, volledige refractie. Gebruik indien nodig de Menicon Toric Calculator.

Na de refractie:

- Kies een lens met de hoogst positieve sferische sterkte voor afstand, binoculair gemeten.
- Kies de cilinder sterkte en as.
- Bepaal het dominante oog.
- Selecteer de initiële lenzen.

Stap 2 – Lenscontrole


Nadat de cliënt de lens heeft geprobeerd, voer een controle uit voor de definitieve lensbestelling.

- Bespreek ervaringen uit de praktijk voor zowel dichtbij als veraf.
- Controleer de stabilisatie op basis van de markeringen.
- Voer een binoculaire overrefractie uit en bepaal de minst negatieve sterkte voor afstand.
- Controleer de kwaliteit van het nabijzicht. Indien verbetering van het nabijzicht nodig is: Voeg S+0,25D toe aan het niet-dominante oog.

INITIËLE LENS keuze



NABIJZICHT aanpassen

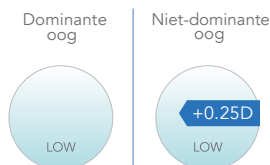

Product Specificaties Miru 1month Menicon multifocaal torisch

Kenmerken

Materiaal	asmofilcon A (Silicone hydrogel)
Watergehalte	40%
Dk/t @ -3.00D	$161 \times 10^{-9} (\text{cm/sec}) \bullet (\text{mLO}_2 / (\text{mL} \times \text{mmHg}))$
Centrale dikte	0.08mm @ -3.00dpt

Parameters

Diameter	14.2mm
BCR	8.6mm
Sterkte	0.00dpt tot -10.00dpt stappen van 0,25dpt stappen van 0,50dpt 0.00 -6.00 -10.00
Cylinder, Assen	-0.75dpt, -1.25dpt
	90°, 180°
Additie	LOW

Lens Markering



Draagtijd	Dagelijks dragen, maandelijks vervangen
Verpakking	Verkrijgbaar in een verpakking van 6



Tips voor een succesvolle aanpassing

- Streef ernaar om de laagste min sterkte te bepalen die op afstand geaccepteerd wordt.
- Op basis van situaties uit het dagelijks leven (zoals telefoon, laptop) kunnen kleine binoculaire aanpassingen worden gedaan om aan de behoeften van de cliënt te voldoen.
- Leg de impact van licht uit: Meer licht zorgt ervoor dat de pupil kleiner wordt, waardoor het zicht dichtbij verbeterd in slechte lichtomstandigheden.



Maak deel uit van de oplossing

Ontdek reinheid, comfort en uitzonderlijke waarde met Menicon- en Soleko's assortiment contactlensvloeistoffen, speciaal ontworpen om aan de dagelijkse verzorgingsbehoeften van de Miru 1month contactlensfamilie te voldoen.

Mycare

Mycare is een nieuwe all-in-one vloeistof voor zachte contactlenzen, verrijkt met plantaardige ingrediënten en hyaluron voor optimaal comfort en natuurlijke bescherming van het hoornvlies. Geschikt voor alle zachte lenzen, biedt Mycare eenvoudige reiniging en opslag, antibacteriële werking, en is ideaal voor mensen met gevoelige ogen.

Solocare Aqua

SoloCare Aqua is een all-in-one vloeistof voor zachte lenzen met Hydrolock® voor extra hydratatie en MicroBlock® voor hygiënische reiniging. Zorgt voor langdurig comfort, frisse lenzen en eenvoudige dagelijkse verzorging.





Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw accountmanager op
0591 610 640.



www.menicon.nl