

# Aanpasregels Kisu 1month Multi Toric

1

Doe een subjectieve refractie voor ver en nabij, voer deze samen met de k-waardes in Easyfit in.

2

- Selecteer de additie volgens onderstaand schema:

| Bril-additie      | Beide ogen           |
|-------------------|----------------------|
| +0,75D tot +1,75D | Kisu Near design     |
| +1,75D tot +2,50D | Kisu Distance design |

- Onderzoek de dominantie van het oog door afwisselend monoclair +1,50D voor te houden
- Bestel paslenzen

3

Beoordeel de lenzen na 1 à 2 weken:

- Refractioneer maximale plussterkte voor de verte met paslenzen in.
- Beoordeel de binoculaire visus voor nabij en afstand
- Beoordeel de stabilisatie van de lens middels de markeringen.
- Pas eventueel de visus aan volgens onderstaande schema's:

| Initiële lenskeuze: Kisu Near design |                  |                    |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| Nabij-zicht aanpassen                | Dominante oog    | Niet-dominante oog |
| Optie 1                              | CN               | CN +0,25D/+0,50D   |
| Optie 2                              | CD max. additie  | CN                 |
| Vertezicht aanpassen                 |                  |                    |
| Optie 1                              | CN -0,25D/-0,50D | CN                 |
| Optie 2                              | CD               | CN                 |

| Initiële lenskeuze: Kisu Distance design |                             |                    |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Nabij-zicht aanpassen                    | Dominante oog               | Niet-dominante oog |
| Optie 1                                  | CD                          | CD +0,25D/+0,50D   |
| Optie 2                                  | CD                          | CD max. additie    |
| Vertezicht aanpassen                     |                             |                    |
| Optie 1                                  | CD -0,25D/-0,50D            | CD                 |
| Optie 2                                  | Indivisual Toric/Miru Toric | CD                 |

Wanneer de visus naar tevredenheid is, bestelt u de definitieve lens.