

Miru 1 day UpSide Sphere & Multifocal, onze SiHy daglens mét Smart Touch™ technologie

Miru 1 day UpSide is een siliconen hydrogel daglens met Smart Touch™ technologie, wat zorgt voor gezond en hygiënisch lensdragen en eenvoudige handling. De lens is gemaakt van een hoog zuurstofdoorlatend, ultrazacht materiaal met extra lage modulus.



Smart Touch™ technologie




4 simpele stappen om Miru 1 day UpSide in te zetten, door middel van onze Smart Touch™ technologie.

De binnenkant van de lens ligt naar beneden, zodat de lens uit de verpakking gehaald kan worden en ingezet kan worden zonder de binnenkant van de lens aan te raken.

Comfort

Dé siliconen hydrogel daglens met de laagste modulus voor het comfort van hydrogel en de handling van siliconen.

Oppervlak met lage frictie met nanometerprecisie ontworpen voor een optimaal comfort, de hele dag.

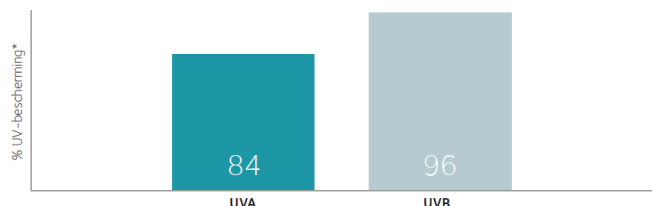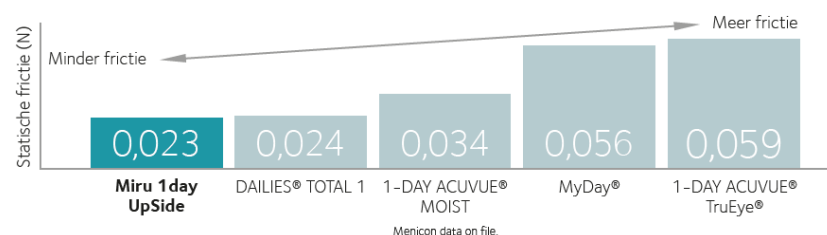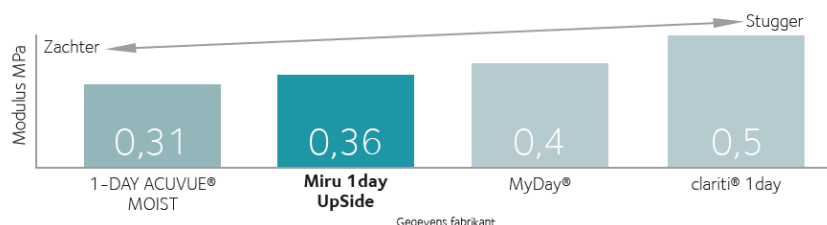

Miru 1 day UpSide biedt een klasse 2 UV-bescherming voor bescherming het hele jaar door.

*@ -3,000 Menicon data on file

UV-bescherming

Ingebouwde UV-bescherming tegen schadelijke UV-straling.¹

Miru
1 day UpSide




¹Waarschuwing: UV-absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen en zouden moeten worden gedragen in combinatie met een zonnebril of skibril met UV-bescherming indien noodzakelijk.

Miru 1 day UpSide Multifocal


Miru 1 day UpSide is nu ook verkrijgbaar in multifocale variant!
Onze siliconen hydrogel daglens mét Smart Touch technologie, ook voor consumenten die een leesondersteuning nodig hebben.

Neuro Adaptive Design

Miru 1 day UpSide Multifocal is een multifocale daglens met een center near ontwerp. Het unieke Neuro Adaptive Design met vloeiende overgangen tussen dichtbij, tussenafstand en veraf kijken, zorgt voor een snelle gewenning aan de lenzen en een eenvoudige aanpas.

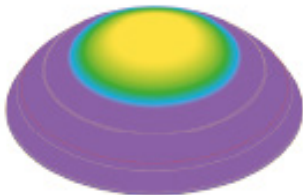

Keuze initiële lens

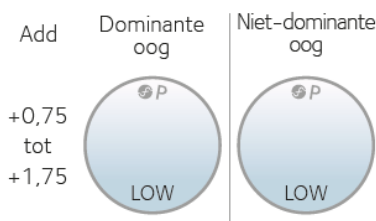


Aanpasadvies

- LOW additie is geschikt voor additie +0,75D tot +1,75D.
- Geef sferisch zoveel mogelijk plussterkte in de verte.
 - Bepaal het dominante oog met sferisch +1,50D voorhouden bij binoculair kijken.
 - Houd rekening met de hoornvliesafstand ($> \pm 4,00D$) en het sferische equivalent tot cilinder $-1,00D$.

Aanpassen nabij-zicht

OF

Aanpassen vertezicht

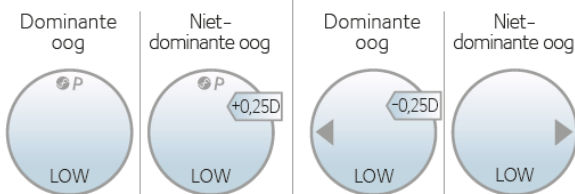

- Om nabijzicht te verbeteren, voegt u +0,25/+0,50D toe op het **niet-dominante** oog
- Om het vertezicht te verbeteren, voegt u -0,25/-0,50D toe op het **dominante** oog

Parameters Miru 1 day UpSide

Lensontwerp	Materiaal	Midafilcon A	
	Watergehalte	56%	
	Dk/t@-3,00D	$91 \times 10^{-9}(\text{cm/sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$	
	Modulus	0.36 MPa	
	Centrale dikte	0,07mm @ -3,00D	
	Handling Tint	Blauw	
	UV	Klasse 2	
	BCR	8,40mm	
Leveringsbereik	Diameter	14,2mm	
	Sterkte	Sferisch	-0,25D tot -6,00D (stappen van 0,25D) -6,50D tot -10,00D (stappen van 0,50D)
Draagschema	Verpakking	Multifocaal	+5,00D tot -6,00D (stappen van 0,25D) -6,50D tot -10,00D (stappen van 0,50D) Additie: LOW
			Dagelijks vervangen
Verpakking			30-pack - paslenzen: 5-pack

Bestelbaar via Easyfit, via onze website: www.menicon.nl, via e-mail: orders@menicon.nl of telefonisch: 0591-610 640.