

Aanpasadvies Miru 1month multifocal toric

Bepaal de doelen

Begin een gesprek met de klant om hun behoeften, levensstijl, doelen en verwachtingen te begrijpen.



Stappenplan voor een succesvolle aanpassing:

Stap 1 – Kies de lens

Begin met een nieuwe volledige refractie.
Gebruik indien nodig de Menicon Toric Calculator.

Na de refractie:

- Kies een lens met de hoogst positieve sferische sterkte voor afstand, binoculair gemeten.
- Kies de cilinder sterkte en as.
- Bepaal het dominante oog.
- Selecteer de initiële lenzen.

Stap 2 – Lenscontrole


Nadat de cliënt de lens heeft geprobeerd, voer een controle uit voor de definitieve lensbestelling

- Bespreek ervaringen uit de praktijk voor zowel dichtbij als veraf.
- Controleer de stabilisatie op basis van de markeringen.
- Voer een binoculaire over-refractie uit en bepaal de minst negatieve sterkte voor afstand.
- Controleer de kwaliteit van het nabijzicht. Indien verbetering van nabijzicht nodig is: Voeg S+0,25 toe aan het niet-dominante oog.

INITIËLE LENS keuze



NABIJ ZICHT aanpassen

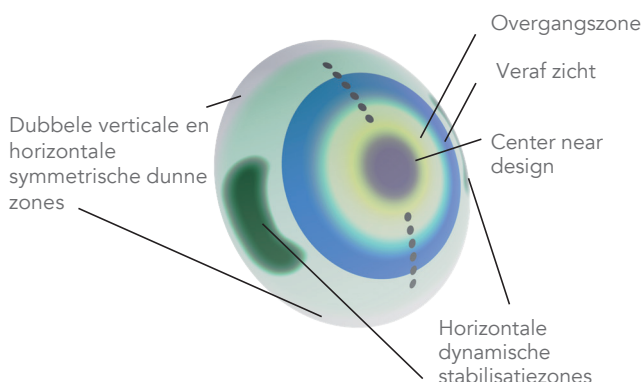

Tips voor een succesvolle aanpassing:

- Kies de maximale plussterkte die voldoet voor het vertezicht.
- Gebaseerd op een realistische situatie (bijvoorbeeld telefoon, laptop) kunnen kleine binoculaire aanpassingen worden gedaan om aan de behoefte van de patiënt te voldoen.
- Leg de invloed van licht op de pupilgrootte uit. Meer licht zal de pupil kleiner maken en het nabijzicht verbeteren bij mindere lichtomstandigheden.



Product Specificaties

Multifocaal torisch

Kenmerken

Materiaal	asmofilcon A (Silicone hydrogel)
Watergehalte	40%
Dk/t @ -3.00D	$161 \times 10^{-9} (\text{cm/sec}) \bullet (\text{mLO}_2 / (\text{mL} \times \text{mmHg}))$
Centrale dikte	0.08mm @ -3.00dpt

Parameters

Diameter	14.2mm
BCR	8.6mm
Sferisch	0.00dpt tot -10.00dpt stappen van 0,25dpt stappen van 0.50dpt 0.00 -6.00 -10.00
Cylinder, Assen	-0.75dpt, -1.25dpt 90°, 180°
Additie	LOW

Lens Markering

	
--	---

Draagtijd

	Dagelijks dragen, maandelijks vervangen
--	---

Verpakking

	Verkrijgbaar in een verpakking van 6
--	--------------------------------------



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menicon op 0591 610 640.

www.menicon.nl

