

## Productoverzicht



# Voorwoord

Een nieuwe productcatalogus. We zijn zeer trots op het eindresultaat dat ons vakmanschap en onze visie zo mooi laat zien. Hetgeen waar we elke dag met veel plezier aan werken gebundeld in een helder overzicht voor u, onze klant.

## Origami

Dat plezier is iets wat onze huisstijl zeker uitstraalt. Daarnaast symboliseert origami de essentie van vakmanschap. Subtiel, aandacht voor detail, concentratie, en creativiteit zorgen voor fantastische resultaten. Deze karakteristieken komen terug in al onze producten.

## Ambitie, plezier en creativiteit

Dagelijks zijn we bij Menicon bezig met het ontwerpen en maken van contactlenzen. Om iedereen zo comfortabel en zo scherp mogelijk te laten zien. Zicht is een van de belangrijkste zintuigen. Het versterkt de manier waarop je leeft, je plezier, je creativiteit, je ambitie. Deze waarden komen dagelijks terug in onze manier van werken. Ook de relaties met onze partners zijn op deze waarden gebouwd. Samen werken we aan nieuwe inzichten, het innoveren van onze processen en producten en aan optimale service voor onze klanten.

## Indeling catalogus

Onze producten zijn in een aantal duidelijke categorieën onder te verdelen. Onze medische lenzen, met mooie oplossingen voor een ieder die meer aandacht nodig heeft. Onze harde lenzen in vele soorten en maten, alles aanpasbaar in zeer brede ranges. Onze zachte maatwerklenzen, comfort op een zeer hoog niveau. Onze uitgebreide lijn disposables met onder andere de unieke Miru 1day Flat Pack en de Kisu Multi Toric maandlens. En onze contactlensvloeistoffen om elke lens op de beste manier te kunnen inzetten, reinigen en bewaren.

Heeft u vragen over onze producten of diensten? U kunt op werkdagen altijd contact opnemen met onze collega's. We helpen u graag.

Groet,

Bart van der Linden  
Algemeen Directeur



## Inhoud

### Orthokeratologie

|              |   |
|--------------|---|
| Nachtlenzen® | 5 |
|--------------|---|

### Medische lenzen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ROSE K2 Keratoconus (KC)      | 9  |
| ROSE K2 Nipple Conus (NC)     | 11 |
| ROSE K2 Irregular Cornea (IC) | 12 |
| ROSE K2 Post Graft (PG)       | 13 |
| ROSE K2 extra aanpasopties    | 14 |
| TimeXL mini sclera            | 15 |

### Myopie

|                      |    |
|----------------------|----|
| Menicon Bloom Day™   | 18 |
| Menicon Bloom Night™ | 19 |

### Harde lenzen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Conform®           | 21 |
| Daytime            | 23 |
| GeniuS             | 25 |
| Exact              | 27 |
| Flexi TC           | 29 |
| Torische lenzen    | 31 |
| Multifocale lenzen | 36 |
| Bifocale lenzen    | 40 |
| Materialen         | 41 |

### Zachte maatwerklenzen

|                   |    |
|-------------------|----|
| Individual        | 45 |
| 3month Individual | 48 |
| Vintage           | 50 |

### Disposables

|                     |    |
|---------------------|----|
| Miru 1month         | 54 |
| Miru 1day Flat Pack | 57 |
| Miru 1day UpSide    | 59 |
| PremiO              | 61 |
| Kisu                | 63 |

### Lenzenvloeistoffen

#### Zachte lenzen vloeistof


|                |    |
|----------------|----|
| Solocare Aqua® | 66 |
| Mycare         | 66 |

#### Harde lenzen vloeistof

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Menicare Pure                  | 67 |
| Menicare Plus                  | 67 |
| Progent                        | 67 |
| Spray&Clean                    | 68 |
| Nachtlenzen® Onderhoud         | 68 |
| Menicon Bloom Night™ Onderhoud | 69 |

#### Harde en zachte lenzen vloeistof


|            |    |
|------------|----|
| PLATINCARE | 69 |
|------------|----|

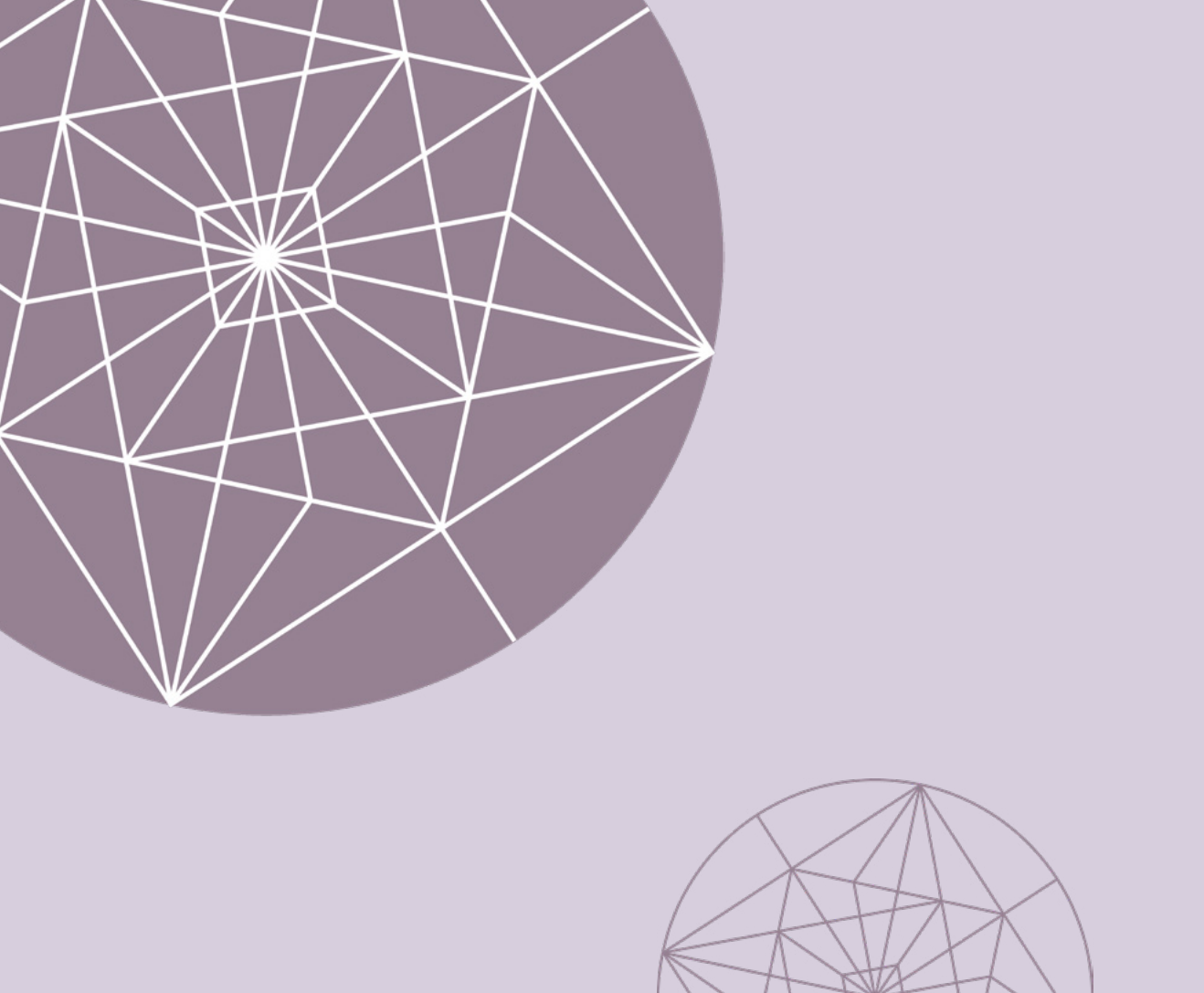

## Orthokeratologie

Onze Nachtlenzen zijn ontworpen op basis van orthokeratologie techniek. Op het gebied van zichtoplossingen middels ortho-K bieden we u twee opties; de Nachtlens 2 en de Nachtlens PRO (beide verkrijgbaar als sferisch en torisch design). Dragers van onze ortho-K lenzen zijn zeer tevreden met hun zichtoplossing. Vooral de vrijheid overdag geen bril of lenzen te hoeven dragen wordt als zeer positief ervaren.

Met deze bewezen veilige manier van myopie correctie heeft u als specialist een onderscheidend product in handen dat nog altijd in bekendheid toeneemt onder consumenten. Voor myopie controle verwijzen we graag naar Menicon Bloom Night en Menicon Bloom Day in de brochure "Medische lenzen".

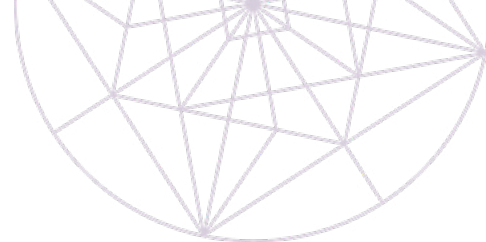

# Nachtlenzen®


|                               | Sferisch                                                                                     |                                                                       | Torisch                                                                                      |                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               | Nachtlens 2                                                                                  | Nachtlens PRO                                                         | Nachtlens 2 Toric                                                                            | Nachtlens PRO Toric                                                   |
| <b>Leveringsbereik</b>        |                                                                                              |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |
| <b>BCR</b>                    | 7,50 mm t/m 10,00 mm, stappen van 0,05 mm                                                    |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |
| <b>Diameter</b>               | 10,20 mm, 10,60 mm, 11,00 mm                                                                 |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |
| <b>Tangent</b>                | 50° t/m 65°                                                                                  | 25° t/m 44°                                                           | 46° t/m 63°                                                                                  | 25° t/m 44°                                                           |
| <b>Hoogte</b>                 | 0,50 mm – 0,99 mm, stappen van 0,01 mm                                                       | 0,95 mm – 1,45 mm, stappen van 0,01 mm                                | 0,50 mm – 0,99 mm, stappen van 0,01 mm                                                       | 0,95 mm – 1,45 mm, stappen van 0,01 mm                                |
| <b>Geschikt voor sterktes</b> | S -0,75 dpt t/m S -4,00 dpt C tot -1,50 dpt volgens de regel en tot -0,50 dpt tegen de regel | S -0,75 dpt t/m S -5,50 dpt C t/m -2,50 dpt volgens en tegen de regel | S -0,75 dpt t/m S -4,00 dpt C tot -2,50 dpt volgens de regel en tot -1,50 dpt tegen de regel | S -0,75 dpt t/m S -5,50 dpt C t/m -2,50 dpt volgens en tegen de regel |
| <b>Eigenschappen</b>          |                                                                                              |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |
| <b>Materiaal</b>              | Menicon Z                                                                                    |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |
| <b>Handlingtint</b>           | R: rood / L: blauw                                                                           |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |
| <b>Fenestraties</b>           | 3 in de reversezone                                                                          |                                                                       |                                                                                              |                                                                       |

## Voordelen

- Zeer comfortabele manier van lenzen dragen
- Hele dag scherp zien zonder bril of lenzen
- Onderscheidend product
- Hoge klanttevredenheid

## Lensontwerp


Nachtlenzen zijn reverse-geometrie contactlenzen. De lens heeft een correctiezone in het centrum en een tangentiële zone in de periferie. Deze twee zones worden verbonden door een reversezone.

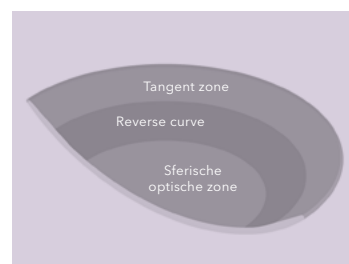


Lensontwerp Nachtlenzen

De torische designs zijn geschikt voor ogen met een hogere corneacilinder. Dit resulteert in twee tangenten en twee hoogtes. Bij de Nachtlens 2 Toric is alleen de periferie torisch. Bij de Nachtlens PRO Toric zijn zowel de periferie als de rand torisch. De correctiezone blijft in beide designs sferisch, net als bij de Nachtlens 2 en de Nachtlens PRO. De Easyfit aanpassoftware berekent welke variant (sferisch of torisch) het meest geschikt is voor het oog.

De speciale vorm van de ortho-k lens met een vlakker centraal gedeelte en een steilere mid-periferie (reverse-geometrie) zorgt voor een gecontroleerde verdeling van krachten via de traanfilm tussen lens en cornea. Deze hydrodynamische werking resulteert in een lichte druk op het centrale deel van het hoornvlies en een negatieve druk in de mid-perifere zone. Hierdoor ontstaat een geleidelijke herverdeling van vloeistof tussen de epitheelcellen via natuurlijke verbindingen (gap junctions). Het effect is een tijdelijke afvlakking van het centrale hoornvliesoppervlak.

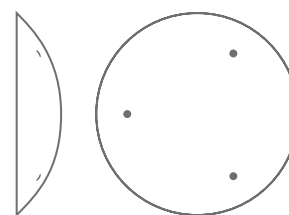

Er zitten drie fenestraties in de reversezone van een Nachtlens

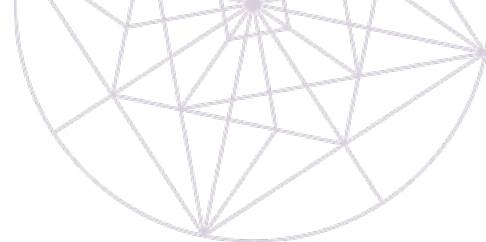

Belangrijk is dat alleen de bovenste cellagen van het cornea-epitheel van vorm veranderen, zonder dat er verlies of schade optreedt aan het weefsel, zelfs niet bij langdurig gebruik. Ter bevordering van de traandoorspoeling en om ervoor te zorgen dat de lens niet vast gaat zitten op de cornea, hebben Nachtlenzen drie gaatjes (fenestraties) in de reversezone.

## Aanpassing

Nachtlenzen kunnen eenvoudig met behulp van een corneatopograaf en Easyfit worden aangepast. Easyfit berekent de juiste Nachtlens op basis van de geïmporteerde topografiebeelden en de ingevoerde subjectieve refractie. Voor het aanpassen van Nachtlens PRO is het noodzakelijk meerdere topografiebeelden per oog in te laden om de nauwkeurigheid van de berekening te vergroten. Ook een goed gemeten en ingevulde corneadiameter is zeer belangrijk voor het berekenen van de juiste Nachtlens.

**Let op!** Voor nieuwe dragers raden wij de Nachtlens PRO aan als eerste keuze in ortho-K. De winst zit voornamelijk in het aanmeetproces. Bestaande dragers kunnen de Nachtlens 2 blijven dragen.


## Controles eerste jaar

Bij alle controles komt de cliënt zonder de lenzen in.

- 1e controle** De eerste controle is de volgende ochtend. De controle moet voor 12:00 uur plaatsvinden. Tijdens de controle moet de cornea gecontroleerd worden met een spleetlamp.
- 2e controle** De tweede controle is na een week. Bij voorkeur dient de controle binnen 2 uur nadat de lenzen zijn uitgethaald uiterlijk plaats te vinden, uiterlijk voor 12.00 uur. De visus moet worden bepaald zonder lenzen en de ametropie moet ongeveer 70% zijn gecorrigeerd. Aan de lenzen hoeft nog niets te worden veranderd.
- 3e controle** Na drie weken is de derde controle. Ook deze controle moet voor 12:00 uur plaatsvinden. Tijdens deze controle moet de topometrie gemeten worden en de visus worden bepaald zonder de lenzen. De ametropie moet nu volledig gecorrigeerd zijn. Indien nodig, het recept van de lens veranderen.
- 4e controle** Uiteindelijk komt de klant elk half jaar terug voor een controle. Elk half jaar moeten de topometrie en refractie worden uitgevoerd en moet de visus de hele dag normaal zijn. Het is noodzakelijk de lenzen ieder jaar te vervangen.

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

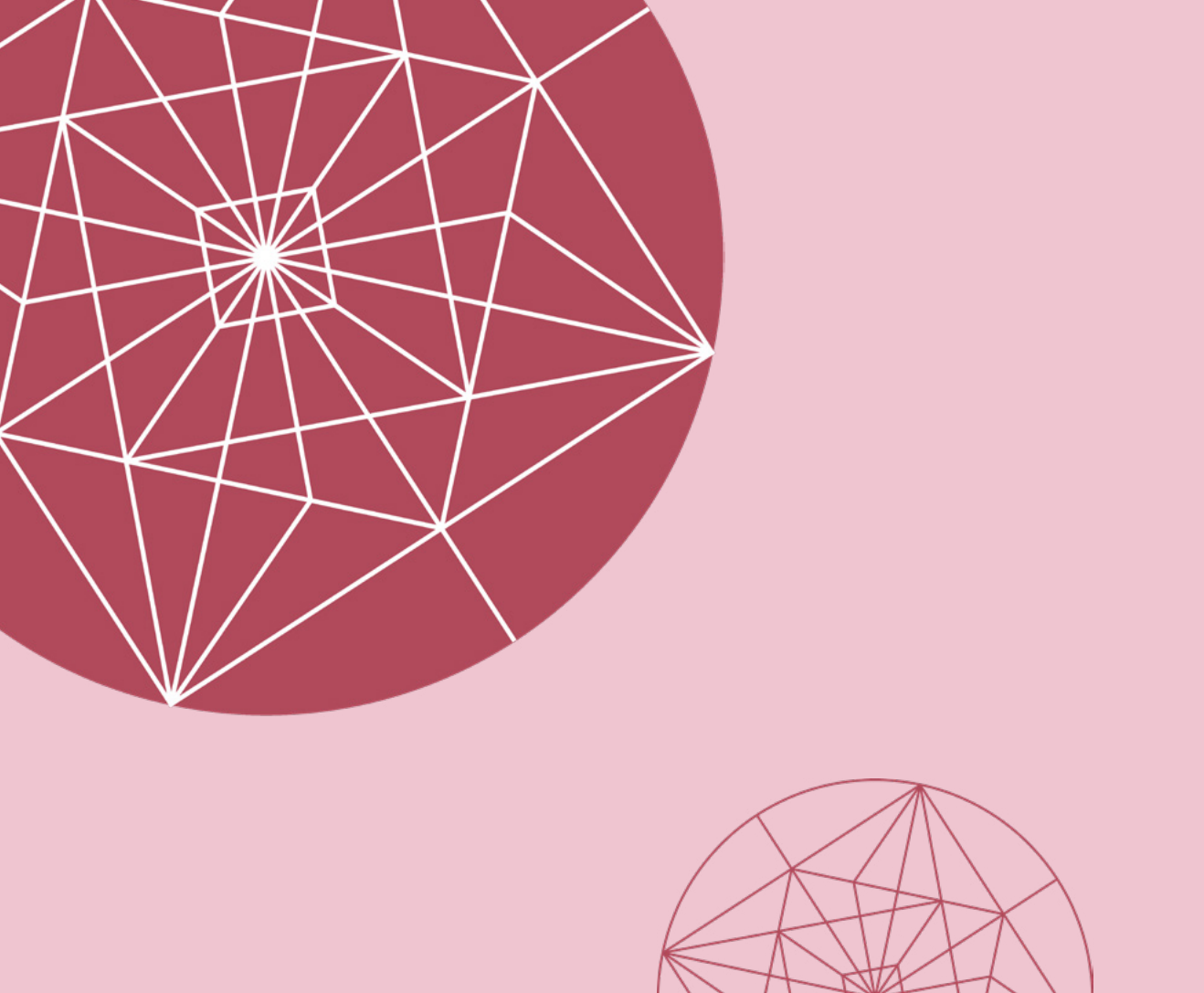


## Medische lenzen

Voor verschillende medische toepassingen zijn contactlenzen beschikbaar. Op deze manier bieden we patiënten met bijvoorbeeld keratoconus of een irregulaire cornea een comfortabele en effectieve zichtoplossing.

- ROSE K2 Keratoconus (KC)
- ROSE K2 Nipple Conus (NC)
- ROSE K2 Irregular Cornea (IC)
- ROSE K2 Post Graft (PG)
- TimeXL mini sclera




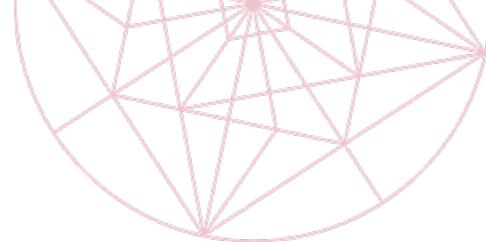

## ROSE K



Het ROSE K programma is specifiek ontwikkeld voor de irregulaire cornea. Een veel voorkomende irregulariteit is een keratoconus. Keratoconus onderscheidt zich in verschillende posities, groottes en vormen. In het ROSE K programma is voor elk daarvan een speciale lens ontworpen. Daarnaast biedt ROSE K een specifieke lens om de gelaserde cornea te corrigeren.

De lenzen zijn makkelijk aan te meten en geven een duidelijke comfort- en visusverbetering. Mede daarom is de ROSE K2 de meest aangemeten keratoconuslens ter wereld.

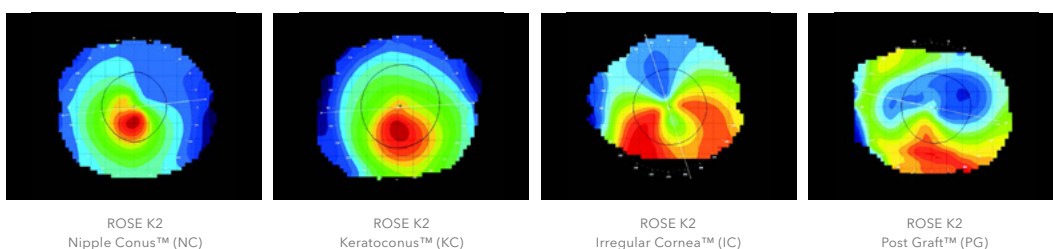


## Voordelen

- Makkelijke aanpas
- Keuze uit meerdere lensontwerpen
- Comfortverhoging voor keratoconus patiënten
- Keuze uit variabele periferie
- Sferische aberratie-controle

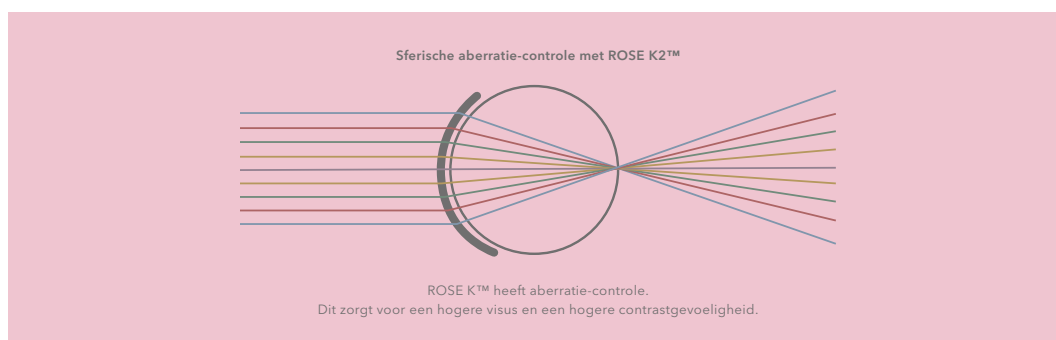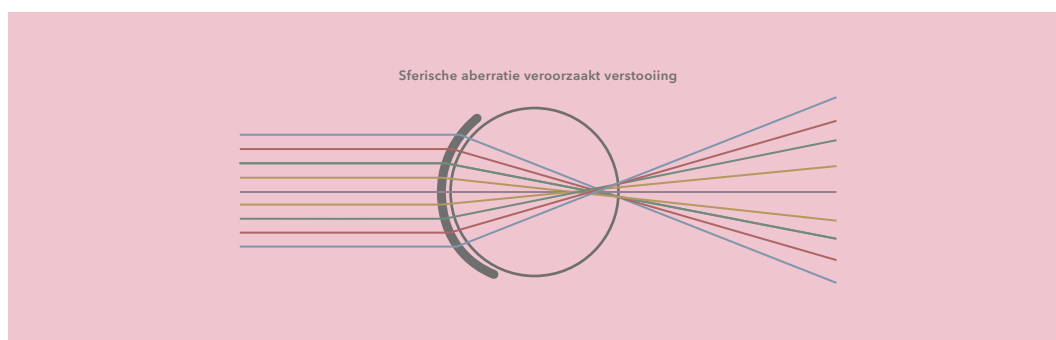



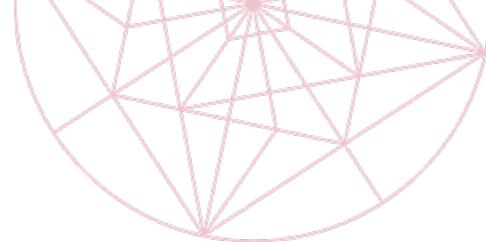


## ROSE K2 Keratoconus (KC)

ROSE K2 Keratoconus (KC)

| Leveringsbereik |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| BCR             | 4,30 mm t/m 8,55 mm, stappen van 0,05 mm            |
| Diameter        | 7,90 mm t/m 10,40 mm, stappen van 0,10 mm           |
| Sterkte         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |
| Edge lift       | standard / increased / decreased                    |
| Eigenschappen   |                                                     |
| Materiaal       | Menicon Z, Menicon EX                               |

### Lensontwerp

Typisch bij keratoconus zijn de verschillende stadia waarin deze zich kan uiten. In het lensontwerp is hier rekening mee gehouden. De optische zone is asferisch en wordt kleiner wanneer de BCR steiler is. Bij een beginnende keratoconus is vaak alleen centraal de radius steiler en is de periferie normaal. Bij een vergevorderde keratoconus wordt de centrale radius steiler en is een vlakke periferie nodig.

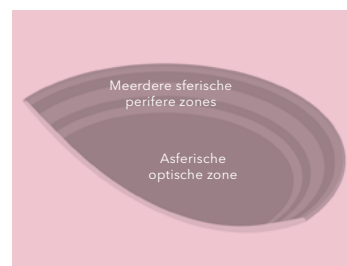


Lensontwerp  
ROSE K2  
Keratoconus (KC)


Eerste keuze bij:

- Oval keratoconus


Alternatief bij Pellucid Marginal Degeneratie (PMD). Geschikt voor piggy back.

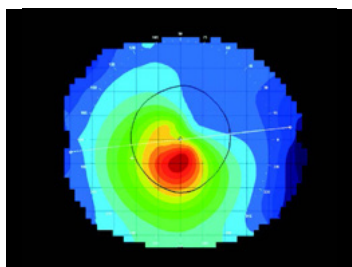

Nipple conus

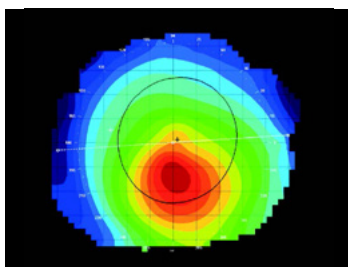

Oval conus

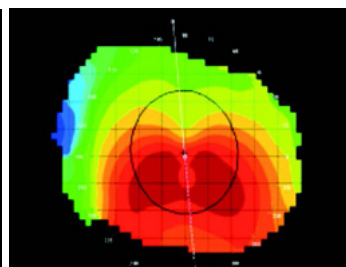


Vroege pellucid marginal degeneratie

### Aanpassing

Het aanpassen van een keratoconuslens is het makkelijkst met een corneatopograaf en Easyfit. Easyfit berekent de beste paslens en creëert een bestelling inclusief 3 alternatieve paslensen waarvan 2 dieper en 1 vlakker ten opzichte van de berekende paslens. Deze lenzen zijn vervolgens via Easyfit direct te bestellen.




Voorbeeld van een goede lenspassing bij een keratoconus

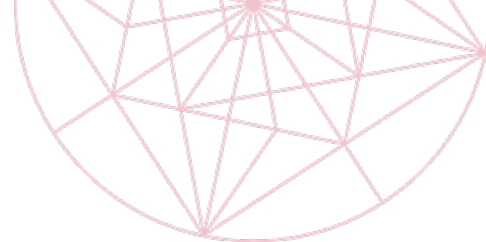

Beschikt u niet over een corneatopograaf dan bestelt u vier paslenzen en hanteert u voor de eerste paslenskeuze de volgende aanpasregel:

- Bij K gemiddeld  $>7,00$  mm  $\Rightarrow$  BCR = K gemiddeld - 0,20 mm
- Bij K gemiddeld tussen 6,00 en 7,00  $\Rightarrow$  BCR = K gemiddeld
- Bij K gemiddeld  $<6,00$  mm  $\Rightarrow$  BCR = K gemiddeld + 0,40 mm

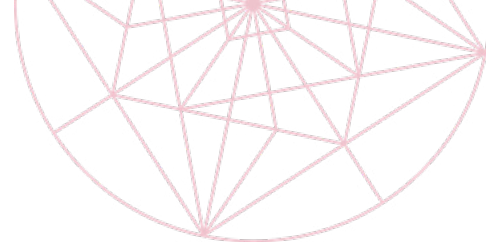

## ROSE K2 Nipple Conus (NC)

ROSE K2 Nipple Conus (NC)


| Leveringsbereik |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| BCR             | 4,30 mm t/m 7,70 mm, stappen van 0,05 mm            |
| Diameter        | 7,60 mm t/m 9,00 mm, stappen van 0,10 mm            |
| Sterkte         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |
| Edge lift       | standard / increased / decreased                    |
| Eigenschappen   |                                                     |
| Materiaal       | Menicon Z, Menicon EX                               |

### Lensontwerp

Dit lensontwerp is geschikt voor een steile, kleine nipple keratoconus met een hoge afvlakking. De kleine asferische optische zone in de lens past nauwkeurig bij de nipple vorm van de cornea. Kenmerkend is de snelle perifere afvlakking om de optische zone heen. Deze lens is een optie om als piggy back toe te passen.

Eerste keuze bij:

- Nipple keratoconus

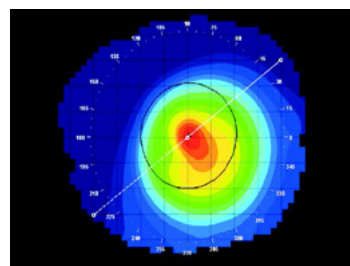


Nipple conus


### Aanpassing

Het aanpassen van een keratoconuslens is het makkelijkst met een corneatopograaf en Easyfit. Easyfit berekent de beste paslens en creëert een bestelling inclusief 3 alternatieve paslenzen waarvan 2 dieper en 1 vlakker ten opzichte van de berekende paslens. Deze lenzen zijn vervolgens via Easyfit direct te bestellen. Beschikt u niet over een corneatopograaf dan bestelt u vier paslenzen en hanteert u voor de eerste paslenskeuze de volgende aanpasregel:

- Bij K gemiddeld >6,00 mm => BCR = K gemiddeld - 0,20 mm
- Bij K gemiddeld tussen 5,00 en 6,00 => BCR = K gemiddeld
- Bij K gemiddeld <5,00 mm => BCR = K gemiddeld + 0,30 mm

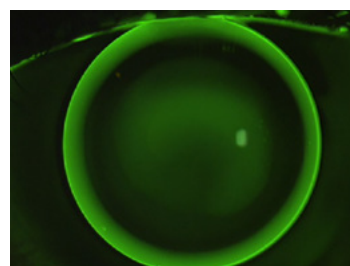

Voorbeeld van een goede lenspassing bij een keratoconus

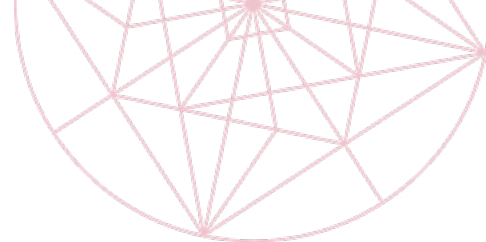

## ROSE K2 Irregular Cornea (IC)

ROSE K2 Irregular Cornea (IC)

| Leveringsbereik |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| BCR             | 5,70 mm t/m 9,30 mm, stappen van 0,05 mm            |
| Diameter        | 9,40 mm t/m 12,00 mm, stappen van 0,10 mm           |
| Sterkte         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |
| Edge lift       | standard / (double) increased / (double) decreased  |
| Eigenschappen   |                                                     |
| Materiaal       | Menicon Z, Menicon EX                               |


## Lensontwerp

Deze lens met een grote diameter is specifiek ontworpen om centrale onregelmatigheden op de cornea te overbruggen. De lens beschikt over een grote optische zone.


Eerste keuze bij:

- Pellucid marginal degeneratie (PMD)
- Keratoglobus


Alternatief bij grotere oval keratoconus.

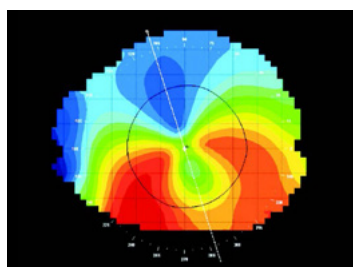

Pellucid marginal degeneratie

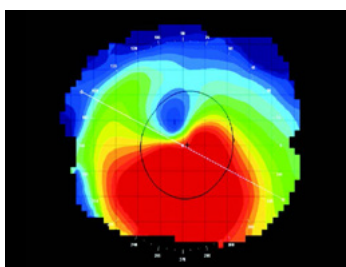

Keratoglobus

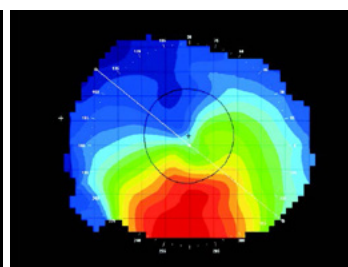


Grotere oval conus

## Aanpassing


Het aanpassen van een keratoconuslens is het makkelijkst met een corneatopograaf en Easyfit. Easyfit berekent de beste paslens en creëert een bestelling inclusief 3 alternatieve paslensen waarvan 2 dieper en 1 vlakker ten opzichte van de berekende paslens. Deze lenzen zijn vervolgens via Easyfit direct te bestellen. Beschikt u niet over een corneatopograaf dan bestelt u vier paslensen en hanteert u voor de eerste paslenskeuze de volgende aanpasregel:

- $BCR = K \text{ steil} + 0,30 \text{ mm}$

De paslensen hebben een diameter van 11,20 mm.

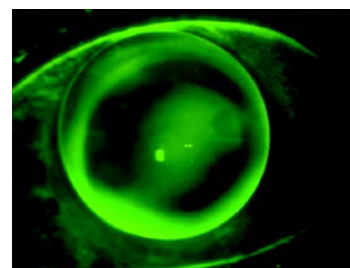

Voorbeeld van een goede lenspassing bij een PMD

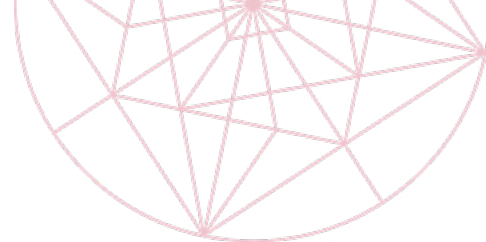

## ROSE K2 Post Graft (PG)

ROSE K2 Post Graft (PG)

| Leveringsbereik |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| BCR             | 5,70 mm t/m 9,30 mm, stappen van 0,05 mm            |
| Diameter        | 9,40 mm t/m 12,00 mm, stappen van 0,10 mm           |
| Sterkte         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |
| Edge lift       | standard / (double) increased / (double) decreased  |
| Eigenschappen   |                                                     |
| Materiaal       | Menicon Z, Menicon EX                               |

## Lenzontwerp


De ROSE K2 Post Graft heeft een grote diameter om met de periferie een goede centratie te creëren. Centraal zal de lens parallel zijn tot een lichte touch. De lens beschikt over een grote optische zone.

Eerste keuze na:


- laseroperatie
- keratoplastiekoperatie

Alternatief bij:


- Oval keratoconus
- Nipple keratoconus

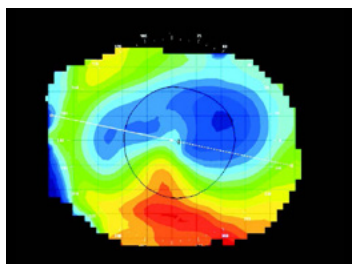

lasik induced ectasia

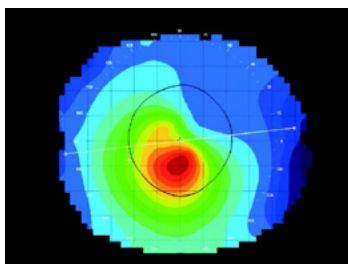

nipple conus

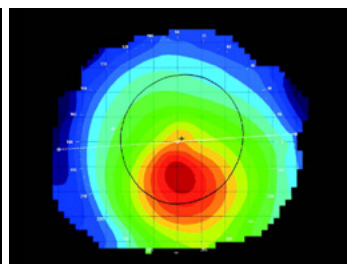


oval conus

## Aanpassing


Het aanpassen van een keratoconuslens is het makkelijkst met een corneatopograaf en Easyfit. Easyfit berekent de beste paslens en creëert een bestelling inclusief 3 alternatieve paslensen waarvan 2 dieper en 1 vlakker ten opzichte van de berekende paslens. Deze lenzen zijn vervolgens via Easyfit direct te bestellen. Beschikt u niet over een corneatopograaf dan bestelt u vier paslensen en hanteert u voor de eerste paslenskeuze de volgende aanpasregel:

- $BCR = K \text{ gemiddeld} - 0,30 \text{ mm}$

De paslensen hebben een diameter van 10,40 mm.

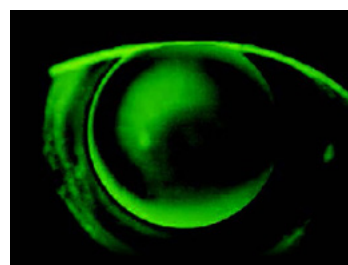

Voorbeeld van een goede lenspassing bij een PMD

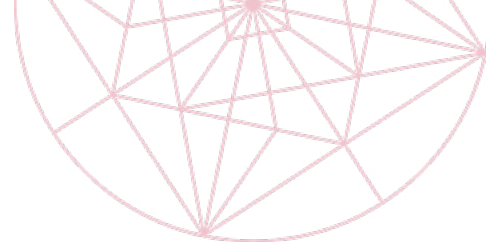


## ROSE K2 extra aanpasopties

Bij ROSE K2 aanpassingen volstaat in de meeste gevallen het standaard ontwerp. Indien de standaarduitvoering een ontoereikende passing geeft zijn er een aantal mogelijkheden om de periferie te wijzigen. Wilt u iets veranderen, overleg dan gerust met onze afdeling Professional Services.

### Variabele edge lift

Bij een sterk afwijkende periferie kunt u kiezen om deze te vergroten of te verkleinen.

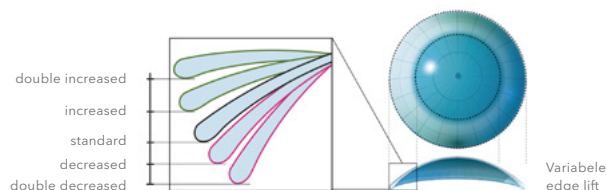

### Torische periferie

Bestel alleen een torische periferie bij een sterk torisch fluobeeld. Standaard wordt de periferie dan 0,80 mm steiler gemaakt.




### Asymetric Corneal Technology (ACT)

Een keratoconus cornea loopt in de meeste gevallen inferior steiler weg. Indien de cornea inferior extreem veel steiler wordt, kunt u kiezen voor ACT.



### Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

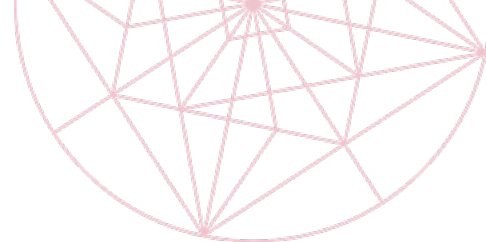

## TimeXL mini sclera

TimeXL mini sclera

| Leveringsbereik                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BCR                                    | 7,40 mm t/m 9,20 mm, stappen van 0,20 mm                        |
| Diameter                               | 14,0 mm t/m 17,5 mm, stappen van 0,50 mm                        |
| Sterkte                                | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt             |
| Additie                                | +1,00 t/m +3,50 D in stappen van 0,50 D                         |
| Cilindersterkte                        | -0,75 dpt t/m -3,00 dpt, stappen van 0,25 dpt en stappen van 1° |
| Sagittahoogte                          | 3000 µm t/m 4600 µm, stappen van 100 µm                         |
| Tangent met vlakke en steile meridiaan | 28-56 / 30-60 in stappen van 2°                                 |
| Eigenschappen                          |                                                                 |
| Materiaal                              | Menicon Z                                                       |
| Handlingint                            | Geen                                                            |
| Extra opties                           | Aberratiecontrole (AC) en Limbal Clearance Factor (LCF)         |


Bij de TimeXL zijn twee belangrijke innovaties gecombineerd voor maximaal comfort en optimale lensprestaties. De periferie is namelijk linear en torisch uitgevoerd (bi-tangentieel). Door deze periferie en de grote lensdiameter kan de cornea volledig overbrugd worden met een optimale drukverdeling op de sclera. De TimeXL biedt hiermee een oplossing voor de gevorderde irregulaire cornea en bij chronisch droge ogen.

## Voordelen


- Zeer comfortabel door bi-tangentieel ontwerp met optimale drukverdeling
- Goede centratie
- Lange dagelijkse draagtijden haalbaar
- Optimale overbrugging van cornea en limbus
- Makkelijke paslenskeuze met behulp van Easyfit
- Ook verkrijgbaar als multifocaal (standaard inclusief AC)

## Lensontwerp

Gevorderde irregulaire cornea's vertonen forse hoogteverschillen. Time XL biedt hiervoor de ideale oplossing. Door het hoge draagcomfort is de TimeXL ook geschikt voor diegenen die corneale vormstabiele lenzen niet goed kunnen verdragen. De TimeXL biedt bescherming van de cornea en is daarom zeer geschikt voor toepassing bij chronisch droge ogen.

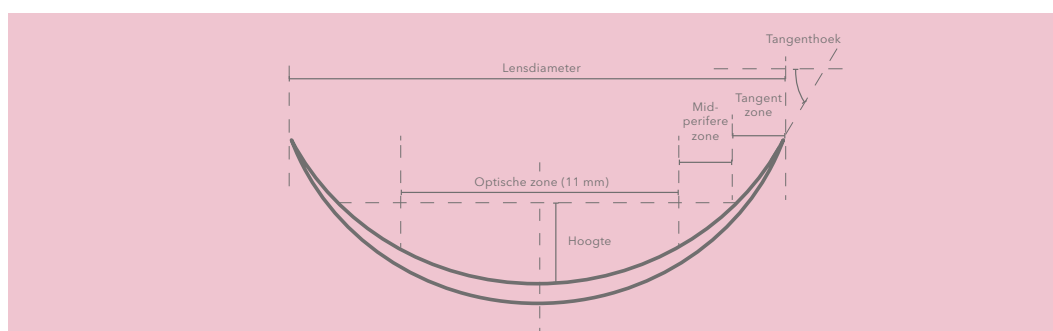



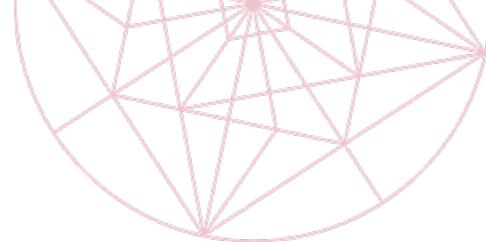

## Multifocaal

Time XL lenzen zijn verkrijgbaar als multifocale variant. Het profiel is vergelijkbaar met het Oblong ontwerp, maar is speciaal aangepast voor het Time XL design. Dit center distance profiel is verkrijgbaar van additie +1,00 D t/m +3,50 D.

## Aanpassing

U kunt op twee manieren een eerste paslens kiezen:

1. Gebruik Easyfit om de eerste paslens te bepalen
2. Kies een lens op basis van ervaring

### 1. Gebruik Easyfit om de eerste paslens te bepalen


Om de paslens te bepalen importeert u de topografiebeelden naar Easyfit. Het programma gebruikt de corneale topografie-metingen om de sclerale hoogte te schatten. Aan de hand daarvan worden de sagittale hoogte en tangenten geadviseerd.



TimeXL clearance

### 2. Kies een lens op basis van ervaring

De meest voorkomende sagittahoogte van de TimeXL is 3600  $\mu\text{m}$ . Net als bij andere sclerale lenzen varieert de gewenste sagittahoogte per oog. Een patiënt met keratoconus kan een dieper corneaprofiel hebben en een grotere verhoging van de sagittahoogte vereisen in vergelijking met een normaal oog. Voor een patiënt die een corneatransplantatie of een refractieoperatie heeft ondergaan, kan een lagere hoogte zijn vereist. Het cornea-scleraal profiel kan met een visuele inspectie worden beoordeeld.

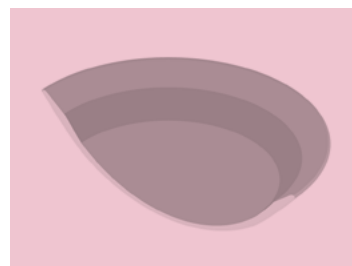

Lensontwerp Time XL

Een optimaal passende sclerale lens heeft na 30 minuten dragen de volgende kenmerken:

- De druk is gelijkmatig verdeeld, er is hierdoor geen blanching zichtbaar
- Er is een centrale corneale clearance van circa 200  $\mu\text{m}$
- Er is een limbale clearance van circa 100  $\mu\text{m}$ , met een minimum van 50  $\mu\text{m}$

## Reiniging en onderhoud


Gebruik voor het vullen van de lens ongeconserveerde zoutoplossing in ampullenvorm. Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijks reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.



## Myopie Management

Voor verschillende medische toepassingen zijn contactlenzen beschikbaar. Met ons Menicon Bloom behandelplan bieden we een manier om de groei van myopie bij kinderen af te remmen.

- Menicon Bloom Day™
- Menicon Bloom Night™

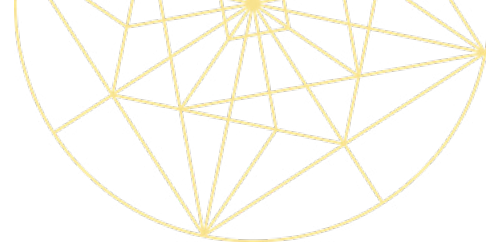

# Menicon Bloom Day™

Menicon Bloom Day™

| Leveringsbereik |                              |
|-----------------|------------------------------|
| BCR             | 8,30 mm                      |
| Diameter        | 14,50 mm                     |
| Sterkte         | S -0,25 dpt tot S -10,00 dpt |
| Eigenschappen   |                              |
| Materiaal       | Etafilcon A                  |
| Watergehalte    | 58%                          |
| UV-klasse       | 2                            |

## Voordelen

- Zachte daglenzen voor myopie controle mét CE-keurmerk in Europa
- Myopiecontrole en myopiecorrectie gecombineerd
- Lenzen aanpassen en monitoring van de ontwikkeling via geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke Easyfit module
- Goed contact met de patiënt en monitoring van de klantervaring en het zicht via de Menicon Bloom app en Easyfit
- Duidelijke afspraken tussen specialist en patiënt middels een informed consent
- Zeer hygiënisch, elke dag een nieuwe set lenzen

## Lensontwerp

Het lensontwerp heeft veel weg van een multifocaal profiel. Uit onderzoek blijkt dat deze sterkteopbouw zeer effectief is als het gaat om remmen van myopie. Het onverstoorde sterkteverloop in de lens zorgt voor een rustig beeld. Over het algemeen wennen patiënten snel aan de hogere sterkte in de periferie.

## Aanpassing


Aanpassing verloopt eenvoudig via Easyfit. Let op: het advies van Easyfit zal vaak 0,25 dpt hoger uitkomen dan verwacht. Dit wordt door Easyfit aan de hand van het lensdesign berekend en is dus correct.

Belangrijk aandachtspunt: Voer de lenscontrole pas uit na minimaal 15 minuten. Die tijd heeft de patiënt nodig om gewend te raken aan het vertezicht.

Verder is het belangrijk om bij de lenscontrole geen overrefractie toe te passen. Controleer nauwkeurig de visus zonder gebruikmaking van een phoropter, pasbril of flippers. Bij een niet acceptabele visus kunnen paslenzen van -0,25 dpt hoger uitkomst bieden. Meer informatie over het aanpassen van deze lens vindt u in de uitgebreide Menicon Bloom e-learning.

## Reiniging en onderhoud

Het is belangrijk de daglenzen elke dag te vervangen, verder onderhoud is niet noodzakelijk.

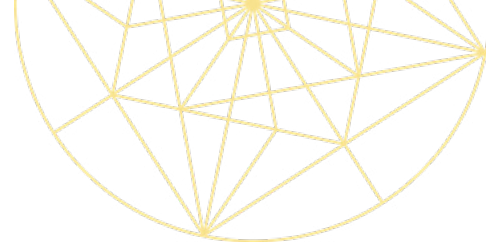

# Menicon Bloom Night™


|                               | Sferisch<br>Menicon Bloom Night™                                                                   | Torisch<br>Menicon Bloom Night™ Toric                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b>        |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>BCR</b>                    | 7,50 mm t/m 10,00 mm, stappen van 0,05 mm                                                          |                                                                                                    |
| <b>Diameter</b>               | 10,20 mm, 10,60 mm, 11,00 mm                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Tangent</b>                | 50° t/m 65°                                                                                        | 46° t/m 63°                                                                                        |
| <b>Hoogte</b>                 | 0,50 mm - 0,99 mm, stappen van 0,01 mm                                                             |                                                                                                    |
| <b>Geschikt voor sterktes</b> | S -0,75 dpt t/m S -4,00 dpt<br>C tot -1,50 dpt volgens de regel en<br>tot -0,50 dpt tegen de regel | S -0,75 dpt t/m S -4,00 dpt<br>C tot -2,50 dpt volgens de regel en<br>tot -1,50 dpt tegen de regel |
| <b>Eigenschappen</b>          |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Materiaal</b>              | Menicon Z                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>Handlingtint</b>           | R: rood / L: blauw                                                                                 |                                                                                                    |
| <b>Fenestraties</b>           | 3 in de reversezone                                                                                |                                                                                                    |

## Voordelen

- De eerste ortho-k lens voor myopie controle mét CE-keurmerk in Europa
- Myopie controle en myopie correctie gecombineerd
- Lenzen aanpassen en monitoring van de ontwikkeling via geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke Easyfit module
- Goed contact met de patiënt en monitoring van de klantervaring en het zicht via de Menicon Bloom app en Easyfit
- Duidelijke afspraken tussen specialist en patiënt middels een informed consent
- Iedere zes maanden nieuwe lenzen om de veiligheid en effectiviteit te waarborgen


## Lensontwerp

Menicon Bloom Night is een lens die wordt gebruikt binnen het Menicon Bloom behandelplan. Er wordt gebruik gemaakt van orthokeratologie om de toename van myopie te remmen. Daarnaast ziet de lensdrager overdag scherp zonder bril of lenzen. De lens heeft een correctiezone in het centrum en een tangentiële zone in de periferie. Deze twee zones worden verbonden door een reversezone.

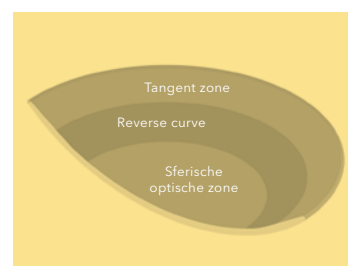

Lensontwerp  
Menicon Bloom  
Night™

Menicon Bloom Night Toric is ontworpen voor kinderen met een hogere cornea-cilinder. De lens heeft twee tangenten en hoogtes, het basisontwerp van de lens is gebaseerd op dat van Menicon Bloom Night.

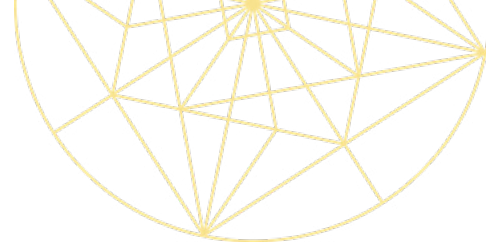

## Aanpassing

Menicon Bloom Night valt binnen het Menicon Bloom behandelplan en kan ook alleen in combinatie met het volledige behandelplan worden gekozen als oplossing voor myopie controle. De lens is met behulp van een corneatopograaf en Easyfit eenvoudig aan te passen. Menicon Bloom Night kan toegepast worden bij een corneacilinder tot -1,50 volgens de regel, tot -0,50 tegen de regel en Menicon Bloom Night Toric tot -2,50 volgens de regel, -1,50 tegen de regel. Easyfit berekent de lens op basis van de geïmporteerde topografiebeelden en de ingevoerde subjectieve refractie. Ook belangrijk bij het berekenen van de juiste lens is een goed ingevulde corneadiameter.

Meer informatie over het aanpassen van deze lens vindt u in de uitgebreide Menicon Bloom e-learning.


## Reiniging en onderhoud

Voor de perfecte verzorging van de lenzen is er het Menicon Bloom Night Onderhoudspakket. Dit pakket bevat Menicon Bloom Care voor de dagelijkse verzorging en Menicon Bloom Progent als maandelijks reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.




## Harde lenzen

Met de diversiteit binnen ons harde lenzenassortiment is er altijd een passend lensdesign beschikbaar. Elk ontwerp kent zijn eigen specifieke voordelen. De nieuwste lensdesigns zijn ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en laten zich eenvoudig aanpassen dankzij onze aanpassoftware Easyfit. Bovendien verloopt de gewenning soepeler en is het draagcomfort bij deze moderne ontwerpen aanzienlijk verbeterd.

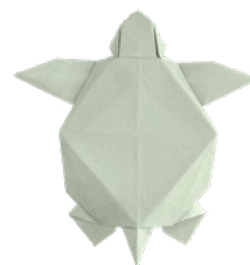

Harde lenzen worden op maat gemaakt en zijn geschikt voor een zeer breed spectrum van ogen. Dit brede aanpasbereik en de uitstekende visuele eigenschappen maken harde lenzen voor veel lensdragers een zeer fijne zichtoplossing.

|          | Sferisch | Torisch<br>Bi-torisch | Torisch<br>Front torisch | Multifocaal | Torisch<br>Multifocaal | Bifocaal |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Conform® | •        | •                     | -                        | •           | •                      | -        |
| Daytime  | •        | •                     | -                        | •           | •                      | -        |
| Genius   | •        | •                     | •                        | •           | •                      | •        |
| Exact    | •        | •                     | •                        | •           | •                      | •        |
| Flexi TC | •        | •                     | •                        | -           | -                      | •        |

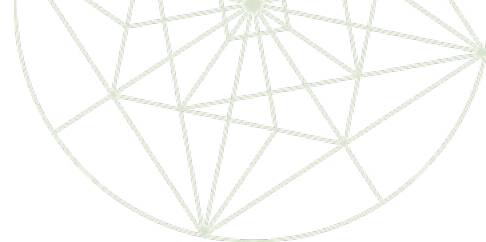

# Conform®

| Sferisch<br>Conform® | Torisch<br>Conform® 360 | Multifocaal<br>Conform® Oblong<br>Conform® Oblong Forte | Torisch Multifocaal<br>Conform® 360 Oblong<br>Conform® 360 Oblong Forte |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Leveringsbereik |                                                     |                                                             |                                                   |                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Diameter        | 9,80 mm t/m 11,00 mm, stappen van 0,40 mm           |                                                             |                                                   |                                                             |
| Sterkte         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |                                                             |                                                   |                                                             |
| Additie         |                                                     |                                                             | S +1,00 dpt t/m S +3,50 dpt, stappen van 0,50 dpt |                                                             |
| Cilinder        |                                                     | C -0,50 dpt t/m<br>C -10,00 dpt,<br>stappen van<br>0,25 dpt |                                                   | C -0,50 dpt t/m<br>C -10,00 dpt,<br>stappen van<br>0,25 dpt |
| As              |                                                     | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                              |                                                   | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                              |
| Eigenschappen   |                                                     |                                                             |                                                   |                                                             |
| Materiaal       | Menicon Z, Menicon EX, Optimum Comfort, Futura      |                                                             |                                                   |                                                             |


## Voordelen

- Hoog draagcomfort door een optimale pasvorm
- Centrale cornea wordt volledig gerespecteerd
- De perifere en centrale zones worden afzonderlijk van elkaar berekend
- Zeer hoge visus
- Goede centratie
- Geen 'spectacle blur'

## Lensontwerp

Conform heeft twee varianten: Conform (rotatiesymmetrisch) en Conform 360 (niet-rotatiesymmetrisch). Conform is een lens die wordt aangemeten op basis van hoogte en tangent van de perifere cornea. Voor de Conform komt dat neer op één hoogte en één tangent, bij de Conform 360 zijn meerdere hoogtes en tangenten nodig om de optimale pasvorm op de cornea te verkrijgen.


De Conform bestaat uit een perifere tangentzone en een sferische optische zone. Deze twee zones worden met elkaar verbonden door een traanreservoirzone (ook wel overgangszone genoemd). Deze zone zorgt voor een betere traanvochtdoorstroming en vormt tevens een duidelijke grens tussen de tangentzone en de optische zone, wat duidelijk herkenbaar is in het fluobeeld.

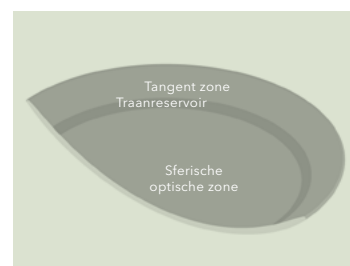


Lensontwerp  
Conform®

Door berekeningen aan de hand van topograafmetingen is precies te bepalen waar de lens de cornea zal raken. De tangentzone is dan ook verantwoordelijk voor de optimale passing en centratie.



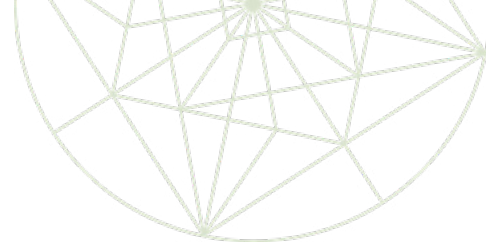

Voor een optimale doorspoeling van traanvocht onder de contactlens bevindt de traanreservoirzone zich net buiten de optische zone. Om de centrale corneavorm te respecteren, is bewust gekozen voor een ruime apicale clearance. Dit zorgt voor een ogenschijnlijk diepe passing en hoort echt bij Conform.

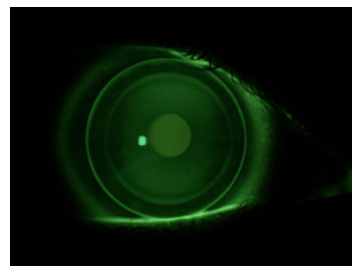

Voorbeeld van een goede passing

Voor een minimaal randjesgevoel is gekozen voor een lensontwerp met een kleine edge lift, waarbij wel voldoende ruimte is voor goede traanvochtdoorstroming. De beweging van de lens is rustig en gering. De lensdrager ervaart hierdoor een zeer hoog comfort.


## Aanpassing

De aanpassing is eenvoudig: Easyfit berekent op basis van de topografiebeelden en de ingevoerde refractiegegevens direct de juiste lens. Wijzigingen kunnen uitsluitend via Easyfit worden doorgevoerd. Zo heeft een aanpassing van de diameter bijvoorbeeld ook invloed op parameters zoals hoogte en tangent – de software houdt hier automatisch rekening mee.

Voor een optimale berekening en pasvorm is het bij deze lens bij voorkeur noodzakelijk om meerdere topografiebeelden per oog te gebruiken; dit is eigenlijk essentieel voor een nauwkeurige en betrouwbare aanpassing.

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

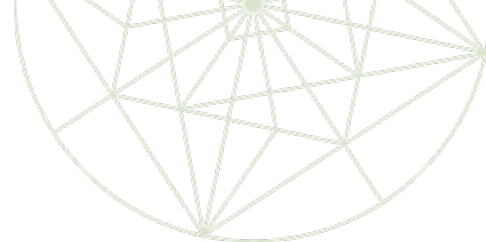

# Daytime

Sferisch  
Daytime

Torisch  
Daytime  
Toric  
Daytime CE  
Bitoric

Multifocaal  
Daytime  
Prepair  
Daytime  
Oblong  
Daytime  
Oblong Forte  
Daytime  
Oblong Inverse

Torisch Multifocaal  
Daytime  
Toric Oblong  
Daytime CE  
Bitoric Oblong


| Leveringsbereik  |                                                     |                                                      |                                                   |                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BCR              | 7,00 mm t/m 9,00 mm, stappen van 0,05 mm            |                                                      |                                                   |                                                                |
| Diameter         | 10,20 mm, 10,60 mm, 11,00 mm                        |                                                      |                                                   |                                                                |
| Sterkte          | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |                                                      |                                                   |                                                                |
| Additie          |                                                     |                                                      | S +1,00 dpt t/m S +3,50 dpt, stappen van 0,50 dpt |                                                                |
| Frontcilinder    |                                                     | Alleen bij Daytime<br>CE Bitoric: t/m C<br>-2,50 dpt |                                                   | Alleen bij Daytime<br>CE Bitoric<br>Oblong: t/m C<br>-2,50 dpt |
| As frontcilinder |                                                     | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                       |                                                   | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                                 |
| Eigenschappen    |                                                     |                                                      |                                                   |                                                                |
| Materiaal        | Menicon Z, Menicon EX, Optimum Comfort, Futura      |                                                      |                                                   |                                                                |

## Voordelen

- Grote lensdiameter
- Hoog draagcomfort
- Scherp zicht
- Eenvoudig aan te passen

## Lensontwerp

Het lensontwerp van Daytime kenmerkt zich door hoog comfort dat ontstaat door een speciale perifere constructie en een grote lensdiameter.

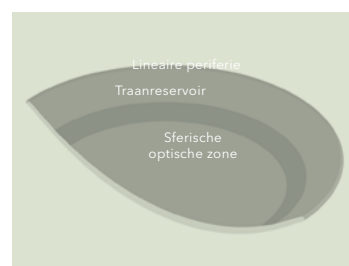


Lensontwerp  
Daytime

## Aanpassing

Een voordeel van de Daytime is de eenvoud waarmee de lens aan te passen is. Deze ruime aanpastolerantie en het draagcomfort maken de Daytime zowel voor de lensdrager als voor u als specialist een geschikte keuze.

In het fluobeeld is een juiste passing van een Daytime lens te zien met een gelijkmatige fluo-verdeling en rondom een kleine edge lift. De reservoir-zone is normaal zichtbaar, de concentratie is perfect.

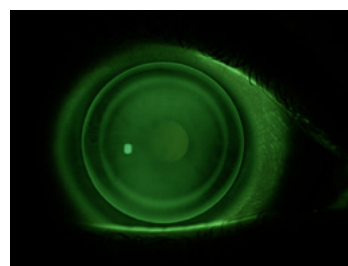

Voorbeeld van een  
goede passing

**Aanpasregel Daytime (tot 1,50 dpt corneacilinder)**


- $\text{BCR} = K \text{ gemiddeld} + 0,05 \text{ mm}$
- $\text{Lensdiameter} = \text{corneadiameter} - 1,00 \text{ mm tot } 1,50 \text{ mm}$

**Aanpasregel Daytime Toric (1,50 dpt t/m 3,00 dpt corneacilinder)**

- $\text{BCR vlak} = K \text{ vlak} + 0,05 \text{ mm}$
- $\text{BCR steil} = K \text{ steil} + 0,10 \text{ mm minimaal}$

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

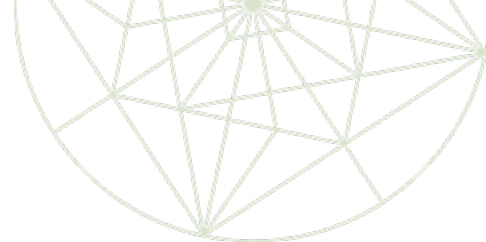

# GeniuS


|                         | Sferisch<br>GeniuS                                  | Torisch<br>GeniuS<br>Fronttoric<br>GeniuS SE<br>Bitoric<br>GeniuS CE<br>Bitoric | Multifocaal<br>GeniuS<br>Prepair<br>GeniuS<br>Oblong<br>GeniuS<br>Oblong Forte<br>GeniuS<br>Oblong Inverse | Torisch Multifocaal<br>GeniuS SE<br>Oblong<br>GeniuS CE<br>Oblong<br>GeniuS SE<br>Oblong Forte<br>GeniuS CE<br>Oblong Forte | Bifocaal<br>GeniuS<br>Longline |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b>  |                                                     |                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                |
| <b>BCR</b>              | 6,80 mm t/m 10,00 mm, stappen van 0,05 mm           |                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                |
| <b>Diameter</b>         | 9,10 mm, 9,60 mm, 10,10 mm                          |                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                |
| <b>Sterkte</b>          | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                |
| <b>Additie</b>          |                                                     |                                                                                 | S +1,00 dpt t/m S +3,50 dpt, stappen van 0,50 dpt                                                          |                                                                                                                             |                                |
| <b>Binnencilinder</b>   |                                                     | C -1,00 dpt t/m<br>C -9,00 dpt                                                  |                                                                                                            | C -1,00 dpt t/m<br>C -9,00 dpt                                                                                              |                                |
| <b>Frontcilinder</b>    |                                                     | t/m C -2,50 dpt                                                                 |                                                                                                            | t/m C -2,50 dpt                                                                                                             |                                |
| <b>As frontcilinder</b> |                                                     | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                                                  |                                                                                                            | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                                                                                              |                                |
| <b>Eigenschappen</b>    |                                                     |                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                |
| <b>Materiaal</b>        | Menicon Z, Menicon EX, Optimum Comfort, Futura      |                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                             |                                |

## Voordelen

- Gezonde traanfysiologie
- Goede centratie
- Goede visus
- Makkelijke aanpas
- Geen randreflecties

## Lensontwerp


GeniuS is een harde contactlens met een sferische optische zone en een asferische periferie. Een lens die makkelijk aan te passen is. Door uitstekend comfort, snelle gewenning en optimale gezichtsscherpte kent deze lens een hoog slagingspercentage.

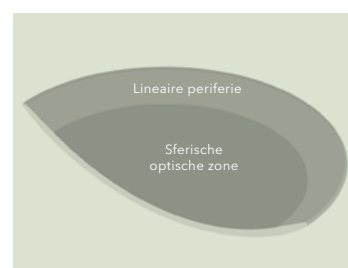


Lensontwerp  
GeniuS

## Aanpassing

In het fluobeeld is een juiste passing van een GeniuS lens te zien met een gelijkmatige fluo-verdeling en een goede centratie. De lens maakt rustige bewegingen van 1,00 mm tot 2,00 mm. De lensdrager ervaart een comfortabele passing.

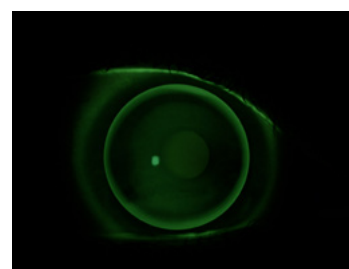

Voorbeeld van een  
goede passing

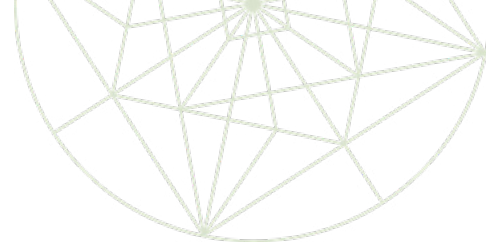

Voor de meest nauwkeurige lensberekening kunt u gebruik maken van Easyfit.

#### **Aanpasregel sferisch**

- $BCR = K \text{ gemiddeld} + 0,05 \text{ mm}$
- $\text{Lensdiameter} = \text{corneadiameter (HVID)} - 2,00 \text{ mm}$


Bij wijziging van de lensdiameter blijven BCR en lenssterkte gelijk.

#### **Aanpasregel SE-bitoric**

- $BCR \text{ vlak} = K \text{ vlak} + 0,05 \text{ mm}$
- $BCR \text{ steil} = K \text{ steil} + 0,10 \text{ mm minimaal}$

## **Reiniging en onderhoud**

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd.  
Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

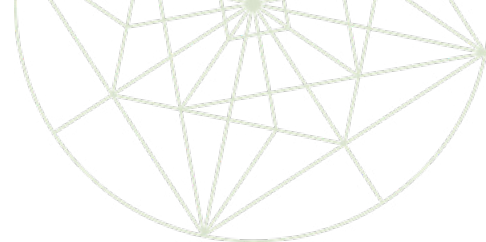

## Exact

Sferisch  
Exact

Torisch  
Exact  
Fronttoric  
Exact SE  
Bitoric  
Exact CE  
Bitoric

Multifocaal  
Exact  
Oblong  
Exact  
Oblong Forte

Torisch Multifocaal  
Exact  
SE Oblong  
Exact  
CE Oblong  
Exact SE  
Oblong Forte  
Exact CE  
Oblong Forte

Bifocaal  
Exact  
Longline


| Leveringsbereik  |                                                      |                                |                                                   |                                |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| BCR              | 6,80 mm t/m 10,00 mm, stappen van 0,05 mm            |                                |                                                   |                                |
| Diameter         | 9,10 mm, 9,60 mm, 10,10 mm                           |                                |                                                   |                                |
| E-waarde         | 0,40 / 0,60 / 0,80                                   |                                |                                                   |                                |
| Sterkte          | S -25,00 dpt t/m S + 25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |                                |                                                   |                                |
| Additie          |                                                      |                                | S +1,00 dpt t/m S +3,50 dpt, stappen van 0,50 dpt |                                |
| Binnencilinder   |                                                      | C -1,00 dpt t/m<br>C -9,00 dpt |                                                   | C -1,00 dpt t/m<br>C -9,00 dpt |
| Frontcilinder    |                                                      | t/m C -2,50 dpt                |                                                   | t/m C -2,50 dpt                |
| As frontcilinder |                                                      | 0° t/m 180°<br>stappen van 1°  |                                                   | 0° t/m 180°<br>stappen van 1°  |
| Eigenschappen    |                                                      |                                |                                                   |                                |
| Materiaal        | Menicon Z, Menicon EX, Optimum Comfort, Futura       |                                |                                                   |                                |

## Voordelen

- Gelijkmatige drukverdeling
- Meerdere e-waardes mogelijk
- Goede centratie
- Geen reflecties

## Lensontwerp


Bij de productie van Exact lenzen wordt uitgegaan van de elliptische geometrie van de cornea. Deze lenzen hebben dan ook een elliptische binnenzijde die de natuurlijke vorm van de cornea respecteert. De afvlakking in de richting van de periferie heeft een vaste excentriciteit. Een optimale dikteverdeling zorgt voor een goede centratie en een hoog comfort.

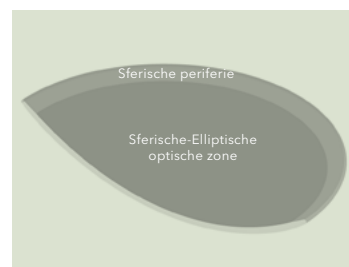


Lensontwerp  
Exact

## Aanpassing

De Exact is geschikt voor bestaande elliptische dragers of wanneer er sprake is van een twee-puntspassing bij andere lenstypes.

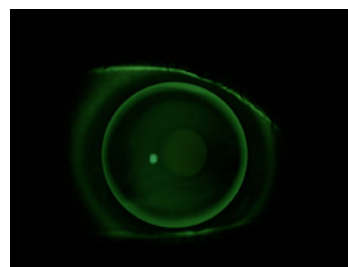

Voorbeeld van een  
goede passing

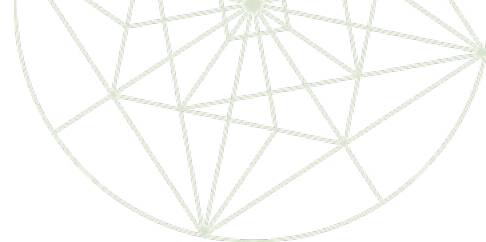

Bij de meeste aanpassingen is een e-waarde van 0,60 de juiste keuze, omdat de gemiddelde afvlakking van de cornea rond de 0,50 ligt. Alleen bij een twee- of driepuntspassing, is het verstandig de e-waarde aan te passen.

Voor de meest nauwkeurige lensberekening kunt u gebruik maken van Easyfit.

#### Aanpasregel sferisch



- $BCR = K \text{ gemiddeld} + 0,05 \text{ mm}$

#### Aanpasregel SE-bitoric

- $BCR \text{ vlak} = K \text{ vlak} + 0,05 \text{ mm}$
- $BCR \text{ steil} = K \text{ steil} + 0,10 \text{ mm minimaal}$



Het fluobeeld van de Exact kenmerkt zich door een gelijkmatige fluo-verdeling met een kleine edge-clearance. Verder zien we rustige bewegingen van 1,00 mm tot 2,00 mm met een goede centratie.

De afvlakking van de cornea verloopt soms te diep voor de Exact 0,6. Hierdoor ontstaan er in de midperiferie twee drukzones, een tweepuntspassing. Centraal zien we een kleine pooling. Ons advies: kies de Exact 0,4 met een lensradius die 0,10 mm vlakker is.

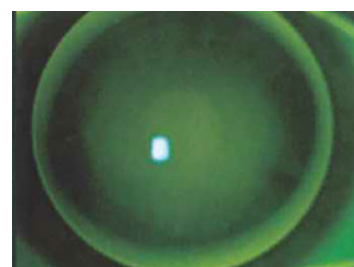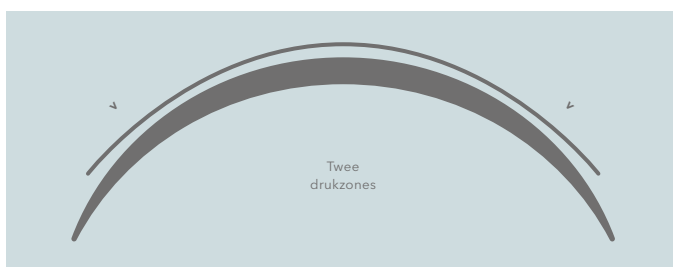

Twee drukkzones


Heel af en toe verloopt de afvlakking van de cornea te vlak voor de Exact 0,6. Hierdoor ontstaan centraal en in de midperiferie drukzones, een driepuntspassing. Ons advies: kies de Exact 0,8 met een lensradius die 0,10 mm dieper is.

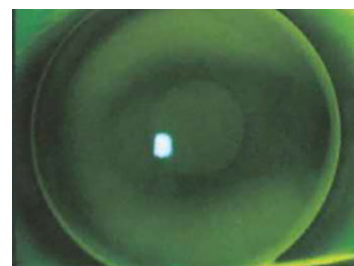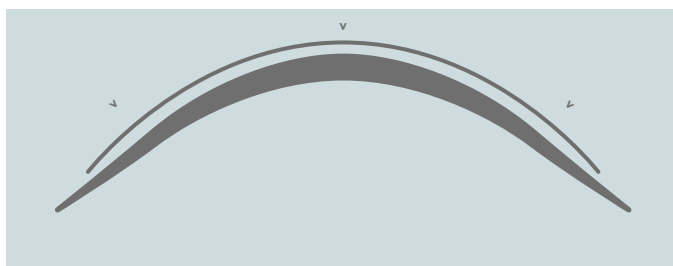

Drie drukkzones

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

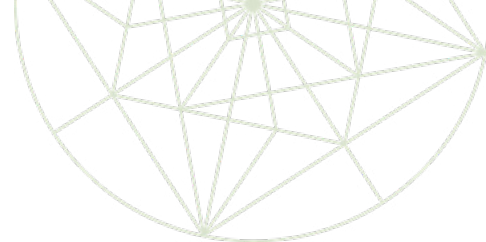

# Flexi TC

Sferisch  
Flexi TC

Torisch  
Flexi TC  
Fronttoric  
Flexi TC SE  
Bitoric  
Flexi TC CE  
Bitoric

Bifocaal  
Flexi TC  
Longline


| Leveringsbereik          |                                                                                                                          |                                |                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| BCR                      | 7,00 mm t/m 9,00 mm, stappen van 0,05 mm                                                                                 |                                |                                                      |
| Diameter / optische zone | 8,20 mm / 7,20 mm (serie A)<br>8,80 mm / 7,20 mm (serie B)<br>9,30 mm / 7,40 mm (serie C)<br>9,80 mm / 7,70 mm (serie D) |                                |                                                      |
| Sterkte                  | S -25,00 dpt t/m S + 25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt                                                                     |                                |                                                      |
| Additie                  |                                                                                                                          |                                | S +1,00 dpt t/m<br>S +3,50 dpt, stappen van 0,50 dpt |
| Binnencilinder           |                                                                                                                          | C -1,00 dpt t/m<br>C -9,00 dpt |                                                      |
| Frontcilinder            |                                                                                                                          | t/m C -2,50 dpt                |                                                      |
| As frontcilinder         |                                                                                                                          | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1° |                                                      |
| Eigenschappen            |                                                                                                                          |                                |                                                      |
| Materiaal                | Menicon Z, Menicon EX, Optimum Comfort, Futura                                                                           |                                |                                                      |

## Voordelen

- Radii in de periferie eenvoudig aan te passen
- Eenvoudige beoordeling

## Lensontwerp

Flexi TC is één van de oudste, nog steeds gebruikte, lensontwerpen. Door het inzichtelijke technische ontwerp is deze lens eenvoudig aan te passen en te beoordelen.

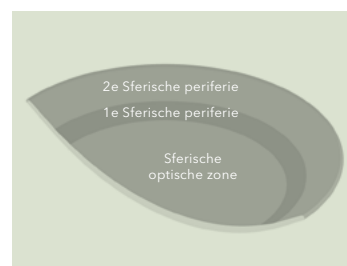


Lensontwerp  
Flexi TC

Centraal heeft de Flexi TC een sferische optische zone met naar de rand toe drie perifere radii. Standaard is deze uitbreking 0,60 mm. Dit betekent dat de eerste perifere radius 0,60 mm vlakker is dan de BCR. De tweede perifere radius is weer 0,60 mm vlakker dan de eerste perifere uitbreking.

De serie A van de Flexi TC is een bicurve. Naast de sferische optische zone heeft deze bicurve slechts één perifere uitbreking. Deze is altijd 1,00 mm vlakker dan de BCR. De serie A is alleen leverbaar in een sferische uitvoering.

Ondanks dat Flexi TC een prima harde lens is, adviseren wij bij nieuwe lensdragers te kiezen voor een modern RGP design.




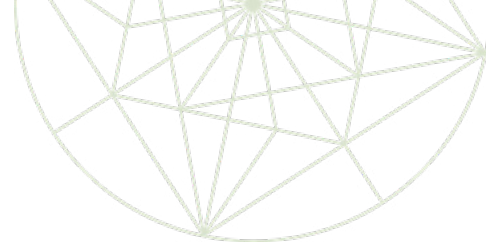

## Aanpassing

Bij een juiste passing zien we een egaal fluobeeld met een goede centratie. De beweging van de lens is rustig.

Voor de meest nauwkeurige lensberekening kunt u gebruik maken van Easyfit.

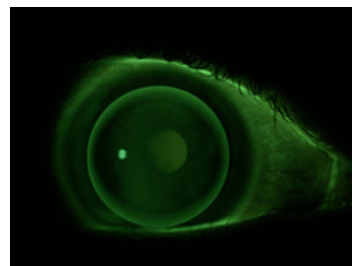

Voorbeeld van een goede passing

### Aanpasregel sferisch


- $BCR = K \text{ gemiddeld} + 0,10 \text{ mm}$

### Aanpasregel SE-bitoric

- $BCR \text{ vlak} = K \text{ vlak} + 0,10 \text{ mm}$
- $BCR \text{ steil} = K \text{ steil} + 0,15 \text{ mm}$

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

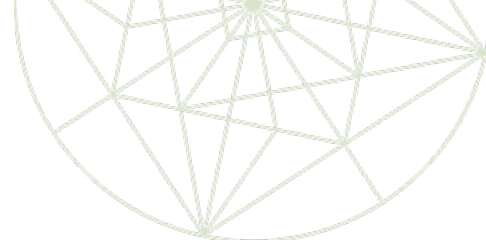


## Torische en multifocale opties


Bijna al onze harde lenzen hebben dezelfde benamingen voor torische en multifocale ontwerpen. Zo kan er een Daytime Oblong besteld worden, maar ook een GeniuS Oblong. De toevoeging Oblong staat dan voor een bepaald multifocaal principe.

Om duidelijkheid te scheppen lichten we alle beschikbare torische en multifocale opties kort toe. We eindigen met ons bifocale principe, de Longline.

|          | Sferisch | Torisch<br>Bi-torisch | Torisch<br>Front torisch | Multifocaal | Torisch<br>Multifocaal | Bifocaal |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Conform® | •        | •                     | -                        | •           | •                      | -        |
| Daytime  | •        | •                     | -                        | •           | •                      | -        |
| GeniuS   | •        | •                     | •                        | •           | •                      | •        |
| Exact    | •        | •                     | •                        | •           | •                      | •        |
| Flexi TC | •        | •                     | •                        | -           | -                      | •        |

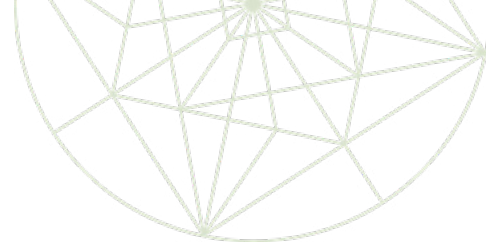

# Torische lenzen

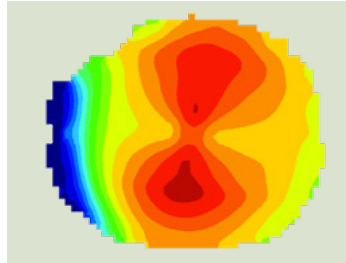

Op basis van perifere hoogteverschillen in de cornea

Conform®

Conform® 360

Op basis van k-waardes of topografie

Corneacilinder  
 $\leq 1,50$  dpt

Daytime

GeniuS

Exact

FlexiTC

Corneacilinder  
 $\geq 1,50$  dpt  $\leq 3,00$  dpt

Daytime Toric

Corneacilinder  
 $\geq 2,25$  dpt

GeniuS SE Bitoric

Exact SE Bitoric

Flexi TC SE Bitoric

Restastigmatisme  
 $\geq 0,75$  dpt

GeniuS Front toric

Exact Front toric

Flexi TC Front toric

Restastigmatisme  
 $\geq 0,75$  dpt


Daytime CE Bitoric

Restastigmatisme  
 $\geq 0,75$  dpt

GeniuS CE Bitoric

Exact CE Bitoric

Flexi TC CE Bitoric

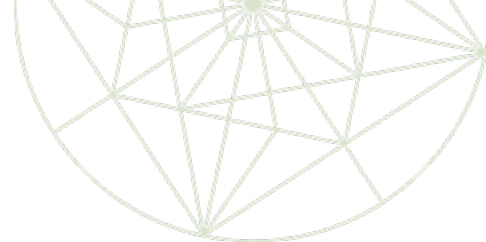

## Torische lenzen: SE/CE Bitoric

### Voordelen

- Betere passing
- Stabiele visus
- Respecteert de cornea

### Lensontwerp


De SE Bitoric heeft een volledig binnentorische geometrie. De lens stabiliseert in de vlakste cornearichting, in deze richting zijn de markeringen van de lens zichtbaar. De CE Bitoric heeft dezelfde binnengeometrie als de SE Bitoric. In deze lens wordt een restcilinder op de voorkant verwerkt. Deze frontcilinder is per graad tussen  $0^\circ$  en  $180^\circ$  door te voeren.

### Doelgroep

De SE Bitoric is geschikt voor consumenten met een (limbus tot limbus) cornea-astigmatisme vanaf C-2,25 dpt. De CE Bitoric is de juiste keuze als er een restcilinder  $>C-0,75$  dpt over een SE Bitoric lens gecorrigeerd moet worden.

### Aanpassing

We adviseren altijd te beginnen met een SE Bitoric. Wanneer er sprake is van een torische overrefractie met een minimale cilinderwaarde van S-0,75 dpt, kan gekozen worden voor een CE Bitoric. Hiervoor dient de gehele overrefractie te worden ingevuld in Easyfit. De stand van de markering wordt volgens TABO ingevuld.

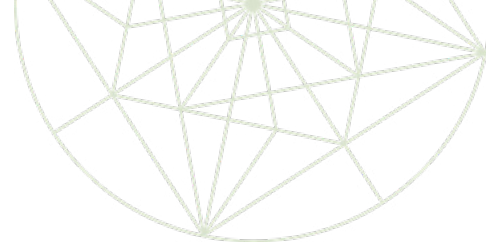

# Torische lenzen: Daytime Toric

## Voordelen

- Alle voordelen van de Daytime
- Makkelijke aanpas

## Lensontwerp

Een Daytime Toric heeft twee radii die samen de binnencilinder vormen. Centraal heeft het ontwerp een binnentorische geometrie, de rand is sferisch. De lens stabiliseert in de vlakste cornearichting, in deze richting zijn de markeringen van de lens zichtbaar. De CE Bitoric variant heeft dezelfde binnen-geometrie als de Toric uitvoering. In deze lens wordt een restcilinder op de voorkant verwerkt. De frontcilinder is per graad tussen 0° en 180° door te voeren.


Voor deze lens geldt dat de rand van het lensontwerp niet torisch is, om die reden is deze torische lens vooral geschikt voor lensdragers met een lagere corneacilinder.

## Doelgroep

Voor consumenten met een torische cornea vanaf cilinder S-1,50 dpt t/m S-3,00 dpt.

## Aanpassing

We adviseren altijd te beginnen met een Daytime Toric. Wanneer er sprake is van een torische overrefractie met een minimale cilinderwaarde van S-0,75 dpt, kan gekozen worden voor een Daytime CE-Bitoric. Hiervoor dient de gehele overrefractie te worden ingevuld in Easyfit. De stand van de markeringen worden volgens TABO ingevuld.

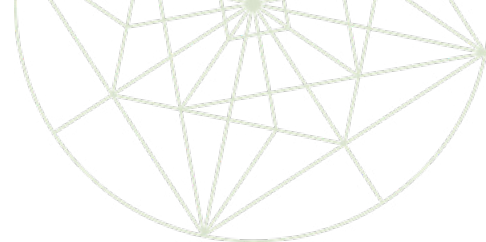

# Torische lenzen: Fronttoric

## Voordelen

- Voor correctie van restcilinders t/m S-2,50 dpt
- Goede stabilisatie door middel van prismaballast

## Lensontwerp

Een Fronttoric heeft een cilinder aan de voorkant van de lens om een aanwezige restcilinder te corrigeren. Deze is beschikbaar tussen C-0,75 dpt t/m C-2,50 dpt en is in stappen van 1° te bestellen.


Voor de stabilisatie heeft de lens een prisma van standaard 1,50 dpt op 270°. Een Fronttoric heeft 3 markeringspunten op 0°, 180° en 270°.

## Doelgroep

De doelgroep van de Fronttoric is erg duidelijk. De optie is ontworpen voor consumenten met een (bijna) sferische cornea met een cilindrische refractie. Als het verschil tussen het cornea-astigmatisme en het refractie-astigmatisme groter is dan 0,75 dpt kan een Fronttoric lens worden besteld.

## Aanpassing

Om een goede passing en een scherpe visus te behalen, adviseren we om eerst een Fronttoric paslens te bestellen. Vervolgens kan de gemeten (torische) overrefractie worden doorgevoerd via Easyfit. Hierbij wordt de stand van de horizontale markeringen volgens TABO ingevuld.

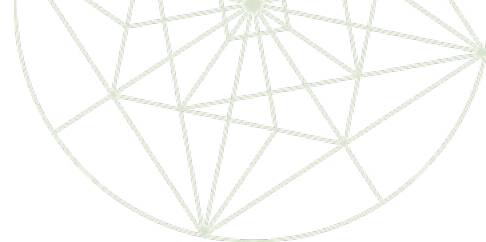

# Multifocale lenzen: Prepair


## Voordelen

- Minder vermoeide ogen
- Korte gewenning
- Blijvende goede afstandsvisus
- Makkelijke doorgroei naar de Oblong

## Lensontwerp

Prepair heeft een vastgestelde additie van  $S+0,75$  dpt. Verder heeft de lens dezelfde specificaties als het lensontwerp waar het principe in wordt verwerkt (Daytime of GeniusS).


Een lens met een Prepair principe geeft een grote vertezone, veel groter dan die van de Oblong, met een licht oplopende leessterkte naar de periferie. Door deze opbouw behoudt de lensdrager een uitstekende vertevisus.

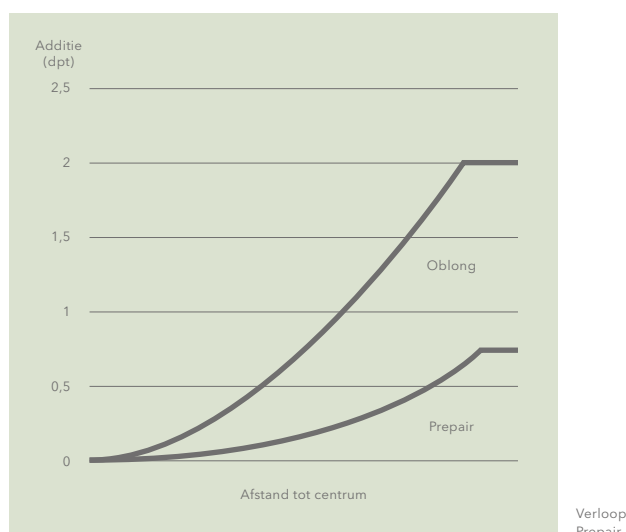

## Doelgroep

Lenzen met een Prepair principe zijn geschikt voor de beginnende presbyoop en voor dragers die intensief nabij-werk moeten verrichten. Het zorgt voor verlichting van vermoeide ogen en/of hoofdpijnklasten bij langdurig lezen of computerwerk.

Wanneer de lensdrager met het Prepair principe toch leesklachten ervaart, kunt u overstappen naar het multifocale principe Oblong.

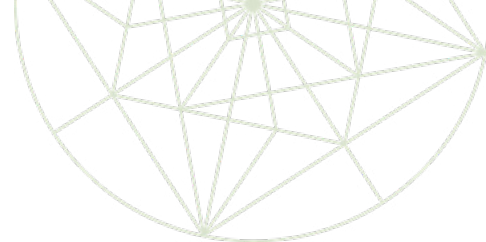

# Multifocale lenzen: Oblong


## Voordelen

- Uitstekende verte visus én comfortabel lezen
- Snelle gewenning
- Rndom multifocaal
- Makkelijke aanpas
- In meerdere addities verkrijgbaar

## Lensontwerp

Het Oblong principe is verkrijgbaar vanaf additie S+1,00 dpt t/m S+3,50 dpt, in stappen van 0,50 dpt. Verder heeft de lens dezelfde specificaties als het lensontwerp waar het principe in wordt verwerkt.

Een Oblong heeft een unieke multifocale sterkteopbouw aan de voorkant van de lens, met een zuiver oplopende additie die van het midden naar de periferie steeds positiever wordt. Doordat er geen zones zijn, zijn reflecties uitgesloten.

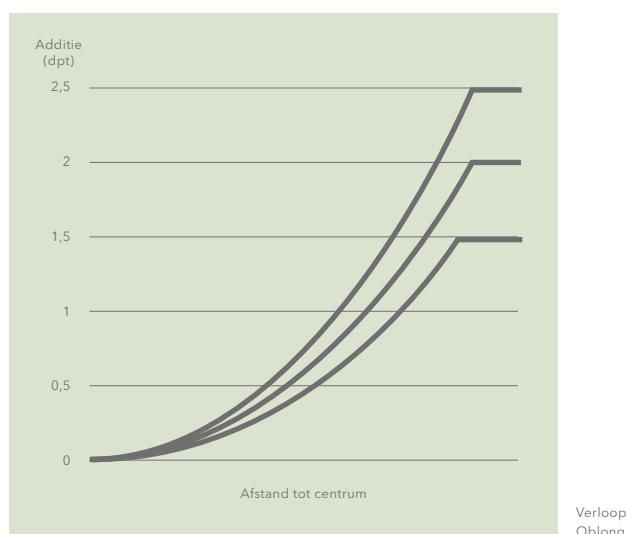

Hoe hoger de additie, des te progressiever het additieverloop. De positie van de maximale additie, die bereikt wordt bij de rand van de optische zone en dan constant blijft, is bij alle addities gelijk.

## Doelgroep

Voor presbyopen vanaf een additie van S+1,00 dpt.



# Multifocale lenzen: Oblong Forte


## Voordelen

- Leesprestaties bij kleine pupil of een ondiepe VOK
- Korte gewenning
- Makkelijke overstap vanaf Oblong
- Consument kan langer lenzen blijven dragen

## Lensontwerp

Een Oblong Forte heeft dezelfde gegevens als de Oblong en is leverbaar vanaf additie S+1,00 dpt t/m S+3,50 dpt, in stappen van 0,50 dpt.

De Oblong Forte heeft een progressiever verloop dan de gewone Oblong lenzen. Dit betekent dat de maximale additie eerder wordt bereikt.

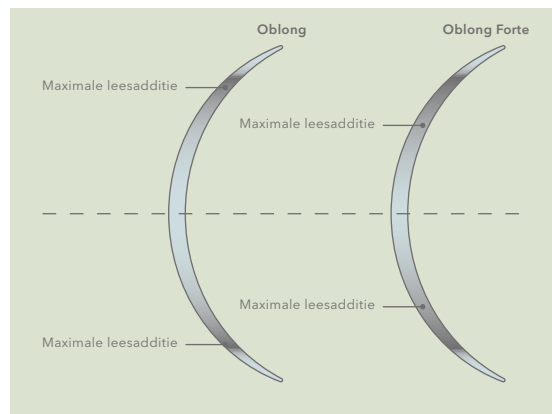

Lensontwerp

## Doelgroep

De Oblong Forte is voor presbyopen vanaf een additie van S+1,00 dpt, die leesproblemen ondervinden met de gewone Oblong.

# Multifocale lenzen: Oblong Inverse

## Voordelen



- Meer tevreden multifocale cliënten
- Behoud van binoculaire balans
- Betere leesprestaties dan met Oblong Forte

## Lensontwerp

Een Oblong Inverse heeft dezelfde specificaties als de Oblong en is alleen leverbaar als GeniuS of Daytime vanaf additie S+1,00 dpt t/m S+3,50 dpt, in stappen van 0,50 dpt.


De Oblong Inverse wordt alleen aangepast op het niet-dominante oog en wordt gecombineerd met een Oblong of Oblong Forte op het dominante oog.

De Oblong Inverse is een centre near lens, waarbij de leesadditie in het centrum van de lens zit. Bij dit ontwerp zit de maximale additie centraal en loopt de sterkte maximaal positief af naar de periferie.

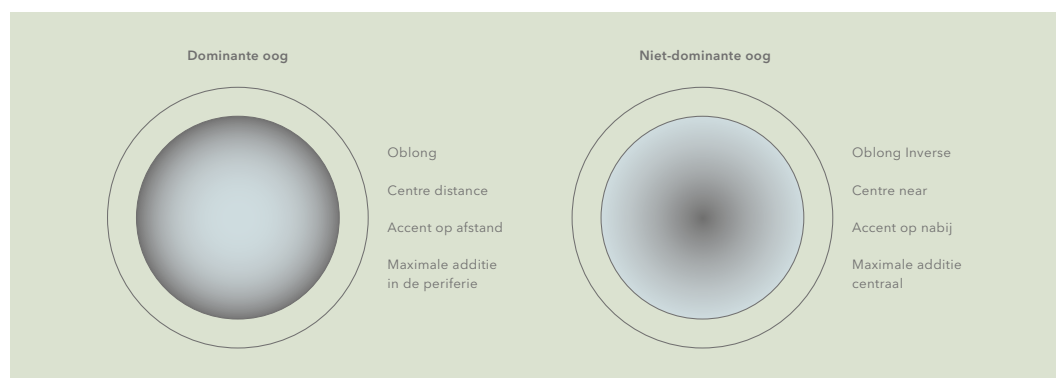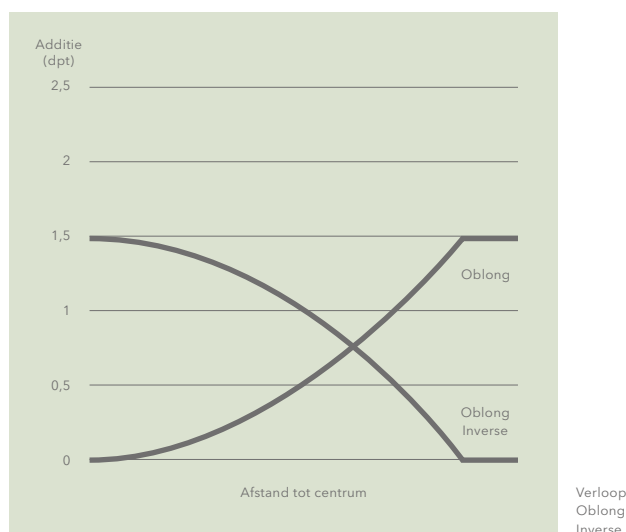

## Doelgroep

Voor presbyopen vanaf een additie van S+1,00 dpt, die leesproblemen ondervinden met zowel de Oblong als de Oblong Forte of voor presbyopen met een hoge behoefte voor een optimale nabijvisus.

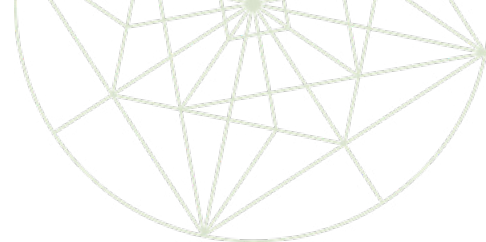

## Bifocale lenzen: Longline

De Longline is een bifocale lens volgens het alternerende principe. Afhankelijk van de blikrichting kijkt de lensdrager of door de zone voor afstand of door de zone voor nabij. Deze aparte zones zijn optisch zeer zuiver en geven daardoor goede visuele prestaties.


### Voordelen

- Stabiele gezichtsscherpte
- Groot leesgebied
- Inzetbaar bij high-riders met Oblong
- Bekende binnengeometrie van de GeniuS, Exact of Flexi TC

### Lensontwerp


Longline is verkrijgbaar vanaf additie S+1,00 dpt t/m S+3,50 dpt, in stappen van 0,50 dpt. De lens heeft een prismaballast van standaard 1,50 dpt op 270°.

Het leesdeel van een Longline bevindt zich 0,50 mm onder het geometrische midden. Afhankelijk van de blikrichting wordt er door het leesdeel of het vertedeel gekeken. Een goede passing toont hetzelfde beeld als een goede passing bij de Exact, GeniuS of Flexi TC. Door het prisma zakt de lens iets sneller naar beneden. Ook positioneert de lens iets lager door het prisma. Bij een goed functionerende lens bedekt het leesdeel ongeveer 1/3 van de pupil.

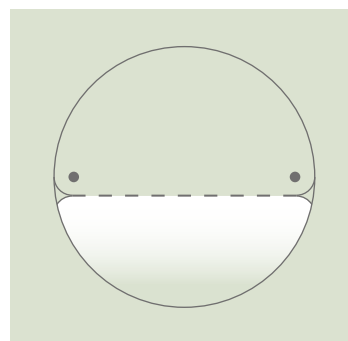

### Doelgroep

Lensdragers die hoge eisen stellen aan het nabijzicht. Presbyopen waarbij de vertevisus met Oblong ontoereikend is.

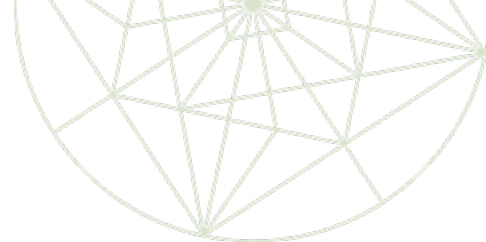

## Materialen

Al onze harde lenzen zijn te maken in verschillende materialen met elk zijn eigen unieke eigenschappen. Afhankelijk van het gekozen lenstype is deze verkrijgbaar in één of verschillende soorten materialen.

| Materiaal       | Dk-waarde | Contacthoek | Plasma-behandeling | Kleur | Alternatieve kleur | Vervangings-termijn |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------|-------|--------------------|---------------------|
| Menicon Z       | 163       | 22          | Ja                 | Blauw | Rood               | 1 jaar              |
| Menicon EX      | 56        | 27          | Ja                 | Blauw | -                  | 1-2 jaar            |
| Optimum Comfort | 65        | 6           | Nee                | Groen | Blauw              | 2-3 jaar            |
| Futura          | 40        | 61          | Nee                | Groen | Blauw              | 2-3 jaar            |

## Menicon Z

### Kenmerken

- Extreem hoog-Dk materiaal
- Goede bevochtiging door plasmabehandeling
- Minder gevoelig voor aanslag door plasmabehandeling
- Beste keus bij nieuwe aanpassingen
- Geschikt om consumenten met een mid-Dk te upgraden

Door het combineren van een zeer hoge zuurstofdoorlaatbaarheid met een uitstekende bevochtiging, is de hoeveelheid zuurstof die de cornea bereikt bij het dragen van lenzen in het Menicon Z-materiaal vergelijkbaar met de hoeveelheid zuurstof die de cornea bereikt wanneer er geen lenzen worden gedragen.

Bij een plasmabehandeling wordt het lensmateriaal gebombardeerd met zuurstof. Hierdoor wordt de lens extra schoon en glad, waardoor er een kleinere contacthoek ontstaat en vuil en vetten minder kans krijgen zich aan het lensoppervlak te hechten.


### Gewenning

Op de eerste dag 8 uur, vanaf de tweede dag de gehele dag.

### Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

Een reiniger met een polijstende werking wordt bij Menicon Z sterk afgeraden, omdat dit de plasmabehandeling negatief kan beïnvloeden.

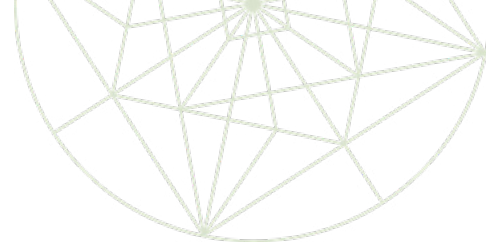

## Menicon EX

### Kenmerken

- Mid-Dk materiaal
- Geschikt voor daily wear
- Goede bevochtiging door plasmabehandeling
- Minder gevoelig voor aanslag door plasmabehandeling
- Geschikt om consumenten met een laag-Dk te upgraden

Bij een plasmabehandeling wordt het lensmateriaal gebombardeerd met zuurstof. Hierdoor wordt de lens extra schoon en glad, waardoor er een kleinere contacthoek ontstaat en vuil en vetten minder kans krijgen zich aan het lensoppervlak te hechten.

### Gewenning

Op de eerste dag 4 uur. Dit kan elke volgende dag worden opgebouwd met 2 uur. Bij een overstap op Menicon EX kunnen de lenzen meteen de gehele dag gedragen worden.

### Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

Een reiniger met een polijstende werking wordt bij Menicon EX sterk afgeraden, omdat dit de plasmabehandeling negatief kan beïnvloeden.

## Optimum Comfort


### Kenmerken

- Mid-Dk materiaal
- Geschikt voor daily wear
- Uitstekende bevochtiging
- Makkelijke overstap van laag-Dk materiaal

Door de beperkte gevoeligheid voor vetaanslag en de uitzonderlijke oppervlaktebevochtiging kan Optimum Comfort ingezet worden als alternatief voor het Futura-materiaal.

### Gewenning

Op de eerste dag 4 uur. Dit kan elke volgende dag worden opgebouwd met 2 uur. Bij een overstap op Optimum Comfort kunnen de lenzen meteen de gehele dag gedragen worden.

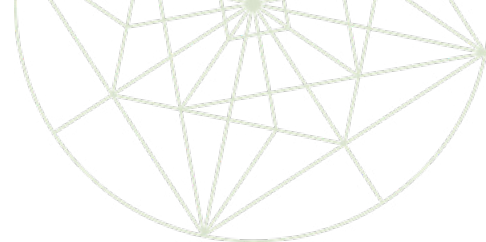

### Reiniging en onderhoud

Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.

## Futura

### Kenmerken

- Mid-Dk materiaal
- Geschikt voor daily wear
- Goede bevochtiging
- Makkelijke overstap van laag-Dk materiaal

Met een Dk-waarde van 40 heeft Futura een goede balans tussen zuurstof-doorlaatbaarheid, stabiliteit en comfort.

### Gewenning

Op de eerste dag 4 uur. Dit kan elke volgende dag worden opgebouwd met 2 uur. Bij een overstap op Futura kunnen de lenzen meteen de gehele dag gedragen worden.

### Reiniging en onderhoud


Voor dagelijks onderhoud wordt Menicare Pure of Menicare Plus geadviseerd. Dit i.c.m. Progent als maandelijkse reiniger om eiwitafzetting te verwijderen.



## Zachte maatwerklenzen

Zachte maatwerklenzen zijn de ideale oplossing voor consumenten die graag een zichtoplossing op maat willen of nodig hebben, maar ook kiezen voor het comfort van zachte lenzen. Binnen deze productgroep is ruime keuze in varianten en vervangingstermijnen. Met maatwerk kunt u bijna al uw klanten voorzien van comfortabele zachte lenzen.

|                          | Sferisch | Torisch | Multifocaal | Multifocaal<br>Torisch | Vervangings-<br>termijn |
|--------------------------|----------|---------|-------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Individual</b>        | •        | •       | •           | •                      | 1 maand                 |
| <b>3month Individual</b> | •        | •       | •           | •                      | 3 maanden               |
| <b>Vintage</b>           | •        | •       | •           | •                      | 6 maanden               |

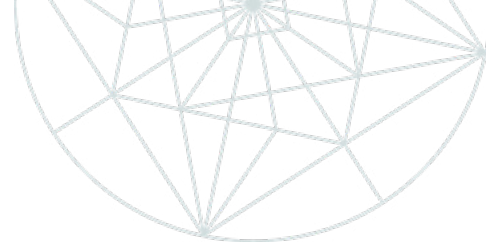

# Indivisual

|                        | Sferisch<br><b>Indivisual</b>                       | Torisch<br><b>Indivisual Toric</b>                         | Multifocaal<br><b>Indivisual Multifocal</b>                                                                          | Torisch Multifocaal<br><b>Indivisual Multi Toric</b>       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b> |                                                     |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Diameter</b>        | 13,00 mm t/m 15,50 mm, stappen van 0,10 mm          |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Sterkte</b>         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Cilinder</b>        |                                                     | C -0,75 dpt t/m<br>C -8,00 dpt,<br>stappen van<br>0,25 dpt |                                                                                                                      | C -0,75 dpt t/m<br>C -8,00 dpt,<br>stappen van<br>0,25 dpt |
| <b>Additie</b>         |                                                     |                                                            | CN: S +1,00 dpt t/m S +2,00 dpt,<br>stappen van 0,50 dpt<br>CD: S +1,00 dpt t/m S +2,50 dpt,<br>stappen van 0,50 dpt |                                                            |
| <b>As</b>              |                                                     | 0 t/m 180°,<br>stappen van 1°                              |                                                                                                                      | 0 t/m 180°,<br>stappen van 1°                              |
| <b>Eigenschappen</b>   |                                                     |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Materiaal</b>       | Siliconen hydrogel Filcon V3 (Efrofilcon A)         |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Modulus</b>         | 0,35 MPa                                            |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Watergehalte</b>    | 74%                                                 |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Handlingtint</b>    | Blauw                                               |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |
| <b>UV-blocker</b>      | Ja                                                  |                                                            |                                                                                                                      |                                                            |


## Voordelen

- Zeer scherp zicht door optimale pasvorm
- Hoog comfort
- Brede range
- Cornea wordt volledig gerespecteerd
- Aanpassing op basis van hoogte en tangent
- U positioneert uzelf als specialist in maatwerk

## Lensontwerp

### Indivisual


Doordat de hoogte en tangent in het lensontwerp van Indivisual los van elkaar worden bepaald, wordt een optimale passing gecreëerd. Alleen op deze manier is het mogelijk met het lensdesign de druk optimaal te verdelen en de vorm van de cornea volledig te respecteren. Dit alles zorgt voor een zeer snelle gewenning en ongekend comfort.

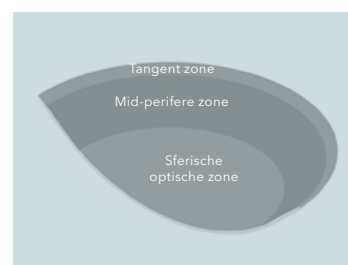

Lensontwerp  
Indivisual

Niet alleen aan de achterzijde is Indivisual uniek. Ook de voorzijde is met veel aandacht ontworpen. Met een nieuwe ontwerptechniek is de voorzijde volledig aberratie gecontroleerd wat zorgt voor scherp zicht, ook in de avonduren.



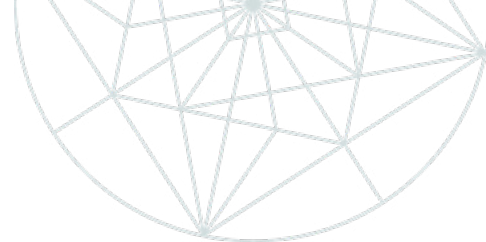


Ook het randontwerp is bijzonder, de rand heeft een respecting edge. De druk op de conjunctiva wordt hierdoor gelijkmatig verdeeld. Dit zorgt samen met de rest van het lensdesign voor meer comfort.



Individual  
randontwerp

### Individual Toric



Individual Toric is een maandlens voor mensen met een cilinder. De aanpassing op hoogte en tangent en de dynamische stabilisatie in combinatie met een prisma (peri ballast), zorgt voor goede stabiliteit, zeer scherp zicht en ultiem comfort.

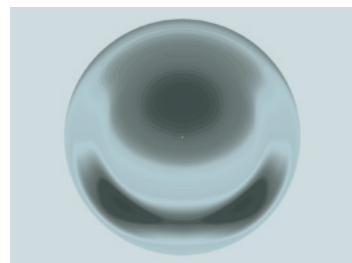

Individual  
Toric

### Individual Multifocal

Individual Multifocal is verkrijgbaar als CN (t/m add. +2,00 dpt) en CD (t/m add. +2,50 dpt) ontwerp. Deze multifocale oplossing kan ingezet worden

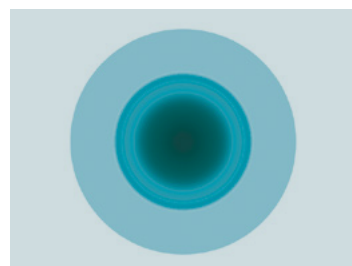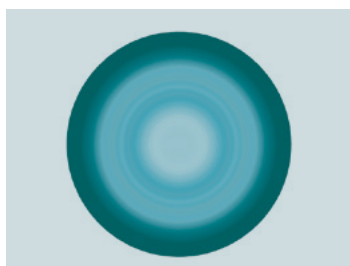

voor een brede doelgroep, zowel beginnende als gevorderde presbyopen kunnen er veel profijt van hebben.

### Individual Multi Toric

Individual Multi Toric is een multifocaal torische maandlens voor presbyopen met een cilinder. Zowel beginnende presbyopen met een cilinder als mensen met een cilinder en een additie t/m +2,50 dpt kunnen met deze lens worden geholpen. Qua ontwerp is deze lens een combinatie van de Individual Toric en de Individual Multifocal. Om die reden is het ook erg eenvoudig om iemand over te zetten naar het torisch multifocale ontwerp.

## Aanpassing


Individual lenzen zijn eenvoudig aan te meten met behulp van Easyfit.

Hiervoor zijn slechts drie zaken van belang:

- Refractiegegevens
- Goede topografiebeelden
- De juiste corneadiameter


Wanneer u deze gegevens in Easyfit invoert, berekent de software voor u de juiste lens. We raden u aan te starten met een CN design.

Via Easyfit wordt ook de passing van Individual aan de hand van een aantal vragen beoordeeld en kunt u eenvoudig de lens wijzigen.

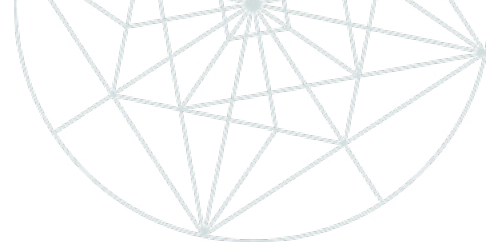

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging en het bewaren van de lens wordt Solocare Aqua of Mycare aangeraden.

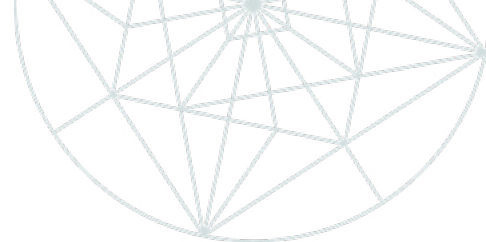

## 3month Individual

|                        | Sferisch<br>3month<br>Individual                    | Torisch<br>3month<br>Individual<br>Toric                   | Multifocaal<br>3month<br>Individual<br>Multi     | Torisch Multifocaal<br>3month<br>Individual<br>Multi Toric |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b> |                                                     |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>BCR</b>             | 7,40 mm t/m 9,50 mm, stappen van 0,10 mm            |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>Diameter</b>        | 13,00 mm t/m 15,50 mm, stappen van 0,10 mm          |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>Sterkte</b>         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>Cilinder</b>        |                                                     | C -0,75 dpt t/m<br>C -5,00 dpt,<br>stappen van<br>0,25 dpt |                                                  | C -0,75 dpt t/m<br>C -3,00 dpt,<br>stappen van<br>0,25 dpt |
| <b>Additie</b>         |                                                     |                                                            | CD: S +1,00 t/m S +3,00,<br>stappen van 0,50 dpt |                                                            |
| <b>As</b>              |                                                     | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                             |                                                  | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                             |
| <b>Eigenschappen</b>   |                                                     |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>Materiaal</b>       | Siliconen hydrogel Filcon V3 (Efofilcon A)          |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>Modulus</b>         | 0,35 MPa                                            |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>Watergehalte</b>    | 74%                                                 |                                                            |                                                  |                                                            |
| <b>Handlingtint</b>    | Blauw                                               |                                                            |                                                  |                                                            |

## Voordelen

- Vrijwel geen beperking in specificaties
- Eenvoudige aanpassing via Easyfit of aanpasregel
- Upgraden van bestaande lensdragers
- Comfortabel SiHy-materiaal
- Goede visus door maatwerk

## Lensontwerp

Door de sferische optische zone en asferische periferie zorgt de 3month Individual voor een goede passing op de cornea en in het limbusgebied. De lens heeft een dunne rand, die bij elke sterkte gelijk is.


### 3month Individual Toric

Het torische ontwerp heeft dezelfde binnengeometrie als de eenvoudige 3month Individual, maar is voorzien van een dynamische stabilisatie.


De twee stabilisatiezones aan de voorkant van de lens zorgen door de knipperbeweging van het oog voor de stabilisatie.

### 3month Individual Multi

Het multifocale ontwerp is hetzelfde als de 3month Individual, maar is voorzien van een additie volgens het center distance-principe.

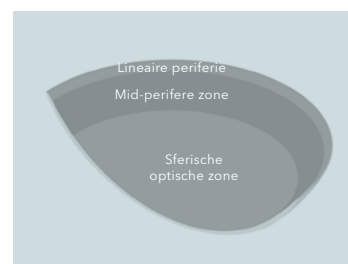

Lensontwerp  
3month Individual

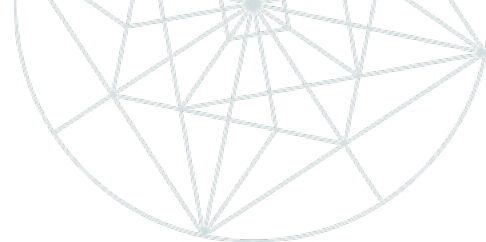

### **3month Individual Multi Toric**

Het torisch multifocale ontwerp is hetzelfde als de 3month Individual Toric, en is daarnaast ook voorzien van een additie volgens het center distance-principe.

## **Aanpassing**

3month Individual lenzen kunnen op twee manieren worden berekend.  
Via Easyfit en middels een aanpasregel.

Bij een berekening via Easyfit worden de beelden vanuit de corneatopograaf naar Easyfit geëxporteerd en moeten zowel de corneadiameter als de subjectieve refractie worden ingevuld. Het programma berekent dan de best passende lens.

### **Aanpasregel 3month Individual (Multi)**


- Lensradius = K gemiddeld + 0,30 mm.
- Lensdiameter = corneadiameter + 2,20 mm

### **Aanpasregel 3month Individual (Multi) Toric**

- Lensradius = K vlak + 0,20 mm
- Lensdiameter = corneadiameter + 2,50 mm

## **Reiniging en onderhoud**

Voor dagelijkse reiniging en het bewaren van de lens wordt Solocare Aqua of Mycare aangeraden.

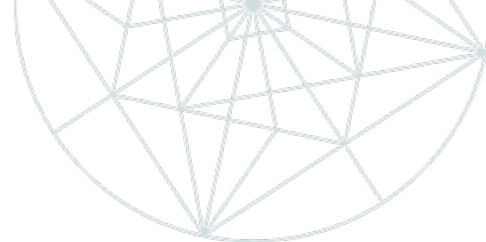

# Vintage

|                        | Sferisch<br><b>Vintage</b>                          | Torisch<br><b>Vintage Toric</b>                             | Multifocaal<br><b>Vintage Multi</b>                      | Torisch Multifocaal<br><b>Vintage Multi Toric</b>           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b> |                                                     |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>BCR</b>             | 7,00 mm t/m 9,50 mm, stappen van 0,10 mm            |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>Diameter</b>        | 13,50 mm t/m 15,50 mm, stappen van 0,10 mm          |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>Sterkte</b>         | S -25,00 dpt t/m S +25,00 dpt, stappen van 0,25 dpt |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>Cilinder</b>        |                                                     | C -0,75 dpt t/m<br>C -3,00 dpt,<br>stappen van<br>-0,25 dpt |                                                          | C -0,75 dpt t/m<br>C -3,00 dpt,<br>stappen van<br>-0,25 dpt |
| <b>Additie</b>         |                                                     |                                                             | CD: S +1,00 dpt t/m S +3,00 dpt,<br>stappen van 0,50 dpt |                                                             |
| <b>As</b>              |                                                     | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                              |                                                          | 0° t/m 180°,<br>stappen van 1°                              |
| <b>Eigenschappen</b>   |                                                     |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>Materiaal</b>       | Hydrogel Mipafilcon A2                              |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>Modulus</b>         | 1,2 MPa                                             |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>Watergehalte</b>    | 72%                                                 |                                                             |                                                          |                                                             |
| <b>Handlingtint</b>    | Groen                                               |                                                             |                                                          |                                                             |

## Voordelen

- Vrijwel geen beperkingen in BCR, diameter of sterkte
- Nauwkeurige aanpas mogelijk via Easyfit
- Hoog watervasthoudend materiaal
- Hoger comfort en minder aanslag door bijzonder glad materiaal

## Lensontwerp

Vintage lenzen hebben een sferische optische zone en een asferische periferie. Deze zorgen voor een goede passing op de cornea en in het limbusgebied. De Vintage heeft een dunne rand, die voor alle lenssterktes gelijk is.

### Vintage Toric


Het torische ontwerp heeft dezelfde binnengeometrie als de Vintage, maar is voorzien van een prismaballast voor de stabilisatie.

### Vintage Multi


Het multifocale ontwerp is gelijk aan het sferische ontwerp, maar is voorzien van een additie volgens het center distance-principe.

### Vintage Multi Toric

Het torisch multifocale ontwerp is gelijk aan de Vintage Toric, maar heeft net als de Vintage Multi een additie volgens het center distance-principe.

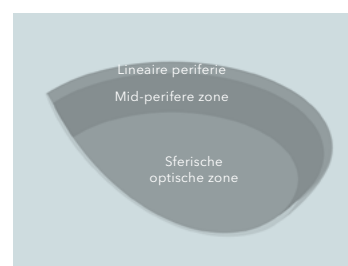

Lensontwerp  
Vintage

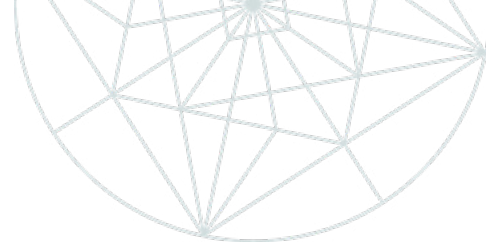

## Aanpassing

De Vintage kan op twee manieren worden aangepast, via Easyfit en via een aanpasregel.

Bij een berekening via Easyfit worden de beelden vanuit de corneatopograaf naar Easyfit geëxporteerd en moeten zowel de corneadiameter als de subjectieve refractie worden ingevuld. Het programma berekent dan de best passende lens.

### Aanpasregel Vintage (Multi)

- Lensradius = K vlak + 0,60 mm
- Lensdiameter = horizontale corneadiameter + 2,40 mm

### Aanpasregel Vintage (Multi) Toric

- Lensradius = K gemiddeld + 0,80 mm
- Lensdiameter = horizontale corneadiameter + 2,70 mm

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging en het bewaren van de lens wordt Solocare Aqua of Mycare aangeraden.



## Disposables

Met ons uitgebreide assortiment disposables hebben we voor iedere lensdrager een passende lens.

Naast uiteraard focus op goed zicht, uitstekend comfort en hoge zuurstof-doorlaatbaarheid, onderscheiden onze disposables zich op verschillende onderdelen. De daglenzen zijn onovertroffen als het gaat om hygiëne en gemak en bij de maandlenzen zorgen verschillende unieke designdetails voor succes in aanpassing.

|                         | Sferisch | Torisch | Multifocaal | Multifocaal Torisch |
|-------------------------|----------|---------|-------------|---------------------|
| Miru 1month             | •        | •       | •           | •                   |
| Miru 1day Flat Pack     | •        | •       | •           | -                   |
| Miru 1day UpSide        | •        | •       | •           | -                   |
| PremiO                  | •        | •       | -           | -                   |
| Kisu 1month Multi Toric | -        | -       | -           | •                   |

# Miru 1 month

|                                                                                            | Miru 1 month                                       | Miru 1 month Toric                                                                             | Miru 1 month Multifocal | Miru 1 month Multifocal Toric |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b>                                                                     |                                                    |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Sterkte</b>                                                                             | +6,00D t/m -13,00D                                 | +4,00D t/m -10,00D                                                                             | +6,00D t/m -13,00D      | +0,00D t/m -10,00D            |
| <div> <div></div> Stappen van 0,25D           <div></div> Stappen van 0,50D         </div> |                                                    |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Diameter</b>                                                                            | 14,00 mm                                           | 14,00 mm                                                                                       | 14,20 mm                | 14,20 mm                      |
| <b>BCR</b>                                                                                 | 8,30 mm / 8,60 mm                                  | 8,60 mm                                                                                        | 8,60 mm                 | 8,60 mm                       |
| <b>Cilinder</b>                                                                            |                                                    | -0,75D, -1,25D, -1,75D, -2,25D                                                                 |                         | -0,75D, -1,25D                |
| <b>As</b>                                                                                  |                                                    | 0,75D, -1,25D, -1,75D: 10° t/m 180° stappen van 10°<br>-2,25D: 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° |                         | 90° en 180°                   |
| <b>Additie</b>                                                                             |                                                    |                                                                                                | LOW HIGH                | LOW                           |
| <b>Eigenschappen</b>                                                                       |                                                    |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Materiaal</b>                                                                           | Asmofilcon A (Siliconen Hydrogel)                  |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Modulus</b>                                                                             | 0,9 MPa                                            |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Watergehalte</b>                                                                        | 40%                                                |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Dk/tC</b>                                                                               | 161x10 <sup>-9</sup> (cm/sec) · (mLO2/(mL x mmHg)) |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Centrale dikte</b>                                                                      | 0,08mm @ -3,00D                                    |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Handling tint</b>                                                                       | Blauw                                              |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Verpakking</b>                                                                          | 6-pack                                             |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Draagschema</b>                                                                         | Maandelijks vervangen / Daily wear                 |                                                                                                |                         |                               |
| <b>Bijzonderheden</b>                                                                      | Markering                                          |                                                                                                |                         |                               |
|                                                                                            |                                                    |                                                                                                |                         |                               |

## Voordelen


- Siliconen hydrogel maandlens
- Extreem hoge zuurstofdoorlaatbaarheid
- Verkrijgbaar in sferisch, torisch en multifocaal ontwerp
- Unieke randafwerking voor optimaal comfort
- Uniek multifocaal principe met HIGH en LOW ontwerp

## Lensontwerp

Speciaal door ons ontwikkelde materiaal- en oppervlaktetechnologieën zorgen voor een hoog draagcomfort en gezond lenzen dragen. De MeniSilk™ technologie zorgt voor een materiaal met ultrahoge Dk/t en een uitstekende hydratatie. NanoGloss™ is een unieke oppervlaktetechnologie die zorgt voor een zeer glad oppervlak, uitstekende bevochtiging en bacterie-resistentie.

De dikte van een lens heeft een significant effect op de zuurstofdoorlaatbaarheid. De ontwerpen van Miru 1 month optimaliseren zuurstofdoorlaatbaarheid bij iedere sterkte over het gehele lensoppervlak.



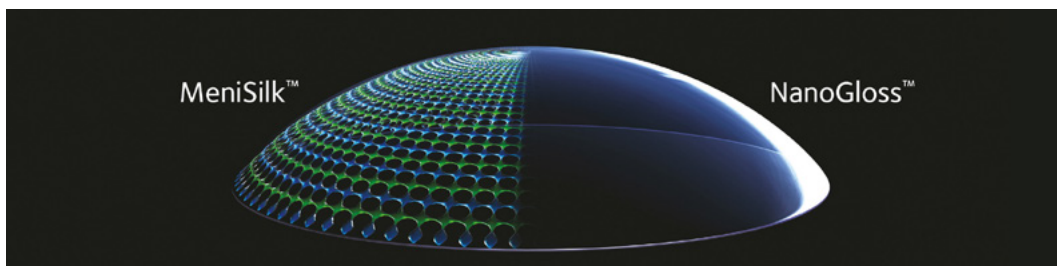


Zowel Miru 1month Toric als Miru 1month Multifocal HIGH hebben een uniek design voor een zo optimaal mogelijke stabilisatie en uitstekend zicht in alle situaties.

### Miru 1month Toric


Een unieke asymmetrische verticale slab-off past bij de anatomie van het oog. Door te knippen stabiliseert de lens tussen de oogleden. De natuurlijke kracht van het ooglid zorgt voor optimale concentratie en voorkomt rotatie.

Unieke dubbele verticale asymmetrische slab-off.

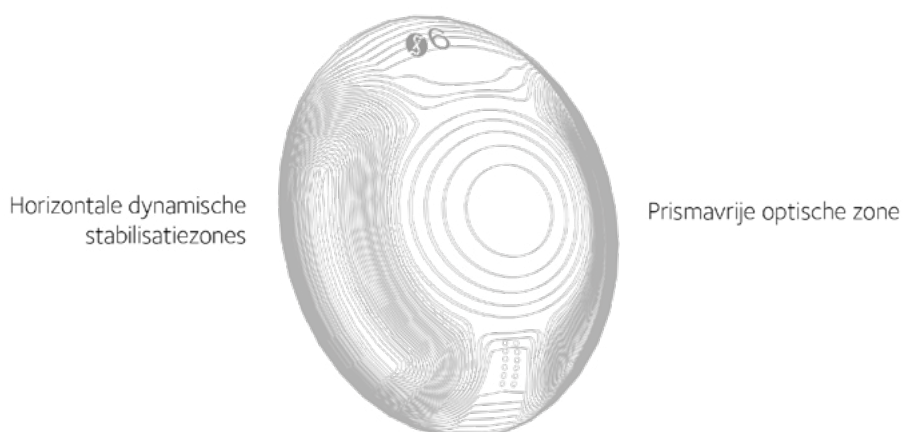

### Miru 1month Multifocal

Door middel van het unieke gedecentreerde ontwerp en de dynamische stabilisatie van het HIGH design wordt de nabij-zone bij het accommoderen en convergeren voor de pupil gepositioneerd. Hierdoor wordt het gezichtsvermogen voor zowel veraf als op leesafstand gewaarborgd.

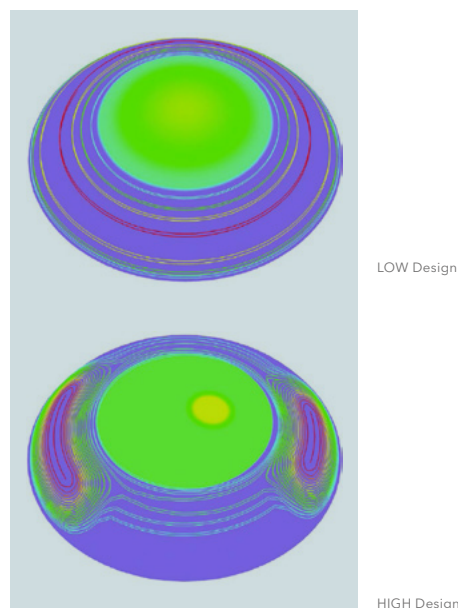


## Aanpassing

Gebruik voor de aanpassing van de Miru 1month in sferische variant onderstaande aanpasregel:

- BCR = K gemiddeld vlakker dan 8,20 mm advies: 8,60 mm
- BCR = K gemiddeld steiler dan 8,20 mm advies: 8,30 mm

Voor een optimale stabilisatie van de Miru 1month Toric is het van belang de lens op het oog te plaatsen met de dubbele streep-markering op 6 uur.

Gebruik voor het aanmeten van Miru 1month Multifocal onderstaand schema:

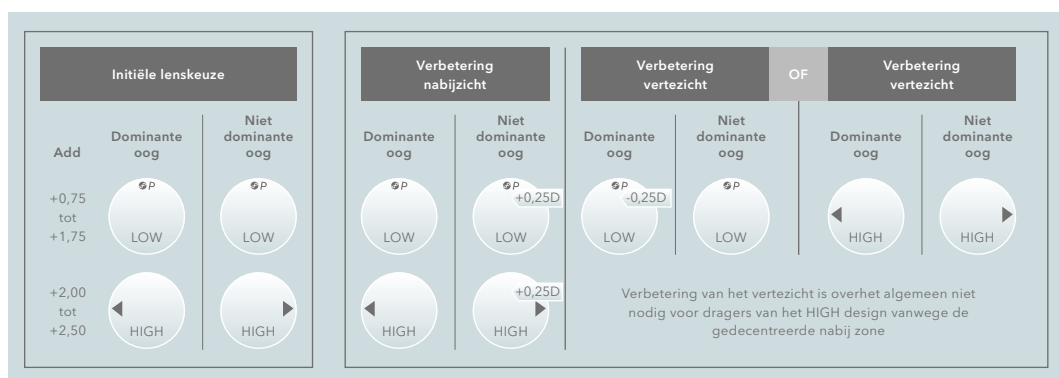

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging en het bewaren van de lens wordt Solocare Aqua of Mycare aangeraden.

# Miru 1day Flat Pack

|                                                               | Miru 1day Flat Pack                                             | Miru 1day FP Toric                                                                                    | Miru 1day FP Multifocal |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b>                                        |                                                                 |                                                                                                       |                         |
| <b>Sterkte</b>                                                | +4,00D t/m -10,00D                                              | +2,00 t/m -10,00D                                                                                     | +4,00D t/m -10,00D      |
| <div>■ Stappen van 0,25D</div> <div>□ Stappen van 0,50D</div> |                                                                 |                                                                                                       |                         |
| <b>Diameter</b>                                               | 14,20 mm                                                        | 14,50 mm                                                                                              | 14,40 mm                |
| <b>BCR</b>                                                    | 8,60 mm                                                         | 8,60 mm                                                                                               | 8,40 mm                 |
| <b>Cilinder</b>                                               |                                                                 | -0,75 in assen<br>15°, 90°, 165°, 180°<br>-1,25 in assen<br>15°, 90°, 165°, 180°<br>-1,75D in as 180° |                         |
| <b>As</b>                                                     |                                                                 | 15°, 90°, 165°, 180°                                                                                  |                         |
| <b>Eigenschappen</b>                                          |                                                                 |                                                                                                       |                         |
| <b>Materiaal</b>                                              | Hioxifilcon A (HEMA-GMA)                                        |                                                                                                       |                         |
| <b>Modulus</b>                                                | 0,2 MPa                                                         |                                                                                                       |                         |
| <b>Watergehalte</b>                                           | 57%                                                             |                                                                                                       |                         |
| <b>Dk/tC</b>                                                  | 19x10 <sup>-11</sup> (cm/sec) · (mLO <sub>2</sub> /(mL x mmHg)) |                                                                                                       |                         |
| <b>Centrale dikte</b>                                         | 0,10 mm @ -3,00D                                                |                                                                                                       |                         |
| <b>Handling tint</b>                                          | Lichtblauw                                                      |                                                                                                       |                         |
| <b>Verpakking</b>                                             | 30-pack, 90-pack                                                |                                                                                                       |                         |
| <b>Draagschema</b>                                            | Dagelijks vervangen, Daily wear                                 |                                                                                                       |                         |
| <b>Bijzonderheden</b>                                         | Smart Touch™ technologie                                        |                                                                                                       |                         |

## Voordelen

- Hydrogel daglens in ultradunne verpakking
- Hip design voor high-end uitstraling
- Eenvoudig en hygiënisch inzetten

## Lensontwerp

Miru 1day Flat Pack lenzen worden gemaakt met behulp van een door ons gepatenteerde Centraform™ spin casting- en polymerisatietechniek. Dit zorgt voor extreem hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Het Centraform™ productieproces staat garant voor een vloeiende randafwerking, waardoor de kans op het zogenaamde 'randjesgevoel' wordt geminimaliseerd.

Miru 1day is asferisch, waardoor er minder sprake is van sferische aberraties. Lichtstralen vallen in één brandpunt, waardoor het beeld scherper en helderder is.

### Miru 1day Flat Pack Toric


Miru 1day Flat Pack Toric heeft een uniek en dun bi-asferisch ontwerp. Door de slimme dynamische asymmetrische stabilisatie past de lens perfect bij de anatomie van het oog. Dit zorgt voor optimale concentratie en voorkomt rotatie. Hierdoor ervaart de drager hoog comfort en stabiel en scherp zicht.

## Miru 1day Flat Pack multifocal

Miru 1day Flat Pack multifocal is een multifocale daglens met een center near ontwerp. Het unieke Neuro Adaptive Design zorgt voor vloeiende overgangen tussen dichtbij, op tussenafstand en veraf kijken. Dit zorgt voor snelle gewenning aan de lenzen en een eenvoudige aanpas.

## Aanpassing

Gebruik voor het aanmeten van Miru 1day Flat Pack multifocal onderstaand schema:

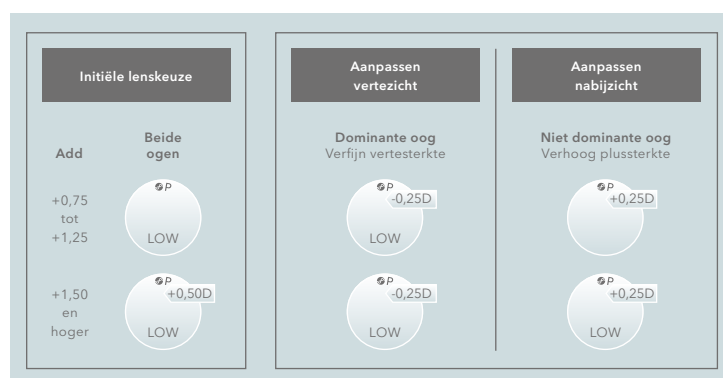

**Algemene tip**  
Kies de laagste additie die voldoet voor nabij-taken. Om de leesprestaties van de paslenzen te verbeteren, voeg meer plussterkte toe. Dit mag ook binoculair.

## Verpakking

De verpakking van amper 1,00 mm dik is ontwikkeld om afval te verminderen en gemak en hygiëne te bevorderen. De lens ligt altijd met de buitenkant van de lens naar boven, zodat de binnenkant van de lens niet aangeraakt hoeft te worden om de lens in te kunnen zetten.

# Miru 1day UpSide

|                                                               | Miru 1day UpSide                                               | Miru 1day UpSide<br>Toric       | Miru 1day UpSide<br>Multifocal |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b>                                        |                                                                |                                 |                                |
| <b>Sterkte</b>                                                | +6,00D t/m -13,00D                                             | plan tot -10,00D                | +5,00D t/m -10,00D             |
| <div>■ Stappen van 0,25D</div> <div>□ Stappen van 0,50D</div> |                                                                |                                 |                                |
| <b>Diameter</b>                                               | 14,20 mm                                                       | 14,20 mm                        | 14,20 mm                       |
| <b>BCR</b>                                                    | 8,40 mm                                                        | 8,40 mm                         | 8,40 mm                        |
| <b>Cilinder</b>                                               |                                                                | -0,75D, -1,25D, -1,75D          |                                |
| <b>As</b>                                                     |                                                                | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° |                                |
| <b>Additie</b>                                                |                                                                |                                 | LOW HIGH                       |
| <b>Eigenschappen</b>                                          |                                                                |                                 |                                |
| <b>Materiaal</b>                                              | Midafilcon A                                                   |                                 |                                |
| <b>Modulus</b>                                                | 0,36 MPa                                                       |                                 |                                |
| <b>Watergehalte</b>                                           | 56%                                                            |                                 |                                |
| <b>Dk/tC</b>                                                  | 91x10 <sup>-9</sup> (cm/sec) · (mLO <sub>2</sub> /(mL x mmHg)) |                                 |                                |
| <b>Centrale dikte</b>                                         | 0,07mm @ -3,00D                                                |                                 |                                |
| <b>Handling tint</b>                                          | Blauw                                                          |                                 |                                |
| <b>UV-klasse</b>                                              | 2                                                              |                                 |                                |
| <b>Verpakking</b>                                             | 30-pack                                                        |                                 |                                |
| <b>Draagschema</b>                                            | Dagelijks vervangen / Daily wear                               |                                 |                                |
| <b>Bijzonderheden</b>                                         | Smart Touch™ technologie                                       |                                 |                                |


## Voordelen

- Siliconen hydrogel daglens
- Smart Touch™ technologie voor hygiënisch en eenvoudig inzetten
- Met extra lage modulus voor extreem hoog comfort

## Lensontwerp

Speciaal door ons ontwikkelde technologieën zorgen voor zeer goede bevochtiging en gezond lenzen dragen voor de consument. De MeniSilk™ Air techniek zorgt voor een materiaal met extra lage modulus voor gezondheid en comfort. NanoGloss™ Pro zorgt voor een superglad oppervlak en verbetert zo het comfort en de handling van het materiaal. Miru 1day UpSide biedt alle gezondheidsvoordelen van siliconen hydrogel, met het comfort van hydrogel! Door het unieke randprofiel blijft de randdikte altijd gelijk, ongeacht de sterkte binnen elk design. Hierdoor worden comfortverschillen tussen beide ogen verholpen.

Miru 1day UpSide lenzen zijn voorzien van klasse 2 UV-bescherming om de ogen te beschermen tegen zowel UVA- als UVB-straling.

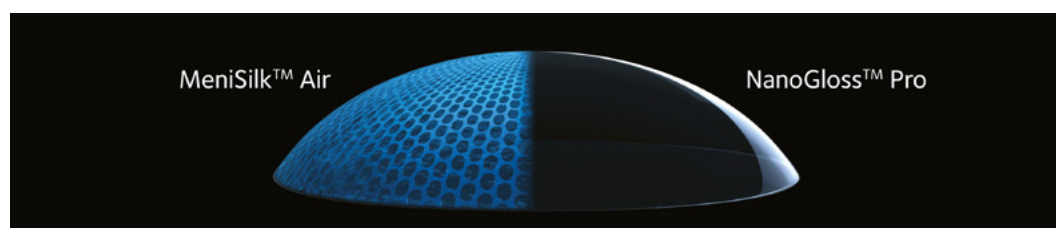


## Miru 1day UpSide Multifocal

Miru 1day UpSide Multifocal is een multifocale daglens met een center near ontwerp. Het unieke Neuro Adaptive Design met vloeiende overgangen tussen dichtbij, tussenafstand en veraf, zorgt voor een snelle gewenning aan de lenzen en een eenvoudige aanpas.

## Aanpassing


Gebruik voor het aanmeten van Miru 1day UpSide Multifocal onderstaand schema:

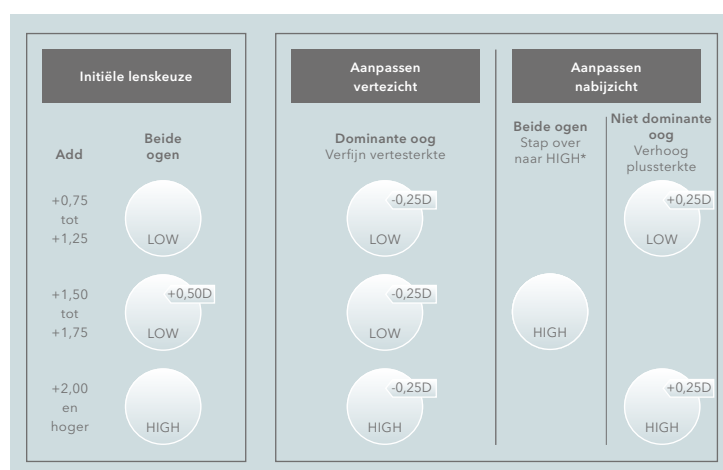

\* Verwijder de extra +0,50D toegevoegd bij de initiële lenskeuze.

## Verpakking

De unieke 'smart-zone' in de blister zorgt ervoor dat de binnenkant van de lens naar beneden ligt, zodat de lens uit de verpakking gehaald kan worden en ingezet kan worden zonder de binnenkant van de lens aan te raken.

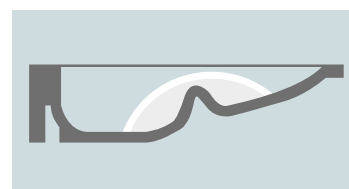

Smart-zone verpakking

Dit zorgt voor extra hygiëne, maar ook voor eenvoudiger inzetten. De consument hoeft niet te controleren of de lens binnenstebuiten zit.

# PremiO


|                                                               | PremiO                                                                                                                     | PremiO Toric                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leveringsbereik</b>                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Sterkte</b>                                                | +6,00D t/m -13,00D                                                                                                         | Plan t/m -6,00D                                                                                                                                  |
| <div>■ Stappen van 0,25D</div> <div>□ Stappen van 0,50D</div> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Diameter</b>                                               | 14,00 mm                                                                                                                   | 14,00 mm                                                                                                                                         |
| <b>BCR</b>                                                    | 8,30 mm / 8,60 mm                                                                                                          | 8,60 mm                                                                                                                                          |
| <b>Cilinder</b>                                               |                                                                                                                            | -0,75D in assen 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°<br>-1,25D in assen 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°<br>-1,75D in assen 10°, 20°, 160°, 170°, 180° |
| <b>Eigenschappen</b>                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Materiaal</b>                                              | Asmofilcon A (Siliconen Hydrogel)                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>Watergehalte</b>                                           | 40%                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| <b>Dk/tC</b>                                                  | 161x10 <sup>-9</sup> (cm/sec) · (mLO <sub>2</sub> /(mL x mmHg))                                                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Centrale dikte</b>                                         | 0,08mm @ -3,00D                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Handling tint</b>                                          | Blauw                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| <b>Verpakking</b>                                             | 6-pack                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| <b>Draagschema</b>                                            | Tweewekelijks vervangen<br>Daily wear of extended wear (6 dagen en nachten,<br>1 nacht uit, daarna weer 6 dagen en nachten |                                                                                                                                                  |
| <b>Bijzonderheden</b>                                         | Markering                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |

## Voordelen

- Twee wekelijkse lens van siliconen hydrogel materiaal
- Verkrijgbaar in sferisch en torisch ontwerp
- Keuze uit twee verschillende BCR
- Geschikt voor extended wear

## Lensontwerp

PremiO is een comfortabele twee-weken siliconen hydrogel lens. Deze lens combineert een hoge zuurstofdoorlaatbaarheid met een uitstekende bevochtiging. Deze eigenschappen worden verkregen door innovatieve technologieën: MeniSilk™ en NanoGloss™.

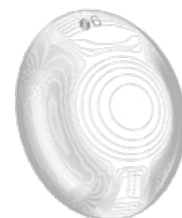

Lensontwerp  
PremiO

PremiO Toric heeft een dubbel verticaal asymmetrisch slab-off ontwerp. De twee stabilisatiezones passen goed bij de anatomie van het oog. De lens stabiliseert tussen de oogleden door het knippen. Bijkomend voordeel is dat de boven- en onderkant van de lens dunner zijn en daardoor comfortabel achter de oogleden passen. De lens heeft een dynamische stabilisatie.

## Aanpassing

Gebruik voor de aanpassing van de PremiO in sferische variant onderstaande aanpasregel:

- BCR = K gemiddeld vlakker dan 8,20 mm advies: 8,60 mm
- BCR = K gemiddeld steiler dan 8,20 mm advies: 8,30 mm

Voor een optimale stabilisatie van PremiO Toric is het van belang de lens op het oog te plaatsen met de dubbele streep-markering op 6 uur.

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging en het bewaren van de lens wordt Solocare Aqua of Mycare aangeraden.



# Kisu 1 month Multi Toric

Kisu 1 month Multi Toric


| Leveringsbereik |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCR             | 8,60 mm                                                                                                                                          |
| Diameter        | 14,7 mm                                                                                                                                          |
| Sterkte         | S -10,00 t/m S -6,00 dpt, stappen van 0,50 dpt<br>S -6,00 t/m S +6,00 dpt, stappen van 0,25 dpt<br>S +6,00 t/m S +8,00 dpt, stappen van 0,50 dpt |
|                 | <div> <div></div> Stappen van 0,25D           <div></div> Stappen van 0,50D         </div>                                                       |
| Additie         | CN: S +1,00 dpt / S +1,50 dpt / S +2,00 dpt<br>CD: S +1,00 dpt / S +1,50 dpt / S +2,00 dpt / S +2,50 dpt                                         |
| Cilinder        | C -0,75 dpt / C -1,25 dpt / C -1,75 dpt / C -2,25 dpt /<br>C -2,75 dpt / C -3,25 dpt                                                             |
| As              | 10° t/m 180°, stappen van 10°                                                                                                                    |
| Eigenschappen   |                                                                                                                                                  |
| Materiaal       | Siliconen hydrogel Filcon V3 (Efofilcon A)                                                                                                       |
| Modulus         | 0,35 MPa                                                                                                                                         |
| Watergehalte    | 74%                                                                                                                                              |
| Handlingtint    | Blauw                                                                                                                                            |
| UV-blocker      | Ja                                                                                                                                               |

## Voordelen

- Torisch multifocale semi-disposable lens
- Zeer snel leverbaar
- Eenvoudig aan te meten
- Hoog comfort door optimale pasvorm

## Lensontwerp

Kisu is een torisch multifocale maandlens voor mensen die zowel een cilinder als een additie nodig hebben. De dynamische stabilisatie in combinatie met een prisma (peri ballast) zorgt voor goede stabiliteit. Hierdoor ervaart de drager zeer scherp zicht en hoog draagcomfort.

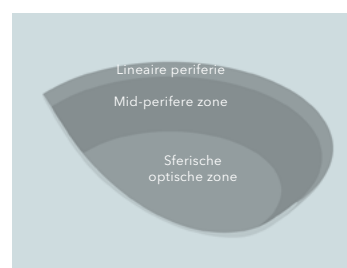

Lensontwerp  
Kisu

## Aanpassing

De aanpassing van deze lens is eenvoudig. Het is een one-size-fits-all design. Kisu is verkrijgbaar in zowel Near- als Distance-design. Wij adviseren te starten met het Near-design. Wanneer dit niet werkt, kunt u overstappen naar het Distance-design, of een combinatie van beide. Mochten er bij de aanpassing problemen ontstaan dan kan een maatwerk lens een oplossing zijn voor die specifieke consument.

## Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging en het bewaren van de lens wordt Solocare Aqua of Mycare aangeraden.



## Lenzenvloeistoffen

Voor het comfortabel en veilig dragen van contactlenzen is lenzenvloeistof erg belangrijk. Bij het juiste gebruik draagt contactlensvloeistof bij aan helder en comfortabel zicht. Daarnaast is het dagelijks reinigen van contactlenzen belangrijk voor de algehele gezondheid van het oog.

Advies over het gebruik van lenzenvloeistof richting de consument is belangrijk voor goed lensonderhoud. Wij adviseren u de consument te wijzen op het belang van het vervangen van de lenshouder bij elke nieuwe fles vloeistof. Deze lenshouders worden altijd meegeleverd in de verpakking. Daarnaast zijn veel consumenten niet op de hoogte dat contactlenzen en water een slechte combinatie zijn. Ook dit is een belangrijk punt om te benadrukken tijdens gesprekken met de consument.

### Zachte lenzen

- Solocare Aqua®
- Mycare

### Harde lenzen

- Menicare Pure
- Menicare Plus
- Progent
- Spray & Clean
- Nachtlenzen®  
Onderhoudspakket
- Menicon Bloom Night™  
Onderhoudspakket

### Harde en zachte lenzen

- PLATINCARE

# Zachte lenzen vloeistof

## Solocare Aqua®

Solocare Aqua is een alles-in-een vloeistof voor alle zachte lenzen met een unieke formule waardoor de lenzen veel meer vocht vasthouden. Het unieke Hydrolock®-effect en de MicroBlock®-lenshouder zorgen voor betere hydratatie van de lenzen die daardoor voor een betere bevochtiging zorgen. Voor betere hygiëne, meer comfort en frisheid, de hele dag door. De Hydrolock®-formule met hydraterende eigenschappen houdt tot 90% meer vocht vast. Er vormt een vochtig laagje op de lens waardoor ze de hele dag comfortabel aanvoelen. De MicroBlock® lenshouder met bacteriedodende zilverionen zorgt dat de lenzen schoon blijven en frisser aanvoelen.

### Voordelen

- Optimale hydratatie door Hydrolock®-effect en MicroBlock® lenshouder
- Bewezen hydraterende en desinfecterende eigenschappen
- Optimale bevochtiging

### Toepassing

Solocare Aqua is geschikt voor alle zachte lenzen. De alles-in-een vloeistof voor dagelijks gebruik maakt het reinigen en bewaren van zachte lenzen zeer eenvoudig.

## Mycare

Met Mycare bieden we u een nieuwe all-in-one vloeistof voor zachte contactlenzen. Deze vloeistof met plantaardige ingrediënten is verrijkt met hyaluron, een molecuul dat van nature in het menselijk lichaam aanwezig is. Mycare all-in-one heeft visco-elastische eigenschappen die bijdragen aan behoud en stabiliteit van de traanfilm.

### Voordelen

- Bescherm het hoornvliesepitheel op een natuurlijke manier
- Biedt een maximale antibacteriële werking
- Geeft een uitermate goed comfort tijdens het dragen van contactlenzen
- Is goed te gebruiken als de consument gevoelige ogen heeft

### Toepassing

Mycare is geschikt voor alle zachte lenzen. De alles-in-een vloeistof voor dagelijks gebruik maakt het reinigen en bewaren van zachte lenzen zeer eenvoudig.

# Harde lenzen vloeistof

## Menicare Pure

Menicare Pure is een alles-in-een vloeistof voor alle harde lenzen. Deze vloeistof, op basis van natuurlijke ingrediënten, is onze eerste keuze lenzenvloeistof voor harde lenzen. Menicare Pure zorgt voor een betere reiniging, betere bevochtiging en een zeer hoog draagcomfort. Door de natuurlijke samenstelling is de vloeistof mild voor de ogen en zorgt het voor een goede verdraagzaamheid.

### Voordelen

- Op basis van natuurlijke ingrediënten
- Mild voor het oog
- Verbeterde reiniging
- Optimale bevochtiging

### Toepassing

Menicare Pure is geschikt voor de dagelijkse reiniging van alle harde lenzen, met of zonder plasmabehandeling.

## Menicare Plus

Menicare Plus is een alles-in-een vloeistof voor alle harde lenzen. De vloeistof reinigt en desinfecteert optimaal en is ook ideaal als inzetvloeistof. Menicare Plus zorgt voor direct comfort na het inzetten van de lenzen en voor een goede bevochtiging.

### Voordelen

- Bewezen effectieve reiniging en desinfectie
- Inzetten, bewaren en reinigen met slechts één vloeistof

### Toepassing

Menicare Plus is geschikt voor de dagelijkse reiniging van alle harde lenzen, ook de met plasma behandelde lenzen van Menicon Z- en Menicon EX-materiaal.

## Progent

Progent is een extra intensiefreiniger voor alle harde lenzen. Binnen maximaal 30 minuten is het lensoppervlak perfect schoon. Deze maandelijkse extra reiniger zorgt daarmee voor een optimaal comfort.

### Voordelen

- Verwijdert eiwitafzetting
- Verbetering van het draagcomfort
- Voor alle harde lenzen

### Toepassing

Door een behandeling met Progent worden in één keer eiwitten van het lensoppervlak verwijderd. Maandelijks reinigen zorgt al voor een voelbare verbetering van het draagcomfort. Bij droge ogen of snel vervuilde lenzen kunt u tweewekelijks reinigen adviseren. Progent kan gebruikt worden in combinatie met alle andere vloeistoffen voor harde lenzen.

## Spray&Clean

Spray&Clean is een reinigingsvloeistof zonder conserveringsmiddelen in sprayuitvoering. Het is een krachtige extra reiniger voor alle harde lenzen die afrekenen met vette (lipide) aanslag. Spray&Clean zorgt voor een helder en schoon lensoppervlak en daardoor voor een betere bevochtiging. Dat biedt de lensdrager optimaal comfort en een scherper zicht.

### Voordelen

- Geen conserveringsmiddelen
- Betere bevochtiging
- Altijd schone lenzen
- Met één druk op de knop de juiste hoeveelheid vloeistof

### Toepassing

Spray&Clean is een additionele reiniger voor alle harde lenzen. Het is een extra reiniger naast alles-in-een vloeistoffen zoals Menicare Pure en Menicare Plus. U kunt Spray&Clean adviseren bij terugkerende vette (lipide) aanslag op het lensoppervlak. Regelmatig gebruik zorgt al voor een voelbare comfortverbetering.

## Nachtlenzen® Onderhoudspakket

Het Nachtlenzen Onderhoudspakket is een volledig onderhoudspakket voor Nachtlenzen. Het onderhoudspakket bestaat uit twee flessen Menicare Pure, een verpakking Progent (5 setjes) en twee lenshouders.

Menicare Pure voor de dagelijkse reiniging en het bewaren van Nachtlenzen in combinatie met Progent voor extra maandelijkse reiniging zorgt voor het ultieme onderhoud van Nachtlenzen. Het comfort tijdens het dragen en de goede conditie van de lenzen blijven hierdoor behouden.

### Voordelen

- Eén pakket voor het volledige onderhoud van Nachtlenzen
- Eenvoudige additionele verkoop bij de verkoop van Nachtlenzen
- Inhoud van pakket bestaat uit eerste-keuze producten voor het onderhoud van Nachtlenzen

### Toepassing

Het Nachtlenzen Onderhoudspakket is geschikt voor alle Nachtlenzen. De combinatie van dagelijkse reiniging met Menicare Pure en maandelijkse reiniging met Progent zorgt voor optimaal onderhoud van Nachtlenzen.

## Menicon Bloom Night™ Onderhoudspakket

Het Menicon Bloom Night Onderhoudspakket is speciaal samengesteld voor het meest optimale onderhoud voor 6 maanden van Menicon Bloom Night lenzen. Het Menicon Bloom Night Onderhoudspakket is onderdeel van het Menicon Bloom Behandelplan\*. Het pakket bestaat uit drie flessen Menicare Pure, een verpakking Progent (5 setjes) en drie lenshouders.

Menicare Pure voor de dagelijkse reiniging en het bewaren van Menicon Bloom Night lenzen, in combinatie met de maandelijkse reiniging van Progent voor het verwijderen van eiwitten van het lensoppervlak. Samen zorgen deze voor de ultieme reiniging van de lenzen.

### Voordelen

- Eén pakket voor het volledige onderhoud van Menicon Bloom Night lenzen
- Uitgebalanceerde combinatie van producten voor het beste onderhoud

### Toepassing

Om Menicon Bloom Night lenzen in optimale conditie te houden, is het belangrijk de lenzen 's ochtends na het uitdoen goed te reinigen met Menicare Pure en te bewaren in een lenshouder met verse contactlensvloeistof. Daarnaast moeten de lenzen maandelijks met Progent gereinigd worden.

\* Om deze reden is het Menicon Bloom Night Onderhoudspakket niet los verkrijgbaar.

## Harde en zachte lenzen vloeistof

### PLATINCARE

PLATINCARE is een eenfasige waterstofperoxideoplossing voor een krachtige reiniging, desinfectie en neutralisatie van harde en zachte contactlenzen. De unieke formule zonder conserveringsmiddel reinigt grondig en verwijdert hardnekkig vuil en afzettingen. Speciaal ontwikkeld voor mensen met allergieën of gevoelige ogen, biedt deze oplossing een milde maar effectieve reiniging.

### Voordelen

- Effectieve desinfectie
- Effectieve reiniging
- Geschikt voor harde en zachte contactlenzen
- Eénstaps waterstofperoxide
- Vrij van conserveringsmiddelen, dus geschikt voor gevoelige ogen

### Toepassing

PLATINCARE zorgt voor een krachtige reiniging desinfectie en neutralisatie van harde en zachte contactlenzen. De houder met platina katalysator zorgt ervoor dat de lenzen dagelijks een intensieve reiniging ondergaan met peroxide voordat het neutralisatieproces begint, voor een ultiem schoon resultaat.



# Algemene Leveringsvoorwaarden

Menicon B.V. \* KvK 04040621 \* januari 2020



## **1. Toepasselijkheid**

- 1.1 Onder Menicon wordt verstaan de besloten vennootschap Menicon B.V. Onder afnemer wordt verstaan de contractuele wederpartij van Menicon. Onder eindgebruiker wordt verstaan een klant van afnemer, namelijk de lensdrager die de producten van Menicon toepast. Onder maatwerk-producten worden verstaan de producten die Menicon produceert op basis van door de afnemer aangeleverde specifieke oogmeetgegevens van de eindgebruiker.
- 1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Menicon en afnemer op grond waarvan Menicon aan afnemer producten en/of diensten levert en/of op andere wijze ter beschikking stelt, van het ogenblik af dat afnemer aan Menicon om een aanbieding vraagt dan wel Menicon een aanbieding doet. Onder diensten dient onder meer te worden verstaan gebruikersinstructies, advies- en/of begeleidingswerkzaamheden.
- 1.3 Afnemer zal zich nimmer kunnen beroepen op afwijkende voorwaarden, gewoonten of gebruiken.
- 1.4 Deze Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang boven andersluidende voorwaarden of bedingen van afnemer of derden.
- 1.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Menicon en afnemer in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

## **2. Aanbieding en aanvaarding**

- 2.1 Enige aanbieding van Menicon is vrijblijvend en geldt bij benadering. Deze bepaling is eveneens van toepassing op door vertegenwoordigers van Menicon gedane aanbiedingen en op door Menicon verstrekte catalogi.
- 2.2 Menicon behoudt zich het recht voor bestellingen van afnemer zonder opgave van reden te weigeren.
- 2.3 Een overeenkomst tussen Menicon en afnemer komt tot stand op het moment waarop Menicon enige bestelling van afnemer schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zodra Menicon een bestelling zonder orderbevestiging (deels) heeft uitgevoerd.

## **3. Levering en risico**

- 3.1 Alle leveringen geschieden af fabriek.
- 3.2 De door Menicon opgegeven levertijden gelden bij benadering. Menicon is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat als gevolg van niet of te laat afleveren van bestelde producten. Bij niet-tijdige levering heeft afnemer geen recht op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
- 3.3 Menicon behoudt zich het recht voor de portokosten door te belasten aan afnemer.
- 3.4 Menicon is gerechtigd een bestelling in gedeelten af te leveren. In dat geval mag Menicon enige deellevering afzonderlijk aan afnemer factureren en daarvoor betaling verlangen.

#### **4. Medewerking afnemer**

- 4.1 Afnemer verplicht zich de producten van Menicon uitsluitend aan de eindgebruiker te zullen leveren met inachtneming van de gebruiksaanwijzingen en zorgvuldigheidsbepalingen en (na)zorginstructies van Menicon.
- 4.2 Afnemer verplicht zich deze gebruiksaanwijzing en zorgvuldigheidsbepalingen aan de eindgebruiker te overhandigen bij de aflevering van enig product aan deze eindgebruiker.
- 4.3 Afnemer dient kwalitatief goede dienstverlening te bieden aan eindgebruikers. Dit houdt onder meer in dat afnemer en het door hem ingeschakelde personeel een geschikte opleiding hebben genoten voor het kunnen aanmeten van producten en het bieden van toereikende nazorg en afnemer daartoe over geschikte middelen en instrumenten beschikt. Voor maatwerkproducten is afnemer verplicht om aan de eindgebruiker rechtstreeks aanmeetadvies en nazorg te verlenen. In geval van wederverkoop verzekert afnemer zich ervan dat ook deze derde hieraan voldoet.
- 4.4 Menicon behoudt zich het recht voor de levering onmiddellijk te staken indien blijkt dat afnemer niet voldoet aan deze bepaling.

#### **5. Prijzen**

- 5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen zoals die laatstelijk door Menicon zijn gepubliceerd op het moment van levering van de bestelde producten.
- 5.2 Indien na de aanbieding of na de totstandkoming van een overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Menicon gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen buitenlandse valuta-wijzigingen, die tot wijziging van kostprijzen voor Menicon leiden.
- 5.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
- 5.4 In geval voor Menicon extra kosten ontstaan, die niet zijn voorzien ten tijde van de bestelling of aanbieding en/of die zijn toe te rekenen aan vertraging van de aflevering ingevolge de (nadere) wensen of aanwijzingen van afnemer of ingevolge welke andere omstandigheid ook waarvoor Menicon niet aansprakelijk is, zullen deze extra kosten volgens opgave van Menicon voor rekening van afnemer komen.
- 5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vermeldt de laatst uitgegeven prijslijst de nadere voorwaarden met betrekking tot retournering en creditering.

#### **6. Facturering en betaling**

- 6.1 Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, of zoals aangegeven op de factuur en in ieder geval uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.
- 6.2 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.
- 6.3 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Menicon

zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van Menicon op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.

- 6.4 Menicon en afnemer worden geacht te zijn overeengekomen, dat deze buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met inbegrip van de eventuele kredietbeperkingstoeslag, tenzij Menicon aantoonst dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.
- 6.5 Alle aan afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook. Afnemer heeft geen recht om enige betaling aan Menicon op te schorten.
- 6.6 Menicon heeft het recht producten aan afnemer uitsluitend onder rembours af te leveren. De daaraan verbonden rembourskosten zijn in dat geval geheel voor rekening van afnemer.

## **7. Eigendomsvoorbehoud**

- 7.1 Menicon behoudt zich de eigendom voor van de aan afnemer geleverde producten tot het moment waarop afnemer enige vordering uit hoofde van een tegenprestatie voor een door Menicon aan afnemer krachtens een overeenkomst geleverd of nog te leveren product alsmede enige vordering uit hoofde van het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst (incl. rente en kosten), aan Menicon heeft voldaan. In geval van niet-tijdige betaling heeft Menicon het recht de geleverde producten zonder enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen.
- 7.2 Zolang Menicon eigenaar van de producten is, mag afnemer daarover uitsluitend beschikken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
- 7.3 Indien derden rechten doen gelden met betrekking tot producten die eigendom zijn van Menicon, is afnemer verplicht Menicon hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

## **8. Garanties en reclamering**

- 8.1 Alle door Menicon geleverde en/of ter beschikking gestelde producten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Menicon voorgeschreven zorgvuldigheidsbepalingen en/of de gebruiksaanwijzingen. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient afnemer zich tot de bij Menicon beschikbare specialisten te wenden.
- 8.2 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Menicon de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde producten gedurende een termijn welke gelijk wordt gesteld aan de helft van de door Menicon geadviseerde vervangingstermijn tot een maximum van drie maanden.
- 8.3 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik en van nabewerking door de afnemer.
- 8.4 De garantie is beperkt tot reparatie of vervanging.

- 8.5 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen de retourtermijn als opgenomen in de meest recente prijslijst.
- 8.6 Overschrijding van de in het vorige lid gestelde termijn leidt tot verval van alle aanspraken jegens Menicon ter zake van de garantieverplichting.

## **9. Aansprakelijkheid**

De aansprakelijkheid van Menicon uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

## **10. Rechten van (intellectuele en industriële) eigendom**

- 10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menicon is het afnemer niet toegestaan gebruik te maken van de merken, woord- en beeldlogo's van Menicon anders dan door de presentatie van producten waarop deze zijn aangebracht, of door gebruik van het door Menicon aan afnemer ter beschikking gestelde promotiemateriaal.
- 10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is berusten alle rechten van intellectueel eigendom of industrieel eigendom op alle bij de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en/of andere zaken, informatie en/of gegevens zoals analyses, (technische) documentatie uitsluitend bij Menicon.
- 10.3 Afnemer verklaart en staat er jegens Menicon voor in dat afnemer met de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Menicon voor alle aanspraken te dier zake en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk en ten laste komt van Menicon of van degene die zich op een dergelijk recht beroept, vergoeden.
- 10.4 Alle tekeningen, modellen, (technische) documentatie, computerprogramma's of andere dragers van informatie alsmede alle zaken die voor of bij (de voorbereiding van) de uitvoering van de overeenkomst door Menicon aan afnemer zijn verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van Menicon en zullen nadat uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door afnemer aan Menicon worden teruggezonden.

## **11. Beëindiging en annulering**

Menicon kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer verplichtingen jegens Menicon niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien afnemer – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer het faillissement wordt aangevraagd, ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij afnemer op zaken waarin of waarop zich zaken van Menicon bevinden of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen of indien voor afnemer een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw is ingediend. Menicon zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

## **12. Verjaring**

Ieder vorderingsrecht en/of verweer jegens Menicon verjaart door het enkele verloop van één jaar na ontstaan van de vordering.

## **13. Geheimhouding**

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Menicon is afnemer gebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin, geheim te houden.

## **14. Toepasselijk recht en geschillen**

- 14.1 De overeenkomst tussen Menicon en afnemer wordt beheerst door Nederlands recht.
- 14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020.



Deze catalogus is een uitgave van Menicon B.V.

Waanderweg 6 • 7812 HZ Emmen • 0591 - 610 640 • [info@menicon.nl](mailto:info@menicon.nl) • [www.menicon.nl](http://www.menicon.nl)

© 2021 Menicon, Emmen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Zetfouten voorbehouden.

