



Miru

1day Menicon Flat Pack



Disposable daglenzen met Smart Touch™
en Smart Fit technologie



sphere



toric




multifocal



Gemak

Het ultieme gemak in lensdragen

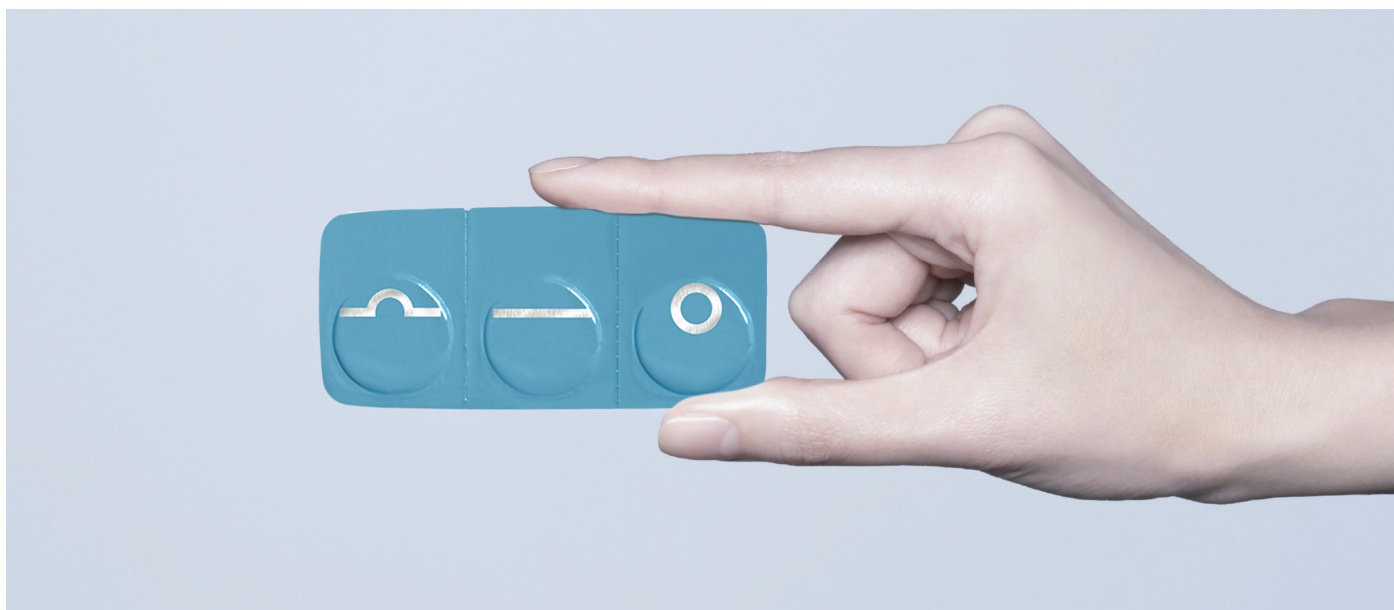

De dunste lensverpakking ter wereld, ontworpen met de lensdrager in gedachten. Voor eenvoudigere handling en hygiënischer en comfortabeler lensdragen.

**Eenvoudig te
openen**

Door gebruik van
unieke folie.

**Eenvoudig te
vinden**

Geen zoek naar de
lens in de vloeistof.

**Eenvoudig in te
zetten**

De juiste kant naar
boven – gegarandeerd.

**Eenvoudig te
dragen**

Elke dag een schoon
setje lenzen.

De doordachte, ultradunne en vederlichte verpakking wordt geleverd in een handig opbergdoozje voor 30 lenzen en is eenvoudig mee te nemen. Ideaal tijdens het reizen en sporten.



Hygiëne

Smart Touch™ technologie voor hygiënische handling


De unieke verpakking zorgt ervoor dat de binnenkant van de lens niet aangeraakt wordt tijdens het inzetten. De drager raakt alleen de buitenkant van de lens aan.



Bij het openen ligt de buitenkant van de lens altijd naar boven.



De binnenkant van de lens wordt hierdoor niet aangeraakt.

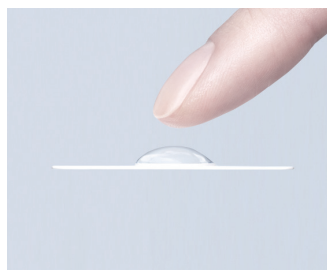


Verminderde kans of besmetting van de binnenkant van de lens.



Minimale handling voor verbeterde hygiëne.

Verminderd risico op microbacteriële besmetting

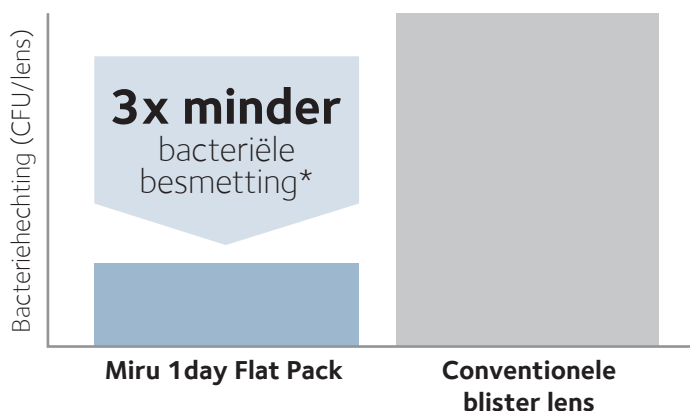

Het aantal bacteriekolonies op de lens na het uit de verpakking halen.

Active compliance™

- Verpakking is specifiek ontworpen voor eenmalig gebruik.
- Afwezigheid van conventionele kom-achtige blister voorkomt dat de blister gebruikt wordt om de lens in te bewaren.
- Hoeveelheid lensvloeistof (slechts 0,2ml) is optimaal voor het inzetten en voorkomt hergebruik van de lens.

SMART TOUCH™




Miru 1 day Flat Pack voor een comfortabele dag

Ontworpen om tegemoet te komen aan de uitdagingen van ons drukke leven, zoals het gebruik van digitale schermen, reizen en sport.

Natuurlijke bevochtiging


Het biomimetische materiaal bindt op een natuurlijke manier met de traanfilm, door het gebruik van een vergelijkbaar bindmechanisme als van de mucinelaag waardoor vocht ingesloten wordt en de lens gehydrateerd wordt bij iedere knipperslag.

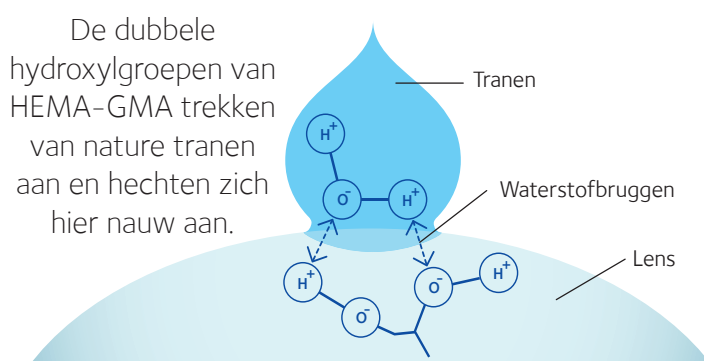

Miru 1 day lenzen helpen de stabiliteit van de traanfilm te behouden zodat je de lenzen langer kunt dragen.

CENTRAFORM™ randontwerp – Ervaar het comfort

Het lage edgeprofiel geeft minimale conjunctieve- en ooglidverstoring, waardoor de oogleden moeiteloos en comfortabel over de lens glijden.

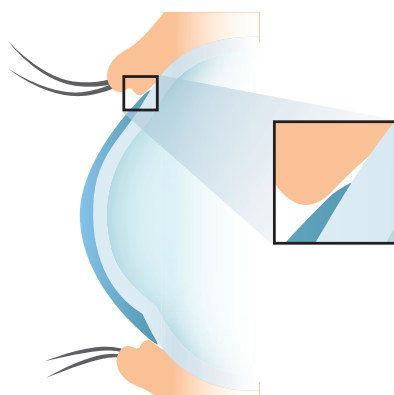


Optimaal comfort door uniek randontwerp met vloeiende randafwerking en lage frictie.




Milieu

Zorgen voor het milieu – Menicon ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelen


De voordelen van CENTRAFORM™ Technologie

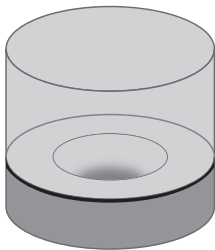

Voor elke afzonderlijke lensspecificatie wordt een aparte spin cast-mal gemaakt.

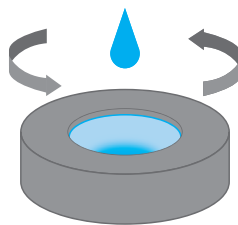

Het lensmateriaal wordt in de mal geïnjecteerd, gedraaid en nauwkeurig gecontroleerd.

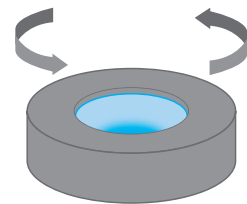

Lens polymerisatie.

CENTRAFORM™ is een uniek **volledig geautomatiseerd productieproces** dat hoge kwaliteit asferische optiek kan produceren in comfortabele dunne lensontwerpen, met uitstekende reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid.

Door het gebruik van slechts 1 holle mal die speciaal ontworpen is voor elke lensspecificatie, worden minder grondstoffen en energie gebruikt waardoor de lens nog duurzamer wordt.

Het slimme ontwerp maakt de lens de ideale keuze voor mensen met een **actieve levensstijl**. Eenvoudig mee te **nemen op vakantie** of naar **events**, ook als **dual wear** optie.

Een duurzame toekomst in zicht

Minder grondstoffen

80%
VERMINDERING

Het gebruikte plastic in de verpakking is verminderd met ongeveer 80%.¹

Minder verspilling

99%
GERECYCLED

Het gebruikte plastic in het productieproces wordt voor ongeveer 99% gerecycled.²


Focus op het milieu

100%
GERECYCLED

Verpakkingen zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic.³



Miru 1 day Flat Pack toric is door het unieke bi-asferische ontwerp extra dun

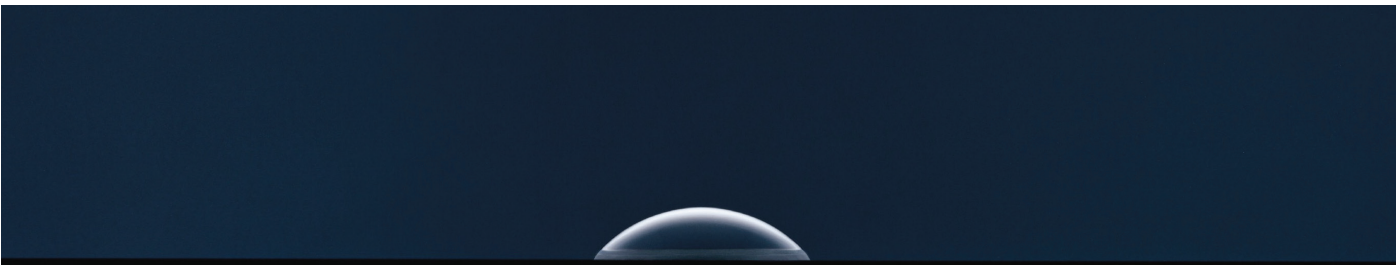

Scherp, helder zicht zelfs bij verminderd licht


De slimme dynamische asymmetrische stabilisatie past bij de anatomie van het oog, wat een hoog comfort biedt, zorgt voor optimale centratie en rotatie voorkomt.



Smart Fit zorgt voor een juiste stabilisatie van de lens, ongeacht hoe deze ingezet wordt.




Het slimme torische ontwerp respecteert de natuurlijke asymmetrie van de oogleden en heeft een minimaal gemiddeld dikteprofiel om comfort te verbeteren.

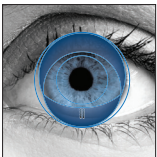


De dubbele verticale slab-off zorgt voor een perifere stabilisatie die rotatie voorkomt en centratie van de lens optimaliseert. Dit geeft stabiel en scherp zicht.

Het bi-asferische ontwerp zorgt ervoor dat een goede visus behouden blijft, ook bij lichte decentratie van de lens.

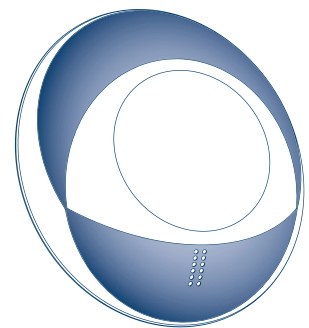



Miru 1 day Flat Pack multifocal met Neuro Adaptive™ Design

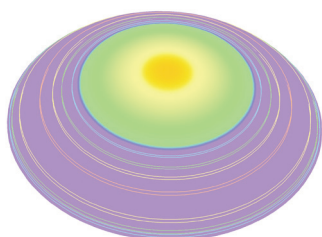

Neuro Adaptive™ design – Center Near vision

Eenvoudige gewenning door vloeiende overgangen tussen zicht nabij, op tussenafstand en veraf.

Het dunne bi-asferische ontwerp verhoogt comfort en visuele prestaties, door het bieden van een grotere scherptediepte en geavanceerde aberratiecontrole.

Miru 1 day Flat Pack multifocal succesvol aanpassen



Miru 1 day Flat Pack multifocal is specifiek ontworpen om multifocaal aanpassen eenvoudiger te maken.

- Corrigeer maximaal plus uit tijdens de vertezichtrefractie
- Houd rekening met de vertexafstand ($> +/ - 4D$) en het gemiddelde sferische equivalent tot 1D
- Bepaal het dominante oog
- Selecteer de initiële additie. Aanpassingen aan de sterkte zijn veelal niet nodig. Extra plus in de verte kan als eerste optie gegeven worden en wordt vaak goed verdragen.




Lensaanpassing is nog nooit zo eenvoudig geweest met onze online Calculators:

multifocal.meniconcalculator.com
toric.meniconcalculator.com

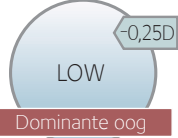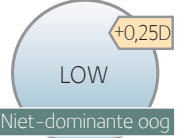Keuze initiële lens	Aanpassen vertezicht	Aanpassen nabij-zicht
Add +0,75D tot +1,25D 	Verfijn vertesterkte 	Verhoog plussterkte 
Add +1,50D en hoger 	Verfijn vertesterkte 	Verhoog plussterkte 

Algemene tip:
Kies de laagste additie die voldoet voor nabij-taken. Om de leesprestaties van de paslenzen te verbeteren, voeg meer plussterkte toe. Dit mag ook binoculair.

Productspecificaties

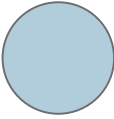Lensontwerp	Materiaal	Sphere, Toric en Multifocal	Hioxifilcon A
	Watergehalte	Sphere, Toric en Multifocal	57%
	Handling tint	Sphere, Toric en Multifocal	Lichtblauw
	Ontwerp	Sphere Toric en Multifocal	Asferisch Bi-asferisch
	Productieproces	Sphere, Toric en Multifocal	CENTRAFORM™ proces
Leveringsbereik	BCR	Sphere en Toric Multifocal	8,6mm 8,4mm
	Diameter	Sphere Toric Multifocal	14,2mm 14,5mm 14,4mm
	Sterktebereik	Sphere	+4,00D tot +0,50D (stappen van 0,25D) -0,50D tot -6,00D (stappen van 0,25D) -6,50D tot -10,00D (stappen van 0,50D)
		Toric	+2,00D tot -6,00D (stappen van 0,25D) -6,50D tot -10,00D (stappen van 0,50D)
		Multifocal	+4,00D tot -6,00D (stappen van 0,25D) -6,50D tot -10,00D (stappen van 0,50D) Additie: LOW
	Cilinder	Toric	-0,75D, -1,25D, -1,75D (-1,75D is alleen verkrijgbaar met as 180°)
	As	Toric	15, 90, 165 en 180 graden
Dagelijks vervangen		Sphere en Multifocal	
		Toric	
Draagschema		Sphere, Toric en Multifocal	Dagelijks vervangen
Verpakking		Sphere, Toric en Multifocal	Paslens: 6-pack 30-pack



SMART TOUCH™